

Heidi

Talande kökssvåg



Innehållsförteckning

1: Inledning	3
2: Beskrivning och leveransinnehåll	4
3: Strömförsörjning.....	5
4: Start och knappbeskrivning.....	6
4.1: Start och avstängning.....	6
4.2: Vägning	6
4.3: Tarafunktion	6
4.4: Volyminställningn	6
4.5: Knapplås	6
4.6: Upprepning.....	7
4.7: Referensmätning	7
4.7.1: Inställning av referensvikt ("önskad vikt").....	7
4.7.2: Mätning av referensvikt.....	7
4.8: Tillägg av vikter	7
4.9: Enhetsinställning	7
5: Säkerhetsanvisningar	8
6: Rengöring och underhåll	8
7: Teknisk data.....	9
8: Garanti och service	9
9: Lagenlig information ang. avfallshantering.....	10
9.1: Kassering av elektroniska produkter	10
9.2: Återvinning av batterier.....	10
10: Förekommande symboler	11
11: Tillverkare	12

1: Inledning

Å CareTecs vägnar vill vi tacka för köpet av den här produkten. Längst ner på bruksanvisningen hittar du mer information om företaget.



Varning: Vänligen avlägsna de röda plastlisterna och tejp vars enda syfte har med transportereringen att göra innan du börjar att använda hushållsvågen Heidi. Spara listerna för kommande transport av hushållsvågen.

Heidi – den lättanvända, fina och talande köksvågen från CareTec. Heidi har förutom de olika standardfunktionerna, även en tarafunktion. Köksvågen Heidi har en kvadratisk platta som är ca 180 kvadratcentimeter, vilket betyder att det finns tillräckligt med plats att ställa skålar och behållare med olika former och storlekar stabilt på plattan



Varning: Starta inte vågen utan att först ha läst och förstått bruksanvisningen. Spara även bruksanvisningen för senare tillfälle och ge den vidare tillsammans med vågen om det skulle behövas.



Varning: Vågen får bara återlämnas inom tiden för ångerrätt (14 dagar). Alla originaldelar ska returneras i sin originalförpackning och vara i försäljbart skick. Saknas något eller är någon del skadad dras detta av priset vid återköp.



Varning: Överskrid aldrig maxvikten på 5 kg

2: Beskrivning och leveransinnehåll

I leveransen medföljer, förutom vågen, 4 st 1,5 V AA-batterier och en bruksanvisning. En nätadapter finns som tillbehör.

Ställ Heidi på de sex gummifötterna, så att den lätt sneda delen med displayen och knapparna är riktad emot dig.



Ovansida

Den lätt sneda delen med displayen och knapparna är riktad mot dig. Följande knappar kan du känna: längst till vänster har du På/Av-knappen (markerad med taktil punkt). I mitten sitter plus- (den högra) och minusknappen (den vänstra) bredvid varandra. Med de här knapparna ställer du in volymen och knapplåset. Knapparna på den högra sidan som ligger över varandra heter (nedifrån och upp): knapp 1, knapp 2 och knapp 3. De behövs för upprepningsfunktionen (knapp 1), referensmätningen (knapp 2) och tilläggsvikten (knapp 3). Bakom den sneda delen med displayen och knapparna finns plattan (vågskålen) På den ställs det som ska vägas.

Sidorna

På Heidis vänstra sida finns det 3 uttag. Uttaget längst bak är till för nätadapter. Det i mitten är ett uttag för våra servicetekniker. Uttaget närmast dig är till för hörlurar. Hörlurar köps separat.

Undersida

Vänd vågen upp och ner. På undersidan känner du 6 små kvadratiska gummifötter som gör att Heidi står stabilt. Under den lätt sneda delen med display och knappar, finns det rektangulära batterifacket. Direkt nedanför finns en kvadratisk platta som är räfflad i mitten – det är högtalaröppningen.

3: Strömförsörjning

Köksvågen Heidi kan drivas med både batteri och ström. Den passande nätadaptern går att köpa separat.

Batterianvändning

Tryck på flärpen och dra samtidigt locket mot högtalaröppningen för att öppna batteriluckan. Det går inte att ta bort locket helt och hållet. Lägg i de medföljande batterierna i luckan. Tänk på att sätta i dem åt rätt håll (den platta minuspolen måste läggas mot fjädern som står ut en bit i luckan) När batterierna har lagts i korrekt hörs en signalton som bekräftelse. Stäng batteriluckan.



Varning: Byt batterier när Heidi säger "batteri tomt"!

Strömförsörjning

Heidi kan drivas antingen med batterier eller ström. En tillhörande nätadapter är inte inkluderad utan måste beställas separat.

Använd uttaget längst bak. Sätt i kontakten i ett uttag i väggen (den smala delen kopplas ihop med Heidis uttag). Batterierna kan lämnas kvar i vågen.

4: Start och knappbeskrivning

Ställ Heidi på en plan och stabil yta. Använd skålar eller behållare i olika storlekar som passar till vägning.

4.1: Start och avstängning

Tryck på den runda knappen på vänster sida. Du kommer att höra: ”redo”. För att stänga av Heidi trycker du lite längre på samma knapp. En signal bekräftar avstängningen.

4.2: Vägning

Ställ det som ska vägas i mitten på plattan. När vikten inte längre ändras, syns den på displayen och talas även klart och tydligt om.

4.3: Tarafunktion

Även när något är placerat på plattan (t ex en skål), så kan nollställa vågen med På/Av-knappen efter att vikten av det som redan står på plattan har talats om. Du kommer att höra ”tara”. Vågen är nollställd och beredd för en ny vägning. Använd den här funktionen för att väga innehållet i en skål utan att behöva ta hänsyn till hur mycket skålen väger. Tarafunktion kan upprepas till dess att maxvikten på 5 kg är nådd.

4.4: Volyminställning

Använd plus- eller minusknappen för att ställa in volymen. Du hittar dem bredvid På/Av-knappen (på höger sida). Den vänstra knappen minskar och den högra knappen ökar volymen. Sammanlagt har Heidi 6 volymnivåer. Den valda nivån talas om.

4.5: Knapplås

Tryck samtidigt på de två volymknapparna för att aktivera knapplåset. Du kommer att höra ”knapplås på”. För att stänga av knapplåset trycker du samtidigt på volymknapparna igen till du hör ”knapplås av”.



Observera: Knapplåset kan även stängas av genom att dra ur sladden eller att ta ur batterierna.

4.6: Upprepning

Med ett tryck på knapp 1 (längst ner till höger) upprepas det senaste resultatet.

4.7: Referensmätning

Med den s.k. referensmätningen bestämmer du en målvikt innan mätningen. Därefter börjar du med vägningen. Heidi talar om hur mycket som saknas eller om vikten eventuellt överstigs.

4.7.1: Inställning av referensvikt ("önskad vikt")

Tryck länge på knapp 2 (mittenknappen på högra sidan). Du kommer att höra: "lägg på önskad vikt". Lagg nu på den önskade vikten på plattan (vågskålen). Vikten kommer att talas om. Tryck på knapp 2 igen för att spara referensvikten.

4.7.2: Mätning av referensvikt

Tryck snabbt på knapp 2 (mittenknappen till höger). Du kommer att höra: "Lägg på önskad vikt". När du börjar med vägningen kommer du att höra en tonfrekvens. Ju närmre du befinner dig din önskade vikt desto högre och snabbare blir tonfrekvensen. Om du överstiger den angivna vikten blir tonfrekvensen lägre igen. När du har nått referensvikten hör du en oavbruten signalton. Du kan avsluta referensmätningen genom att trycka på knapp 2 igen.



Observera: Tänk på mängden som ska fyllas (gäller först och främst för vätska) när den önskade vikten är nådd eller överskriden.

4.8: Tillägg av vikter

Knapp 3 (längst upp till höger) gör det möjligt att addera mätna värden. Lägg på det du vill väga på plattan och tryck på knapp 3 för att spara den vikten. Heidi talar om den adderade vikten plus den sparade sammanlagda vikten. Efter borttagning av sakerna från plattan, upprepas den senast sparade vikten.

Upprepa för att addera mer vikter efter varandra.

Med ett långt tryck på knapp 3 raderas den sparade vikten. Bekräftelsen talas om.

4.9: Enhetsinställning

Tryck på knapp 1 och 3 samtidigt för att välja mellan enheterna gram och hekto.

5: Säkerhetsanvisningar

- Utsätt inte vågen för hög fuktighet, väldigt höga eller låga temperaturer, damm och smuts. En korrekt och säker användning kan bara garanteras vid temperaturer mellan +5 and +35 °C. Om vätska kommer in i höljet, ta ur batterierna, torka torrt.
- Placera vågen i ett stadigt, plant läge. T ex en arbetsbänk i köket.
- Ta ur batterierna om du inte använder vågen under en längre tid, detta för att undvika läckage.
- Se till att batterierna sätts i åt rätt håll (polaritet).
- Den här köksvågen har en max vikt på 5 kg. Överstig aldrig den max tillåtna vikten.
- Lägg inga föremål på vågen när den inte används.
- Mätningar kan bli påverkade av elektromagnetiska fält (t ex användning av mobiltelefon i direkt närhet av vågen).

6: Rengöring och underhåll

Använd en lätt fuktad trasa för att rengöra vågen.



Varning: Vätska får inte komma in i vågen! Använd ej starka rengöringsmedel eller skursvampar med hård yta för att undvika att skrapa eller skada vågen på annat sätt.

7: Teknisk data

Storlek:	Längd: 220 mm Bredd: 145 mm Höjd: 25,5 - 26,8 mm
Vikt:	588 g 636 g (inkl. batterier)
Strömförsörjning:	4 st 1,5 V AAA-batterier eller Nätadapter (inte inkluderad)
Leveransomfang:	Köksvågen Heidi, 4 x 1,5 V AAA-batterier samt bruksanvisning. Nätadapter och hörlurar kan beställas separat

8: Garanti och service

Fr.o.m. inköpsdatum gäller följande garanti:

- ett år på vågen,
- ett år på tillbehör (nätadapter, hörlurar etc.),
- sex månader på medföljande delar (hölje, etc)
- på batterierna finns det ingen garanti

Vid eventuellt problem under garantitiden, kommer vågen antingen att repareras eller utbytas utan extra kostnad. Vid utsättning av vätkor, starka elektromagnetiska fält, öppning av höljet eller om vågen tappas i golvet förfaller garantin. Om du har problem med Heidi, vänligen kontakta CareTec eller din lokala återförsäljare innan du lämnar tillbaka vågen. Vi kommer då att informera dig om hur vi går till väga för att lösa problemet. Höljet får bara öppnas av auktoriserade tekniker!

CareTec förbehåller sig rätten att göra ändringar eller förbättringar till produkterna utan skicka ut information om detta.

9: Lagenlig information ang. avfallshantering

9.1: Kassering av elektroniska produkter

	Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall, utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.
---	---

9.2: Återvinning av batterier

	Batterier får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet, de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning och avfallshantering.
---	---

Pb-Cd-Hg De här tecknen kan finnas på batterier.
Pb = innehåller bly
Cd = innehåller kadmium
Hg = innehåller kvicksilver

10: Förekommande symboler

	Varning
	Observera
	Får inte slängas med vanligt hushållsavfall
	Tillverkare

11: Tillverkare



CareTec International GmbH, Stubenbastei 1, A 1010 Wien, Österrike

Telefonnummer (+43 1) 513 80 81 0

Fax (+43 1) 513 80 81 9

E-mail: office@caretec.at

Web: www.caretec.at