

Manual till vätskenivåindikator för glas eller kärl

Allmän beskrivning:

En pulserande ton och en vibration varnar när vätskan når de två längre elektroderna om att kärlet nästan är fyllt. Signalen och vibrationen intensifieras när den korta elektroden nås.

Användning:

1. Häng nivåindikatorn på kanten av kärlet som ska fyllas med vätska med de tre elektroderna på insidan.
2. Håll i vätska tills en pulserande ton hörs och nivåindikatorn börjar vibrera. Detta betyder att de första två elektroderna är nådd och att kärlet nästan är fyllt.
3. Om du fortsätter att hålla i vätska kommer den pulserande signalen och vibrationen att öka i hastighet när den andra elektroden nås.

Torka av elektroderna efter användning.

Nivåindikatorn drivs av 1 AAA-batteri som sitter i batterifacket på nivåindikatorns ovansida. Batteriet är installerat vid leverans, men måste aktiveras genom att öppna batteriluckan och dra bort skyddet som sitter mellan batteri och pol. När man drar bort skyddet kommer enheten sända ut 3 signaler som bekräftar att batteriet är okej och är redo att användas.