
Manual och skötselråd nordisk markeringskäpp



Käppen finns i två varianter, med handtagsknopp och med multigrepp i längder 70 – 135 cm.

Med handtagsknopp, art nr 50330-XXX, 100 cm blir då 50330-100

Med multigrepp, art nr 50335-XXX, 100 cm blir då 50335-100

Konstruktion

Käppen är tillverkad av armerad kolfiber. Den består av 4 – 6 (upp till 80 cm 4 delar, upp till 110 cm 5 delar, upp till 135 cm 6 delar) beroende på längd. Fäll ut käppen genom att ta bort handledsbandet som håller ihop käppen. Håll ut armen horisontellt, håll i handtaget och släpp sedan övriga delar av käppen. Dessa faller ut nedåt och gummibandet fasar effektivt ihop delarna till en stabil käpp.

Fäll ihop käppen

Håll i handtaget. Drag ut sektionen under handtaget och vik det mot handtaget och håll fast. Fortsätt med övriga sektioner till dess käppen är hopfälld. Använd handledsbandens yttre del till att låsa käppen.

Skötsel

Se till att hålla käppen så ren som möjligt. Rengöringen bör genomföras med käppen utfälld. Rengör uppifrån och ned med doppskon riktad nedåt. Den ska regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och eventuellt mildt rengöringsmedel (till exempel diskmedel).

Byte av doppsko

Fäll ut käppen och vänd dig med doppskon mot dig. Drag ut doppskon ur röret och sätt till exempel en penna mellan gummibanden så att inte banden försvinner in i röret när du hakar av doppskon. Haka av doppskon och ersätt med en ny. Tag ut pennan och låt doppskon dras in i röret av gummibandet. Eventuellt får du trycka in doppskon lite grann. Doppskon finns som reservdel.

Godkännanden

Käppen är CE-märkt som medicintekniskt hjälpmedel, 2017/745 MDR, Klass 1