

Lathund Milestone 112 Ace Color



Innehållsförteckning

<i>Knappbeskrivning</i>	3
Ovansidan	3
Övre kortsidan	3
Nederkant under högtalaren	3
<i>Allmänt</i>	3
Ladda batteriet	3
Knapplås på/av	3
Väcka/Slå på fickminnet	3
Ändra volymen	4
Informationslista	4
<i>Fickminne</i>	4
Direktinspelning	4
Spela in kortare minnesanteckning	4
Spela in kontinuerlig inspelning	5
Spela upp inspelning	5
Radera inspelning	5
<i>Milestone och datorn</i>	5
<i>Uppdateringar</i>	6
<i>Skötsel</i>	6

Knappbeskrivning


Ovansidan

- Lampa: sitter längst upp till vänster.
- Översta knappen kallas **Spela in** (röd).
- Vänstra knappen kallas **Bakåt** (orange).
- Mittenknappen kallas **Spela upp** (grön).
- Högra knappen kallas **Framåt** (gul).
- Nedre knappen kallas **Funk** – funktion (blå/grå).




Övre kortsidan

- Till vänster har du **Välj**.
- I mitten har du **Mini-USB-uttag**, anslutning för laddare och datorkabel.

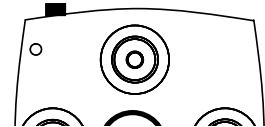

Nederkant under högtalaren

Till höger har du anslutning för hörlurar.

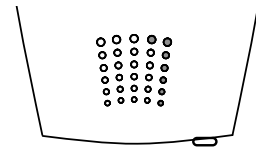

Allmänt

Lagringsutrymmet är ca 11GB (ca 420 tim tal).

Viloläge efter 10 minuters inaktivitet.


Max 20 timmars användning vid fulladdat batteri.

Ladda batteriet

Innan användning ska du ladda batteriet ca 3 timmar. Gör det med batteriladdare i vägguttaget eller USB-kabel till dator.


Knapplös på/av

Tryck och håll inne **Funk** (blå/grå) och tryck därefter på **Spela in** (röd). Släpp knapparna, först **Spela in** och därefter **Funk**, och du hör "Knapplös på" eller "Knapplös av".

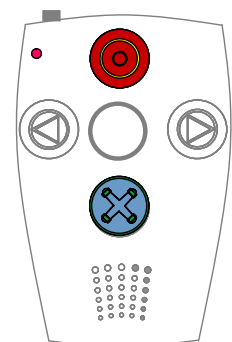

Väcka/Slå på fickminnet

Tryck på **Spela upp** (grön) minst en halv sekund. Du hör en ljudsignal.

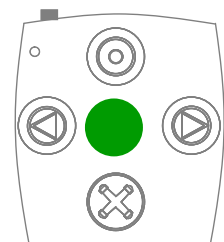


Ändra volymen

Håll ner **Funk** (grå/blå) och tryck **Bakåt** (orange) för att minska volymen.

Håll ner **Funk** (grå/blå) och tryck **Framåt** (gul) för att öka volymen.

Ett pip hörs när du når mini- och maxnivå.

Om ingen hörlur är ansluten ändras volymen på den inbyggda högtalaren. Är hörlur ansluten ändras volymen som hörs via dessa.

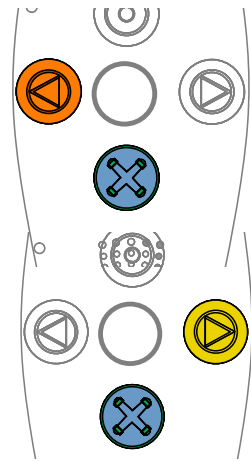


Informationslista

Håll ner **Funk** (grå/blå) 1,5 sekunder så får du information om vart du befinner dig, ledigt utrymme, batteristatus, serienummer samt mjukvarans version.

Batteristatus meddelas på följande sätt:

Batteriet är fulladdat, laddat, ladda batteriet, ladda genast batteriet.

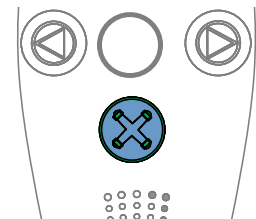

Fickminne


Inspelning av röstanteckning sker via den inbyggda mikrofonen. Total inspelningstid är ca 420 timmar. Antalet meddelanden är nästan obegränsat. Mikrofon med förförstärkare kan anslutas via linjeingång.

Direktinspelning

1. Du kan göra en röstanteckning direkt oavsett om fickminnet är vaken eller i viloläge. Tryck bara in **Spela in** (röd) och håll intryckt. När du hör ett kort klickljud, spela in ditt meddelande och släpp knappen när du är klar.

Spela in kortare minnesanteckning


2. Tryck och håll in **Spela in** (röd) tills du hör ett kort klickljud. Lampan överst till vänster på ovansidan av fickminnet börjar då blinka.
3. Avsluta inspelning genom att släppa **Spela in**. Man kan infoga ett meddelande mellan två gamla.

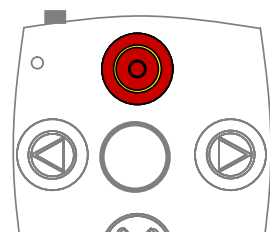

Obs! Om du trycker på **Spela in** kortare än en halv sekund blir inget inspelat. Det för att hindra oavsiktliga inspelningar. Vänta därför några ögonblick innan du börjar prata.



Spela in kontinuerlig inspelning

1. Håll ner **Spela in** (röd).
2. Tryck in **Spela upp** (grön).
3. Du hör en signal, lampan blinkar och du spelar in.
4. Du kan göra paus i inspelningen genom att trycka **Spela upp** (grön).
5. Lampan blinkar snabbare och du hör en dov signal.
6. Starta inspelningen igen med **Spela upp** (grön), den dova signalen hörs.
7. Avsluta genom att trycka **Spela in** (röd) igen. Ett pip ljud hörs.

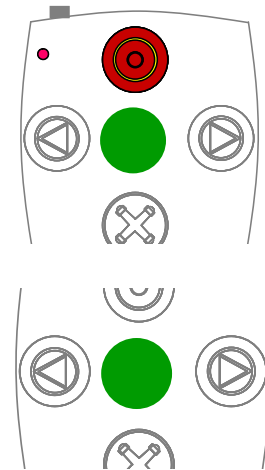


Spela upp inspelning

1. Tryck **Spela upp** (grön).
2. Har du fler inspelningar i mappen bläddrar du till filerna med **Framåt** (gul) eller **Bakåt** (orange).
3. För att snabbspola i ett långt meddelande, håll nere **Framåt** (gul) eller **Bakåt** (orange). Efter en sekund ökar hastigheten. När du släpper återgår den till normal hastighet.

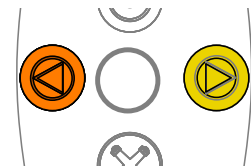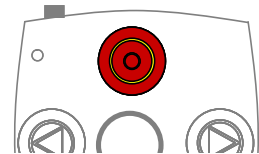

Radera inspelning

1. Tryck **Spela upp** (grön).
2. När du hör den inspelning som du vill radera.
3. Tryck **Funk** (grå/blå) och **Spela upp** (grön). Ett ljud hörs när du släpper knapparna.

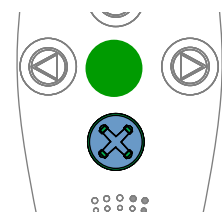

Milestone och datorn

Du kan säkerhetskopiera dina röstanteckningar från det interna minnet till datorn genom att använda medföljande USB-kabel.

1. Sätt in kabel i uttaget överst på Milestone och anslut till datorn via USB-uttag.
2. Ett fönster kommer upp på skärmen.



3. Klicka **Ok** för att **Öppna mappen för att visa filerna i Utforskaren**.
4. Du ser Milestones interna minne som **M112**. Här kan du välja de filer du vill kopiera till din dator. Du kan även lyssna på dina röstanteckningar via datorn med t ex Windows Media Player.



Uppdateringar

Produkten har en mjukvara som styr funktionerna. Mjukvaran är under ständig utveckling för att göra ditt fickminne successivt bättre. Gå in på www.irishjalpmedel.se/Milestone/Content och följ instruktionerna. Ta för vana att titta med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du har den senaste versionen. Uppdateringar är kostnadsfria.

Skötsel

Rengöring bör ske regelbundet med en mjuk och lätt fuktad trasa med neutralt rengöringsmedel. Rengöringsalternativ är också Etylalkohol 10 % till max 20 % utblandat med vatten eller etanolbaserade lösningsmedel med max tensid 50 % eller motsvarande.

Använd **INTE** bensin, Aceton eller liknande. Dessa är för aggressiva och kan skada plasten och tryckta symboler.

Om enheten inte används under en längre tid behöver batteriet stödladdas och det ungefär var tredje månad.

Vi önskar er lycka till med er Milestone!
Iris Hjälpmedel

Iris Hjälpmedel AB
S-122 33 Enskede, Besök: Sandborgsvägen 52
Telefon: 08-39 94 00
www.irishjalpmedel.se