


Bruksanvisning iLoop+

Halsslingor med förstärkare och inbyggd mikrofon



Översikt

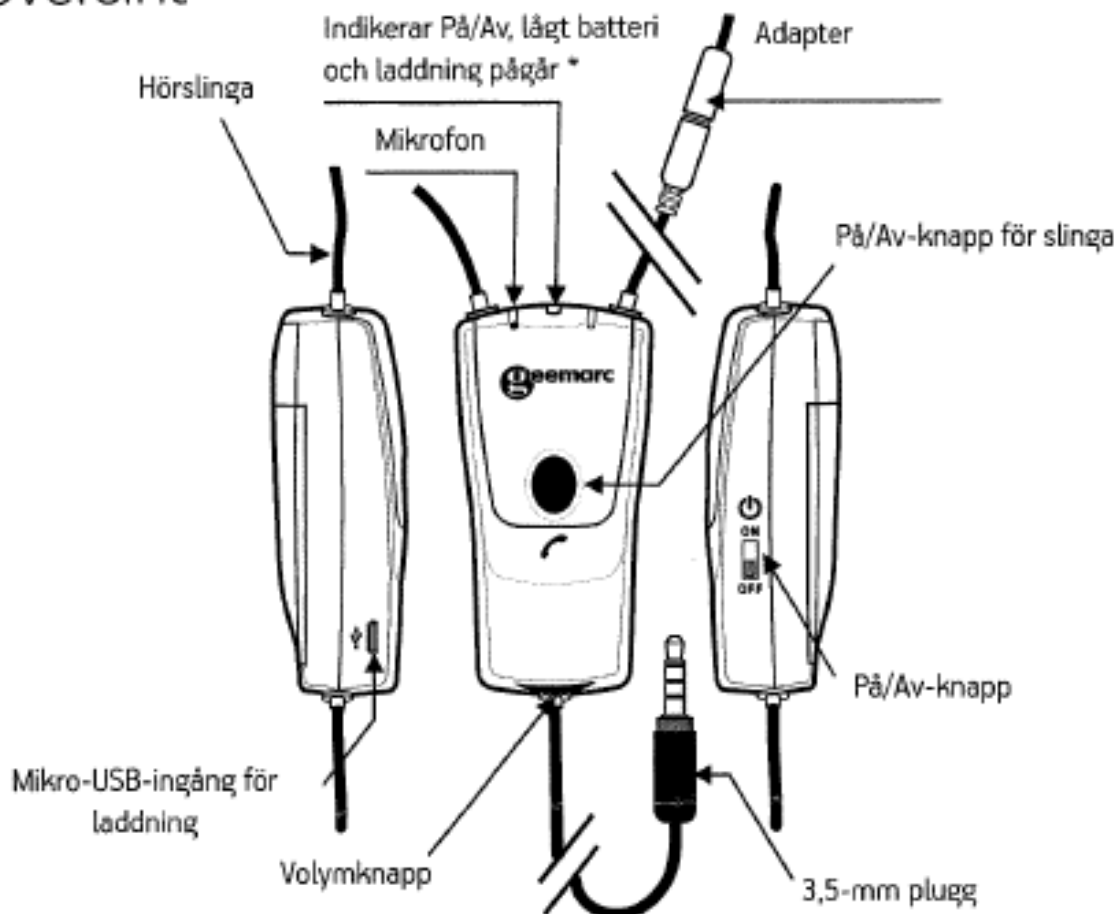

*)

iLoop+ är avstängd: lampan lyser ej
iLoop+ är på/aktiv: lampan lyser med grönt sken
Låg batterinivå: lampan lyser med rött sken
Laddning pågår: lampan lyser med blått sken

OBS! Använd den bifogade 3.5mm-adaptorn om du eller den du pratar med upplever störningar eller eko under samtalet.



Tryck knappen åt vänster för att öppna batterilocket

Inledning

iLoop+ är en halsslinga för hörapparatbärare med inbyggd mikrofon och förstärkare för användning med telefon med 3,5mm-headsetuttag. Den kan också anslutas till MP3-spelare, CD-spelare, dator eller annan ljudkälla. Halsslingan används med hörapparaten inkopplad i T eller MT-läge och kan därför användas ihop med de flesta hörapparater.

Inför användning

Enheten drivs av 2 st AAA 1,2V laddningsbara Ni-MH batterier. Batterierna måste laddas i ca 7 timmar innan du använder halsslingan första gången.

Stäng av enheten med knappen på sidan. Öppna batteriluckan på halsslingans baksida. Sätt i medföljande batterier i batterifacket. Var noggrann med att placera batterierna åt rätt håll enligt illustration i batterifacket.

Anslut medföljande USB-kabel till en dator/USB-laddare för att ladda batterierna. Kontrollera att lampan tänds med ett blått sken. Detta visar att laddning pågår.

Ta ur USB-kabeln när halsslingan är fulladdad (den blå lampan har slocknat).

Anslut halsslingan till headsetuttaget på din telefon, MP3-spelare eller annan ljudutrustning. Sätt på enheten med knappen på sidan. Om du kan besvara inkommande samtal innebär det att uttaget på din mobiltelefon är konfigurerad att arbeta i synk med Geemarc iLoop+. Om det inte fungerar eller om du hör ett eko anslut adaptersladden, som finns bifogad i produktasken, till headsetuttaget.

Om lampan lyser rött när halsslingan aktiveras, behöver batterierna laddas.

OBS! Stäng av halsslingan före byte av batterier.

Ringa / ta emot samtal

Koppla hörapparaten i T- eller MT-läge. Aktivera halsslingan genom att trycka på den grå ovala På/Av-knappen, som sitter på halsslingans framsida. Den gröna lampan i halsslingans övre kant tänds. När slingan är ansluten till en telefon och aktiverad kan du använda På/Av knappen för att besvara/avsluta samtal.

Justera volymen med den svarta rullknappen som sitter nertill på halsslingans dosa.

OBS! Halsslingan går ner i väntläge efter ett par minuters tystnad. Den aktiveras automatiskt igen om det kommer ett samtal eller om någon börjar prata igen efter ett långt uppehåll.

Skötsel, underhåll och garanti

iLoop+ kräver normalt sett inget underhåll. Om den skulle bli smutsig, torka den då med en lätt fuktad trasa (ej våt!). Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden. Placera inte produkten där den utsätts för regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme.

Använd endast de laddningsbara batterier som leverantören rekommenderar.

Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet eller felaktig inkoppling/montering.



Artikelnummer 57051

