
Manual

Timglaset Carina



Timglaset Carina är ett hjälpmedel som åskådliggör begreppet tid på olika sätt, dels visuellt genom nedräkning av en stapel med lysdioder, dels med hjälp av talstöd. När tiden är slut får man två behagliga harpsignaler samt timglaset blinkar 4 gånger med hela ljusdiodstapeln. Carina kan visa tre olika längder; 60, 40 eller 20 minuter.

Timglaset har sex olika talstöd som kan väljas, och talas ut med manligt eller kvinnligt tal. Volymen kan ställas i tio olika steg, nivå 0 är ljudlös men ger ett vibrationslarm. Det finns även ett knapplås.

Timglaset Carina är enkel att anpassa och inställningar sker genom en dold knapphantering vilket minimerar risken för att komma åt inställningarna av misstag.

Alla inställningar av Timglaset lagras i ett minne. Detta medför att inställningarna behålls även om det inbyggda batteriet blir urladdat. Timglaset talar själv om när den behöver laddas. Produkten har ett urladdningsskydd som säkerställer att batteriet skyddas.

Denna Carina har en USB-anslutning för laddning av batteriet.

Komma igång med Timglaset Carina

OBS! Vid leverans är Timglaset låst av knapplås till. Innan Timglaset tas i bruk första gången skall den laddas, v g se kapitel Ladda Timglaset Carina.


1. Ladda Timglaset Carina

Timglaset måste underhållsladdas minst 1 gång per månad (V.g. se kapitel 8, Laddning) Låt Carina ladda i ca 4 timmar efter att du packat upp den. Ladda Carina genom att koppla in den medföljande laddaren till uttaget i botten på Timglaset samt i ett vägguttag.

2. Låsa upp knapplås

Vid leverans är Timglaset låst med KNAPPLÅS.


För att låsa upp, håll inne den GRÖN och GUL knapp i 3 sekunder. Lysdiodsstapeln säger "till". Timglaset är nu redo att användas.

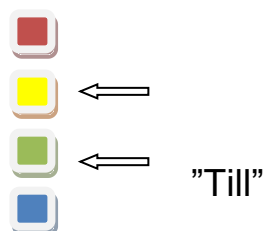


3. Inställningar:

a Ställa in tidsintervall


På Timglasets övre hörn finns en horisontell rad med tre stycken lysdioder där varje diod representerar förvalt tidsintervall 20, 40 respektive 60 minuter.

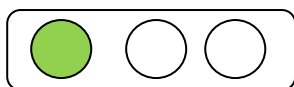

20 minuter

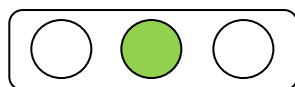


40 minuter

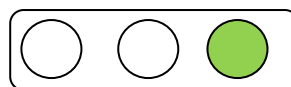


60 minuter

Ändra tidsintervall:


a. Håll inne den BLÅ knappen, tryck ner den RÖDA knappen. Timglaset svarar efter 3 sekunder "Avbryter"

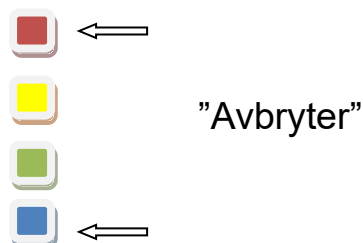

b. Fortsätt håll RÖD knapp intryckt. Timglaset säger: "Välj tid 20 " (grundvärde) fortsätt håll RÖD knapp intryckt och stega med GUL knapp till önskad tidsintervall.

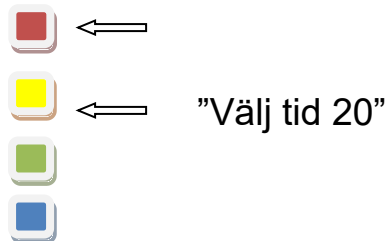

c. Timglaset svarar med de olika tidsintervallerna vilket också syns på de gröna lysdioderna på Carinas front

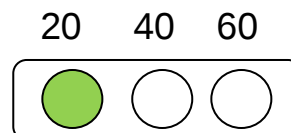


När du valt tidsintervall, släpp knapparna. Timglaset bekräftar med två knackande ljud.


b. Ställa Volym/Välja Talstöd/Manligt eller kvinnligt tal

Ställa volym:

a. Tryck ner BLÅ och RÖD knapp Håll kvar i 3 sek. Timglaset säger "Avbryter". Släpp RÖD knapp men fortsätt håll BLÅ knapp intryckt

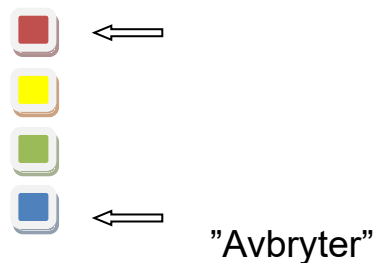

b. Timglaset säger "Ställ Volym 3" (grundvärde).

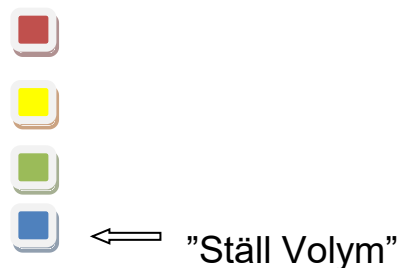


c. Volymen ändras genom att trycka på den GRÖNA eller den GULA knappen.

Volymen kan ställas i 10 steg. Steg 0 är ljudlös och larm fås via vibration



Ställa Talstöd

d. Släpp den BLÅ knappen tillfälligt. Tryck in den igen. Timglaset säger "Välj talstöd, 3"(grundvärde)

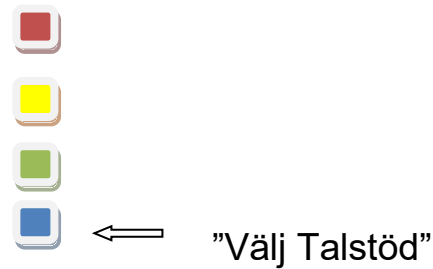

e. Välj talstöd med GUL och GRÖN knapp. 6 st olika nivåer av talstöd kan väljas. Se Tabell 2



f. Släpp den BLÅ knappen och ställfunktionen är avslutad. Timglaset bekräftar valet med två knackande ljud.

4. Använda Timglaset Carina:

Timglaset Carina kan visa tre olika tidsmängder; 20, 40 eller 60 minuter. Timglaset startas genom att önskad färgad knapp trycks in med ett finger och respektive mängd lysdioder tänds i stapeln (vg se Tabell1). Under nedräkningen slocknar en lysdiod i taget på stapeln. När tiden är slut får man två behagliga harpsignaler samt Timglaset blinkar fyra gånger med hela ljusdiodstapeln.


Tabell 1:

	20 min	40 min	60 min
Blå 	5	10	15
Grön 	10	20	30
Gul 	15	30	45
Röd 	20	40	60

5. Avbryta tidsnedräkning:

Startat tidsförlopp avbryts genom att hålla RÖD och BLÅ knapp intryckta samtidigt under ca 3 sekunder.

Timglaset säger: "Avbryter"

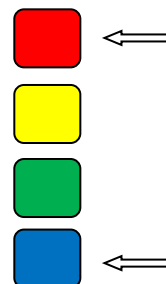

6. Talstöd

Beroende på hur mycket talad information man vill ha som Talstöd, väljer man utifrån sex nivåer (v.g. se tabell 2).

Tabell 2:

Steg	Talstöd 0	Talstöd 1	Talstöd 2	Talstöd 3	Talstöd 4	Talstöd 5
20		Röd 20 minuter	20 minuter	Röd 20 minuter Hela tiden kvar	Röd 20 minuter Hela tiden kvar	Röd 20 minuter Hela tiden kvar
19						Mjuk celloton
18						Mjuk celloton
17						Mjuk celloton
16						Mjuk celloton
15			15 minuter	Mycket tid kvar	15 minuter Mycket tid kvar	15 minuter Mycket tid kvar
14						Mjuk celloton
13						Mjuk celloton
12						Mjuk celloton
11						Mjuk celloton
10			10 minuter	Halva tiden kvar	10 minuter Halva tiden kvar	10 minuter Halva tiden kvar
9						Mjuk celloton
8						Mjuk celloton
7						Mjuk celloton
6						Mjuk celloton
5			5 minuter	Lite tid kvar	5 minuter Lite tid kvar	5 minuter Lite tid kvar
4						Mjuk celloton
3						Mjuk celloton
2						Mjuk celloton
1						Mjuk celloton
slut	2 stycken Harpsignaler 4 stycken blinkningar	2 stycken Harpsignaler 4 stycken blinkningar	2 stycken Harpsignaler 4 stycken blinkningar Ingen tid kvar	2 stycken Harpsignaler 4 stycken blinkningar Ingen tid kvar	2 stycken Harpsignaler 4 stycken blinkningar Ingen tid kvar	2 stycken Harpsignaler 4 stycken blinkningar Ingen tid kvar

7. Låsa med knapplås:

Tryck ner den BLÅ samt RÖD knapp och håll nedtryckt, först startar tidsräkningen. Efter ca 3 sekunder släcks lysdiodsstapeln.



Håll kvar både RÖD och BLÅ knapp intryckt och tryck även ner GUL samt GRÖN knapp, dvs alla fyra knapparna samtidigt.



Carina blinkar med hela lysdiodsstapeln 2 ggr och säger "från". Timglaset är nu låst. När knapplås är påslaget kan inte Timglaset användas. Timglaset är låst och kan endast låsas upp enligt kap 2 Låsa upp knapplås

8. Laddning:

Timglaset drivs av ett inbyggt laddningsbart batteri. Timglaset säger till när den behöver laddas. Timglaset säger "behöver laddas" varje gång som en diod släcks i förloppet. Vid inställt volymläge tyst ersätts talet med en vibration från den inbyggda vibratören. Timglaset avbryter ej ett igångsatt förlopp men påpekar att laddning måste göras.

Laddning sker med den medföljande laddaren. Koppla in laddaren till uttaget i botten på Timglaset samt i ett vägguttag 230 V.

Laddningen sker helt automatiskt och Timglaset är fulladdat efter ca 4 timmar.

Under laddningen blinkar den översta lysdioden.

Om Timglaset är helt urladdat dröjer det en stund innan lysdiod 20 börjar blinka.

Laddningsrutiner Carina

Normal underhållsladdning ska helst ske 1 gång per månad:

När Timglaset laddas blinkar översta lysdioden.

(Batterierna är av samma sort som används i mobiltelefoner och har urladdningsskydd. För bästa funktion rekommenderas underhållsladdning).

Laddning när batteriet är helt urladdat (ej dött):

Om översta lysdioden inte blinkar kan Timglaset behöva laddas över natten.

Lysdioden börjar blinka när batteriet har tillräckligt med kraft att tända den.

Om laddning enligt ovanstående två rubriker inte fungerar, vad gör jag då?

Batteriet är tyvärr inte längre brukbart. För att skicka in ditt Timglas för batteribyte: Gå till Iris Hjälpmedels hemsida: www.irishjalpmedel.se, klicka på fliken Support & Service. Under rubriken Service eller Reparation finns en länk till vår följesedel som du fyller i och lägger med i försändelsen till oss.

9. Manuell återställning:

Vid driftstörning eller låsning kan Timglaset återställas genom att efter inställning av tidslängd åter trycka in den röda knappen och hålla kvar trots att dubbelknäppet hörs. Efter ca 6 sekunder säger timglaset "noll" och grundvärdena är återställda.

10. Underhåll, service och miljöaspekt:

Timglaset behöver inget underhåll förutom laddning av batteriet.

Tillverkad av återvinningsbar icke allergiframkallande ABS-plast.

Rengöring sker med lätt fuktad trasa och vanliga milda rengörings- eller desinfektionsmedel, helst miljömärkta.

Vid kassation lämnas produkten till återvinning av elektronik. Det uppladdningsbara batteriet kan med fördel avlägsnas och lämnas i speciellt kärl hos en återvinningscentral. Produkten kan också lämnas till försäljningsstället eller återsändas till Iris Hjälpmedel.

Vid behov av service kontakta Iris Hjälpmedel AB (gäller särskilt under garantitiden).

Produkten är fukt skyddad klass IP53 samt godkänd som medicinsktekniskt hjälpmedel, CE-märkt enligt MDR.

Försäljning/support/service: Iris Hjälpmedel AB, Sandsborgsv 52, 122 33 Enskede, vxl 08-39 94 00, www.irishjalpmedel.se