


## Lathund och översikt för i-Speak 2, art nr 54063

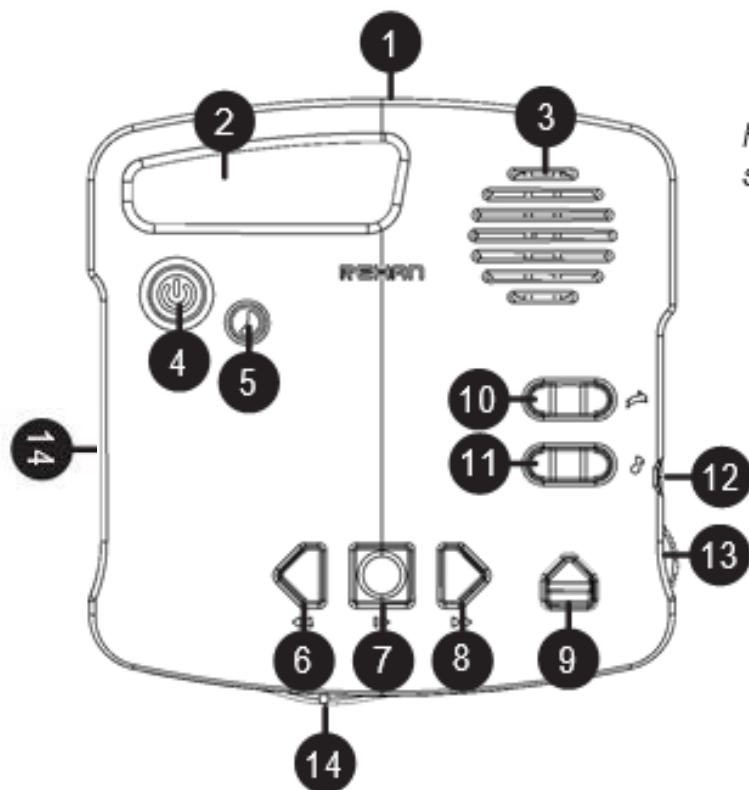

Figur 1: Övansidan av spelaren i-Speak

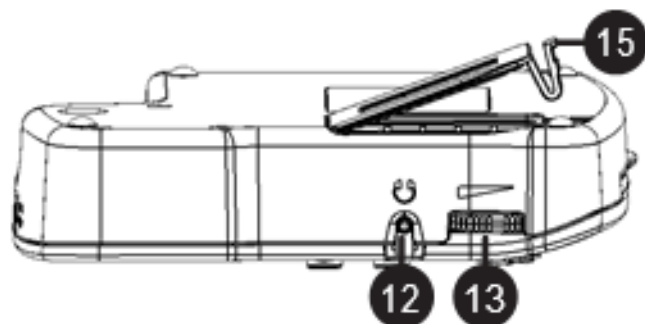


Figure 2: höger långsida av i-Speak

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 1 Nätanslutning | 9 Utkast                 |
| 2 Handtag       | 10 Fart                  |
| 3 Högtalare     | 11 Ton                   |
| 4 Av/på         | 12 Anslutning hörlurar   |
| 5 Timer         | 13 Volym                 |
| 6 Tillbaka      | 14 CD, SD-kort eller USB |
| 7 Play-paus     | 15 Batterilock           |
| 8 <u>Framåt</u> |                          |

## Snabbstart för marknadens enklaste Daisyspelare

- Ta ut batteriet med kontaktskyddet första användandet, sätt åter batteriet och batteriluckan. Anslut nätkabel i nätadaptorn. Anslut kabel till i-Speak respektive elnätet/vägguttaget. Ladda batteriet fullt innan användning. På/av-knappen lyser blå när i-Speak laddar och grön när allt är OK. För att kontrollera batteristatus tryck ned på/av-knappen utan media i spelaren.
- När i-Speak startas för första gången är grund/fabriksinställningen språk engelska, navigering med tidshopp och automatiskt läsminne (auto-start), dvs startar därifrån du stannade läsningen senast. Håller du ned knappen framåt börjar spelaren med att hoppa 10 sekunder för att sedan öka längden av hopp.
- För att ändra språk (du har 37 olika språk och dialekter att välja mellan) gör så här; slå på spelaren utan media och vänta tills den startat. Håll ned timerknappen tills spelaren indikerar första läget, *språk*. Stega framåt eller bakåt tills rätt språk/röst erhållits. Välj med Play/Paus-knappen. Tryck timerknapp för att lämna menyn.
- Starta spelaren med av/på-knappen (4). Knapp lyser grön om tillräckligt uppladdad, en startton hörs och i-Speak säger "Välkommen". Om ett media sitter i och använts fortsätter i-Speak där lyssnandet avbröts (auto-start). För att stänga spelaren av tryck på av/på-knappen (4) igen. En indikering hörs att spelaren stängs av och lampan slocknar.
- I denna meny kan du också välja att byta tidshopp mot artikel/rubrik eller sida som standardläge.
- Timerfunktion – 15, 30, 45 eller 60 minuter insomningsautomatik, tryck en femte gång och gå ur timerläget.

För mer information kring användandet, underhåll och tekniska specifikationer hänvisar vi till den fullständiga manualen. Snabbguiden har upprättats med godkännande av Rehan Electronics Ltd

Reservdelar;

54060-01 Batteri, 54060-02 Nätadapter