

Manual termometer My Degrees



Svensktalande termometer för inom- och utomhustemperatur samt matlagning med display med tydliga siffror på grön bakgrund, stora taktila knappar och taktil märkning. Utomhusgivaren är trådlös.

Produkten är CE-märkt medicinsktekniskt hjälpmedel, 2017/745 MDR, klass 1

Art nr 55113

Förpackningens innehåll;

Termometerenhet (klaras -29 - +240 grader Celsius)

Utomhusenhet

Självhäftande kardborrefästen för väggmontering

Batterier för inom- och utomhusenheten, 3 + 3 AAA-batterier

Givare för matlagning (s.k. kött/mattermometer).

Termometern fysiska egenskaper;

Framsida. Högst upp finns en display med stora tydliga svarta siffror på grön bakgrund. När termometern rapporterar är displayen upplyst. I annat fall släckt. Nedanför displayfönstret finns två stora knappar vertikalt. Den övre är röd med taktillmärkning till höger om knappen. Den är bland annat till för att avläsa yttertemperatur. Knappen nedanför är vit med taktillmärkning till höger om knappen. Den är bland annat till för att avläsa innetemperatur.

MyDegrees rapporterar temperatur på svenska men kan också ställas om till de flesta stora nordiska och europeiska språk. Termometerns mäter från -29 till +240 grader Celsius. Det senare viktigt då man nyttjar givaren för matlagning.



Höger långsida. Här sitter en ratt för volym.



Vänster långsida. Här finns två uttag varav det övre är till för att ansluta medföljande tillbehöret mättermometer. Det nedre används inte.



Baksida. Överst finns ett hål för att kunna hänga enheten på en skruv eller tavelspik. Överst till vänster finns två knappar, en mindre och en större. Den mindre är till för att ställa språk och den större för att para utomhusenheten då den är trådlös. I mitten finns en kardborrehona för eventuell montering på vägg eller list med kardborre. Självhäftande kardborrehane finns i förpackningen. Sex små magneter gör den lämplig att hänga på till exempel en kylskåpsdörr. Längst ned finner du batteriluckan med plats för tre AAA-batterier.



Utomhusgivare

På baksidan sitter batteriluckan med plats för tre AAA-batterier. Här finns en kardborrehona redan monterad på givaren. Det finns ett hål för upphängning av givaren på en förmonterad skruv. Det finns också en kardborrehane med i kartongen. Den kan du klistra fast utanför, till exempel på nedre kanten av ett fönster och på så sätt hänga upp givaren. Rengör ytan noga och dra av skyddsfilmen innan du klistrar fast kardborrehanen. Placera den i skugga för att erhålla rätt utomhustemperatur. Utomhusgivaren är testad och godkänd gentemot gällande

IPX2 krav, vilket innebär att den tål kraftigt regn.

Utomhusgivaren kan sitta mellan 20 – 25 meter från inomhusdelen beroende på hur fritt läge som erbjuds, dvs hindrande väggar och dörrar.



Gör så här;

- Sätt batterierna i termometern. Fjädern ska sitta mot batteriets minuspol.
- Tryck och håll inne den röda (översta) knappen på framsidan. Använd en penna eller spetsigt föremål för att trycka på språkknappen EN gång. Släpp den röda knappen och stega sedan fram till rätt språk med den röda eller vita knappen. Spara genom att trycka ned den stora vita knappen på framsidan en gång, eller lägg termometern åt sidan en halv minut så låser sig valt språk.
- Sätt i batterierna i den trådlösa givaren. Lägg termometer och givaren nära varandra. Tryck in den större vita knappen på termometers baksida till dess du hör en signal. Släpp då knappen. En blinkande symbol i displayen visar att parning pågår. Det kan ta 3–5 minuter innan enheterna parats. Du kan prova genom att trycka på den översta röda knappen. Om enheten är parat läser den upp temperatur. Om inte så hör du en signal. Gör då om parningen.

Montering av enheterna

- Fäst huvudenheten på till exempel en vägg eller kylskåpsdörr. Använd kardborrefäste, tavelspik eller magnetfäste. Den kan också ligga ned på ett bord. Undvik

att sätta/lägga den i närheten av ett element, i solljus eller någon annan värmekälla. Då kan den ange felaktig innetemperatur. Tänk på att även din hands egen värme påverkar inomhustemperatur-angivelsen. Inom- och utomhusdelen behöver ca 30 minuter utan beröring för att ge korrekta temperaturangivelser.

- Fäst utomhusenheten på ytterväggen eller under ett fönster för att minimera strålvärme från fönster. Undvik direkt solljus eller i närhet av värmekälla.

Mat/Stektermometer

My Degrees fungerar också som mattermometer. Med den externa givaren kan du använda den i ugn eller i vätskor, varma eller kalla. Du kan även mäta andra typer av temperaturer med givaren. Känslkroppen är spetsig. Vid leverans har den ett skydd i gummi. Kabeln är 1 meter lång och har värmefålig flätad metall.



Gör så här;

- Anslut kontakten till huvudenheten i det övre hålet på vänster sida.
- Den spetsiga delen, sensorn, ska till exempel sitta i mitten på en stek. Lyft in steken i ugnen och låt kabeln komma ut via luckan.
- För att ställa "matlagningsalarm" håller du inne den översta röda knappen på framsidan i ca 4 sekunder. Termometern säger "ställ in temperatur". Stega uppåt med den övre röda knappen eller nedåt med den undre vita

knappen. Genom att hålla någon av dessa nedtryckt så snabbändrar du.

- När den valda temperaturen är uppnådd väntar du ca 5 sekunder att termometern visar/talar om vald temperatur. Efter ytterligare 5 sekunder startar mätning efter en signal.
- My Degrees rapporterar automatiskt 5 grader innan programmerad temperatur är nådd samt varje grad därefter. När inställd temperatur uppnåtts så anger termometern att matlagningen är färdig.

Tips och ytterligare information

- Placera helst utomhusenheten i skugga och/eller där det inte blåser. Både sol och bläst påverkar mätresultatet.
- Inomhusenheten drar generellt mer batteri än utomhusenheten. Det beror på att inomhusenheten är påslagen hela tiden för mätning medan utomhusenheten mäter och skickar data med minuters intervall.
- Önskas längre driftstid kan Litiumbatterier med fördel användas.
- Det är viktigt att förbrukade batterier lämnas till återvinning.
- Utrangerade enheter ska också lämna till återvinning eller återsändas till syncentralen eller Iris Hjälpmedel.

Dokumentversion V5 - 2024-10-01

Denna manual är upprättad överenskommelse med tillverkaren och i enlighet med det regelverk inom CE-märkningen som avser manualer