

Talande väckaruret StigUpp3 (3.1)

Bruksanvisning till art nr 51130/51150



Funktionsknappar

1. På väckarurets översida sitter en avlång svart tangent. Den har tre funktioner, AV/PÅ, ställ tid och Snooze, dvs repetitionsväckning.

Längst ned på urets framsida sitter fyra knappar i rad varav den längs till höger är något infälld.

2. Knappen längs till vänster, märkt A, har fler funktioner, Alarm av, Ställ alarm timmar, ställ alarm minuter samt kontroll av inställd larmtid.
3. Den andra knappen i raden från vänster, märkt B, har fler funktioner, Alarm på (även av) och bläddra tid uppåt.
4. Den tredje knappen från vänster, märkt C, har fler funktioner, välja ringsignal (3 olika) samt bläddra tid nedåt.

5. Den fjärde knappen längs till höger, något infälld, är reset, nollställning. När den trycks in nollställs alla inställningar och dessa måste göras på nytt. Den fungerar även för omkopplare till vibrator Skakis (51109) som finns som tillbehör eller komplett kit väckarur/vibrator (51150).

Starta uret

Sätt i batterierna. uret startar automatiskt och visar 12.00. Om uret inte startar så håll ner den avlånga svarta knappen på ovansidan i ca 3 sek. OBS. När du tar ut batterier för att byta nollställs minnet och ny inställning behövs.

Stänga av och sätta på väckaruret

Stänga av, håll in den svarta avlånga knappen på klockans ovansida i ca 5 sek efter det att uret sagt "Ställ timme". Därefter stängs uret av och siffrorna i displayen försvinner. Först sen slocknar de digitala siffrorna i displayen. För att starta gör tvärt om. Håll ned den svarta avlånga knappen i ca 4 sekunder. Uret läser upp den inställda tiden.

Volym

På urets baksida på höger sida finns en ställknapp. Det finns två olika lägen, låg (nedåt) och hög (uppåt).

Uppläsning av tid

Tryck kort på den avlånga svarta knappen på klockans ovansida. StigUpp3 anger tiden digitalt eller analogt, t.ex. "Fjorton och tjugofem" eller "Fem minuter i halv tre på eftermiddagen". Vid analogt tidsangivelse tillkommer dygnsbestämning; morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll och natt. Vi följer SMHIs rekommendationer, se nedan;

Morgon	06:00 – 09:00
Förmiddag	09:00 – 12:00
Eftermiddag	12:00 – 18:00
Kväll	18:00 – 23:00
Natt	23:00 – 06:00

Inställning tid för digital eller analog tidsangivelse

- Tryck ned den avlånga knappen (1) på ovansidan i ca 3 sekunder. Uret säger "Ställ timme". Du bläddrar tiden uppåt med knapp 2 till vänster (3 alt B) och nedåt med knapp tre från vänster (4 alt C).
- OBS! För att ställa in tiden för analog tidsangivelse alternativt digital tidsangivelse bläddrar du till dess du passerar 00.00, då växlar uret uppläsning.
- Tryck snabbt ned den avlånga knappen (1) igen på ovansidan. Uret säger "Ställ minuter".
- För att låsa inställd tid tryck ned den avlånga knappen eller vänta i några sekunder så indikerar uret med en tydlig signal.

Inställning av larm

- Tryck in den första knappen nederst till vänster (2 alt A) tills uret säger "Ställ alarm timme". Du bläddrar tiden uppåt med knapp 2 till vänster (3 alt B) och nedåt med knapp tre från vänster (4 alt C).
- När timme är inställd så trycker du kort på första knappen nederst till vänster (2 alt A) tills uret säger "Ställ alarm minuter" och upprepar samma procedur som med inställning av timme.
- För att låsa inställd tid tryck snabbt ned första knappen nederst till vänster (2 alt A) eller vänta i några sekunder så indikerar uret med en tydlig signal att ställd tid är sparad.

Välja ringsignal (alt vibrator)

- Du har tre val, de två första är olika ringsignaler och det tredje en vibrator. Tryck in den tredje knappen nederst till vänster (3 alt C) och bläddra. Har du vibrator Skakis (51109) ska uret först kalibreras genom att ansluta vibratoren och trycka reset/nollställ. Ställ tiden igen och välj väckning via vibrator genom proceduren nämn ovan. Tar du bort vibratoren ska uret kalibreras igen.

Aktivering av alarm

- Tryck på den andra knappen nederst till vänster (3 alt B). Uret säger "Alarm på" och en klocksymbol visas i displayen.

Stäng av alarm eller snooza

- Larmet ljuder i 1 minut. Du kan välja vilken ringsignal du vill ha alternativt vibrator (läs längre ned)
- För att snooza, repetitionsväckning (10 minuter), tryck på den svarta avlånga knappen på väckarurets ovansida.
- För att stänga av larmet, tryck på andra knappen från vänster knappen (3 alt B). Uret säger "Alarm av."
- Väckaruret upprepar samma alarmtid nästa dag om alarmet aktiverats ("Alarm på").

Underhåll

StigUpp drivs av 2 st R6 batterier (AA) och vibratoren Skakis drivs av 2 st batterier (AAA). Det går även att använda laddningsbara batterier. Förbrukade batterier lämnas på kommunens återvinningsstation. Livslängden beror på hur ofta man aktiverar talfunktionen och använder vibratoren. Väckaruret rengörs med en lätt fuktad trasa.

Vibratoren "Skakis" (tillbehör art nr 51109 eller i paket 51150)

Denna batteridrivna larmvibrator finns som separat eller bipackat tillbehör. Ansluts med 3,5 mm teleplug till samtliga väckarur StigUpp.

Garanti och godkännande

Garanti ett (1) år för fabrikationsfel om inte annat avtalats. Garantin omfattar inte batteribyte. Uret 51130/51150 är CE-märkt och klassad som medicinteknisk utrustning klass



Version 1.5, 2024-01-31/ML