

Bruksanvisning Diana Touch 2 – svensktalande armbandsur

Diana touch är en ljudklocka med 10 språk och "touch the glass"-funktion för att aktivera tidsmeddelandet. Diana har hög ljudkvalitet och kan meddela tiden och veckodagen i en digital eller analog version (förutom på tyska och finska).

Språk: franska, nederländska, tyska, italienska, svenska, norska, danska, finska, spanska och engelska.

Så här startar du:

Slå på/av talfunktionen: Tryck in talknappen som sitter klockan 4, i 5 sekunder tills en kort signal hörs. Klockan meddelar att Diana är i på-läge. Håller man in talknappen 9-10 sekunder, avaktiveras talet och två signaler hörs.

Talknappen och touch-funktionen: Tidsmeddelandet kan aktiveras antingen genom att trycka på talknappen, som sitter kl 4 eller genom att röra vid glaset. Använd helt enkelt ditt finger – rör och släpp fingret mitt på glaset. För touch-operationen måste ditt finger stanna på glaset i 0,5 sekunder.

VIKTIGT: När du gör inställningarna, håll inte fingret på eller nära glaset. Håll det i handen. Placera inte klockan upp och ner på någon yta när du gör inställningarna.

Om man trycker på klockans touchglasdel med fingret eller mot något föremål t.ex byxben eller bordsyta och sedan tar bort den inom 3 sekunder, så kommer talet att aktiveras. Håller man tryck mot glaset längre än 3 sekunder, så aktiveras inte talet.

Så här ställer du in språk och veckodag: (Ett vasst verktyg som en tandpetare, en vass penna eller liknande behövs)

1. **Språk:** Håll ned språk-/dagsinställningsknappen, som sitter klockan 2, i 5 sekunder och Diana börjar meddela på engelska. Välj mellan de 10 språken genom att stega framåt med samma knapp. Lås ditt valda språk genom att trycka på talknappen.
2. **Veckodag:** Tryck och släpp språk-/dagsinställningsknappen för att välja rätt dag genom att stega framåt med samma knapp. Lås din valda veckodag genom att trycka på talknappen.

Så här ställer du in timme och minut:

1. Tryck på timinställningsknappen, som sitter klockan 10, genom att stega framåt för att ställa in rätt timme.
2. Tryck på minutinställningsknappen som sitter klockan 8 genom att stega framåt för att ställa in rätt minut.
3. **LÅS** din inställda tid genom att trycka på talknappen.

Så här växlar du mellan de två versionerna av tidsmeddelande: Digital tidsrapportering = "Torsdag 14.10" Analog tidsrapportering = "10 minuter över 2, torsdag eftermiddag"

På alla språk, förutom tyska och finska, kan du välja att Diana meddelar tiden antingen i en analog eller digital version. För att växla mellan de två versionerna och vilken som finns i varje 24-timmarscykel, passera helt enkelt 00.00 när du ställer in TIMMEN, och Diana växlar automatiskt mellan analog och digital tidsmeddelande.