

# MyTime

- Dygnsklocka med kontaktstyrning

**iris**  
hjälpmedel

## Manual



MyTime är ett fickur som med en enda knapptryckning säger tid, dag och när på dygnet du är. **Art nr: 51086**

# MyTime

- Dygnsklocka med kontaktstyrning

Fäste för halsrem



Tryck på den vita knappen för att få tiden uppläst

Ingång för hörsnäcka



Ratt för att ställa volym

Ingång för kontaktstyrning



## SET

Ställ tiden

## HOUR

Ställ timme

## MINUTE

Ställ minut

## DAY/LANGUAGE


Ställ dag och språk

## Batterilucka



## Magnethölje på baksidan (se text nedan)

Fäst MyTime på t.ex. kylskåpet eller en whiteboard

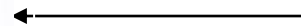

**OBS! Magneter kan påverka personer som har Pacemaker. Det magnetiska fältet är svagt runt MyTime vilket medför ingen eller liten risk för påverkan. Rådgör med din pacemakermottagning vad som gäller för din pacemaker. Undvik dock helst att hänga uret direkt ovanför en Pacemaker till dess.**

## Sätt i batterierna

Klockan levereras utan att batterierna är monterade.

Ta bort batteriluckan och montera batterierna.

## Volym

Justera volymen med ratten till höger (se bild). Uttag 3,5 mm för hörlur eller hörsnäck (tillbehör).

## Inställning av tid och dag

1. Håll ner knappen SET i 3 sekunder tills du hör en tonstöt.
2. Ställ in timme med HOUR.
3. Ställ in minut med MINUTE.
4. Ställ in rätt dag med DAY.
5. Tryck på SET när du är klar. Du hör 2 tonstötter som talar om att du har låst MyTime med dina inställningar. Det går också bra att vänta 15 sekunder så låser klockan sig själv.

## Val av analog eller digital tidsannonsering

Med analog tidsangivelse säger klockan "Kvart över tre lördag natt"

Med digital tidsangivelse säger klockan "Klockan är tre och femton, lördag" *Observera att digital tidsangivelse inte talar om när på dygnet du befinner dig.*

1. Håll ner knappen SET i 3 sekunder tills du hör en tonstöt.
2. Ställ digital eller analog uppläsning genom att stega med HOUR.
3. När du stegat fram till "tolv natt" så får du analog tidsangivelse.
4. När du stegat fram till "noll" så får du digital tidsangivelse.
5. Tryck på SET när du är klar Du hör 2 tonstötter som talar om att du har låst MyTime med dina inställningar. Det går också bra att vänta 15 sekunder så låser klockan sig själv

## Val av språk

Tillgängliga språk är Svenska, Norska, Danska, Finska och Polska. Grundinställning är Svenska.

1. Håll ner knappen SET i 3 sekunder tills du hör en tonstöt.
2. Håll ner knappen LANGUAGE i ca 7 sekunder tills du att klockan säger tiden på svenska.
3. Stega med knappen LANGUAGE tills du får önskat språk.
4. Tryck på SET när du är klar Du hör 2 tonstötter som talar om att du har låst MyTime med dina inställningar. Det går också bra att vänta 15 sekunder så låser klockan sig själv.

## Du kan kontaktstyra MyTime

Ingång för kontaktdon finns på klockans vänstra sida (se skiss)

## Magnetfäste

MyTime är utrustad med magnetisk baksida. Du kan enkelt fästa den på en plan metallyta, t.ex. whiteboardtavla, kylskåpsdörr.

## Intervall för dygnsangivelse:

Morgon:	06:00 – 09:00
Förmiddag:	09:00 – 12:00
Eftermiddag:	12:00 – 18:00
Kväll:	18:00 – 23:00
Natt:	23:00 – 06:00

## Ökad taktilitet för tidsavläsning

Montera en av de medföljande gummiplattorna på talknappen.

## Vid leverans medföljer:

MyTime, 2 st AAA batterier, Två självhäftande gummiplattor, Halsrem, Manual

## Underhåll

Klockan har 2 st AAA batterier. Livslängden beror på hur ofta man aktiverar talfunktionen. MyTime torkas av med lätt fuktad trasa. Inga lösningsmedel.

## Garanti, Service och Support

Garanti ett (1) år för fabrikationsfel om inte annat avtalats. Vänd dig i första hand till inköpsstället. Frågor kan skickas till [info@irishjalpmedel.se](mailto:info@irishjalpmedel.se).

## Godkännanden

Klockan är CE-märkt enligt 745/2017 MDR, klass 1.

## Instruktioner

På vår hemsida och eButik finner du bruksanvisningar och instruktioner, både i text eller bild och även med ljud i Daisyformat. Du finner även fler varianter av talande klockor, både på svenska och på andra nordiska språk. I eButiken och på YouTube finns även filmer om vissa av klockorna.