



Sankt Anna Elektronik



BRUKSANVISNING

Ljusvibrator

Ljusindikatorn mäter ljusintensiteten och vibrerar med en inbyggd vibrator. Intervallen mellan vibrationerna är proportionell mot ljusstyrkan. Tåta vibrationer betyder mycket ljus och inga vibrationer betyder mörker. Givaren sitter i lådans front.

Ljusindikatorn har en till/från knapp på baksidan.

Ljusindikatorn drivs av 3 st AAA batterier.

Batteribyte: Skruva upp höljet i bakkant (där snodden sitter) och ta ut batterihållaren.

Förse den med 3 st AAA batterier, minuspole mot fjädern på alla.

Sätt tillbaka batterihållaren genom att föra in den i höljet, den fjädrande tappen mot fronten på vibratoren. Skruva tillbaks höljet.

Produkten har ett års garanti för material och fabrikationsfel, inte vid felaktig användning.

Vid skrotning avlägsnas först batteriet som lämnas till särskild batteriinsamling.

Ljusindikatorn återlämnas till inköpsstället för återvinning och miljöhänsyn.

Under garantitiden skall Ljusindikatorn återlämnas till inköpsstället, när garantitiden har utgått kan den skickas direkt till tillverkaren (Sankt Anna Elektronik).

Vi hoppas att du får stor nytta av din ljusindikator.

Iris Hjälpmedel AB

Sandborgsgatan 52

122 33 ENSKEDE

Tel: 08-39 94 00

Sankt Anna Elektronik

Ö Lagnö 2

614 98 Sankt Anna

Tel: 0121-513 65