

Montering av doppsko Snöboll Ultralätt

Vikt: 26 g

Diameter: 75 mm

Material: Nylon (Polyamid 12)

Passar till käppar med Europafäste (25 mm gänga). Doppskon är tillverkad för att användas på mjuka underlag som ex. snö eller i terräng. Den är avsedd att användas primärt för pendelteknik (ej glidteknik, då den slits ut snabbare).

Monteringsanvisning:

1. Sätt den platta (röda) delen i den kupolformade (vita) så att den bildar ett lock över öppningen.
2. I mitten av locket finns ett hål, trä i käppen där så djupt det går.
3. Skruva nu på käppen tills de två delarna sitter stadigt i varandra och mot käppen.
4. Kontrollera regelbundet att doppskon sitter ordentligt fast.
5. Rengör med urvriden trasa och mildt rengöringsmedel.

Läs mer om vita käppar och andra doppskor i broschyren

"Vita käppen" www.irishjalpmedel.se.