

# Mobiltelefoni för personer med nedsatt syn



**4 olika lösningar, från enkel till avancerad**

- **Blindshell**
- **SmartVision 2**
- **SoundShell Easy**
- **Doro Secure GPS**

**Utbildning och support**

**Delbetalning via *Rendr.***

## SoundShell Easy talande mobilapplikation

- Den absolut billigaste svensktalande mobilen på marknaden.
- Enkel användargränssnitt på touchscreen.
- Alla funktioner läses upp på svenska med förstklassig kvinnlig talsyntes.
- Huvudfunktion att ringa och att skicka och få sms.
- Ringsignal med ton eller vibration.
- Skärmens ljusstyrka kan anpassas.
- Ytterligare funktioner är larm, kalkylator.
- Inbyggd svensk manual och hjälpfunktion för varje specifikt program. Favoriter och missade händelser.



Den är mycket enkel att använda. Håll ett finger på skärmen högra sida så går du till höger i menyn. Håll fingret på skärmens vänstra sida för att gå till vänster. För att gå ned i menyn, håll ett finger i mitten av skärmen. För att backa håller du två fingrar i mitten av skärmen. Fiffigt, eller hur? Genom att trycka på hemknappen går du till början av programmet.

Applikationen är utvecklad av Blindshell tillsammans med Iris hjälpmedel och anpassas till speciellt utvalda mobilplattformen från Samsung för att kunna säkerställa driftsäkerhet, tillbehör, uppdatering, garanti och förstklassig support.

Artikelnummer 55185

## Svensktalande enkel mobil Blindshell

- Mobil med tydliga knappar och kontrast.
- Röststyrning och textdiktering.
- Alla funktioner läses upp på svenska.  
Enkelt att byta till andra språk.
- Huvudfunktion att ringa och att skicka och ta emot meddelanden.
- Ringsignal med ton eller vibration.
- FM-radio, talande klocka.
- Skärmen kan anpassas med  
kontrasfärger och storlek på tecken.
- Ytterligare funktioner är sos-knapp,  
agenda, räknare, fm-radio och alarm.
- Bluetooth för hörlur/hörapparat.



### En efterlängtdad enkel mobil

Blindshell är en enkel mobiltelefon utvecklad för dem med nedsatt syn och/eller för dem som vill ha en modern och enkel mobiltelefon med knappar som talar svenska och med en tydlig anpassningsbar skärm.


Den låga vikten och smidiga storleken, 111 gram och 133x58x19 mm, gör den utmärkt att lägga i fickan. Upp till 9 timmar samtalstid och upp till 160 timmar stand-by. Laddtid 4 timmar från tomt till fullt batteri.

Anslutningsbarhet; WiFi, GPS och Bluetooth

Mobilen fungerar på 2, 3 och 4G-nät och använder standard micro-SIM. Inbyggd minne 512 kb. Utbyggbart med SD-kort upp till 32GB.

Specifikationer finns på vår hemsida. Artikelnummer 55151

## Smartphone SmartVision 2

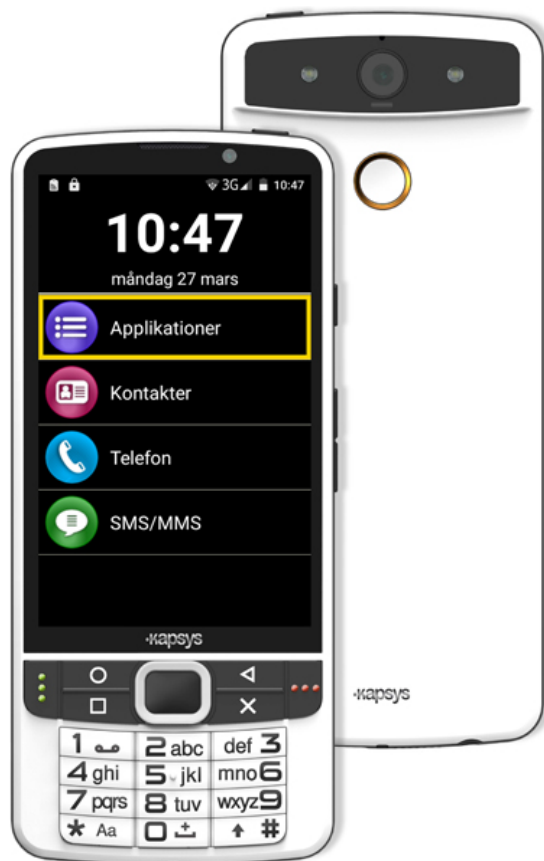

- Vår alternativa smartphone till andra fabrikat på marknaden
- Tre sätt att mata in information, pekskärm, knappar eller diktering.
- Alla funktioner har röststöd.
- Flerspråkig talsyntes och röstigenkänning.
- Lämplig för surf på Internet
- Ringsignal med ton eller vibration.
- Skärmen kan få individuell anpassning kontrastfärger och storlek på tecken.
- Ytterligare funktioner är t.ex. fickminnesfunktion, larm, kalkylator, kamera mm.
- Inbyggd svensk manual

SmartVision 2 är enkel att använda trots att den är en avancerad smartphone. Du kan navigera i telefonen på flera sätt, antingen via tangentbordet, via den 4-tum stora tryckkänsliga skärmen eller via en snabbknapp för röstkommando för att t.ex. diktera text i inmatningsområde, söka på Internet eller styra vissa andra funktioner.

Med basversionen har du tillgång till de grundläggande funktionerna, såsom telefon, meddelanden (SMS / MMS), kontakter, e-post och webbläsare. Du har dessutom fickminnesfunktion, filhanterare, alarm, kalkylator samt anteckningar.

Andra praktiska och viktiga funktioner är t.ex. NFC kontaktlös teknik, Fjärrhjälp via TeamViewer, Samtal och akut-SMS geositionerad via SOS-knappen, inspelning av telefonsamtal, Musikspelare, Kamera, FM- och webbradio.

Mobilen är kompatibel med PlayStore applikationer, typ WhatsApp, Facebook, Skype, Legimus m.fl.



Kompatibel för punktdisplayer och externt tangentbord (Bluetooth), t.ex. nya Freedom Focus 14, art nr 60036

## Specialappar

Det finns tre appar som är speciellt byggd för synskadade användare, en smart GPS som gör att du lätt kan orientera dig (**art nr 55191**), en OCR-funktion som gör att du kan läsa dokument (**art nr 55193**) samt en bokläsare som klarar alla bok-format inklusive Daisy (**art nr 55194**).

Läs mer och se filmen på vår hemsida.

Artikelnummer 55190

## Marknadens enklaste mobil – Doro Secure GPS

- Fyra snabbvalsknappar
- Huvudfunktion att vara nåbar och att kunna ringa.
- Tydliga och taktila knappar
- Programmerbar SOS-knapp på baksidan.
- Spärrfunktion för oönskade samtal.
- Säkerhetstimer
- GPS-lokalisering via Google



Doro Secure – personlig säkerhet är byggd för dem som har svårt att hantera en vanlig mobiltelefon och som bara ringer några få nummer. Användaren av mobilen är alltid nåbar för dem som har access. Trygghetsknappen samt GPS-funktionen skapar trygghet och flexibilitet för användaren och för dem anhöriga eller andra uppkopplade i systemet. Enkelt, smidigt och prisvärt.

- Tålig och vattenavvisande (IP54) mobil med fyra snabbvalsknappar för enkel uppringning med endast en knapptryckning.
- Lista med de 20 senaste samtalen (besvarade, missade och utgående)
- Valbar spärrfunktion för inkommande samtal för att undvika ovidkommande eller störande samtal.
- Bestyckad med stor trygghetsknapp och en säkerhetstimer som automatiskt kan ringa upp och skicka ett larm via SMS till förinställda nummer
- GPS - lokalisering ger information om var mobilen är.
- Kontakter kan uppdateras via Internet av t. ex. en betrodd släkting med hjälp av My Doro Manager.

## Enkel och prisvärd mobil

En lättanvänd och prisvärd mobiltelefon utan tal med bred och stor display, en knappsats som gör det enkelt att ringa dina dagliga samtal och skicka sms. Den har kamera (2M pixel), inbyggd ficklampa, Visuell ringindikator, Trygghetsknapp samt en funktions som högtalartelefon. Väger enbart 96 gram med fickmått 126x62x13 mm.



Iris Hjälpmedel har ett urval av enkla och smarta telefoner anpassade till synsvaga användare och för dem med nedsatt hörsel. Gå in på vår hemsida så finner du aktuellt sortiment.

## Utbildning och anpassningar

Iris Hjälpmedel erbjuder utan kostnad upp till 30 minuter introduktion av respektive modell av våra mobiler. Vi erbjuder också kostnadsfri support för enklare frågor under de första sex månaderna.

Vi erbjuder också anpassad utbildning för respektive modell mellan en till tre timmar. Kontakta oss för prisuppgift.

## Finansiering via



Via ett samarbetet med Paynova har Iris Hjälpmedel möjlighet att ge sina kunder ett förmånligt sätt att delbetala sina inköp via vår hemsida. I samband med utgång via kassan erbjuds antingen faktura eller delbetalning. Där framgår tydligt vilken månadskostnad som ska erläggas. Betalningen skickas via pappersfaktura eller pdf-faktura.

# Telesupport Direkt



**08 – 39 94 00**

**Välj produktförfrågan** eller  
[produktsupport@irishjalpmedel.se](mailto:produktsupport@irishjalpmedel.se)

- Telefonsupport för alla våra specialmobiler
- Utbildning på egna eller utvalda plattformar
- Anpassning
- Tillbehör

Vi förbehåller oss rätten till ändringar