

Manual "svart" Diana Svensktalande armbandsur



Armbandsuret Diana är ett svensktalande ur utan visare. Modellen finns i två storlekar på boett, dia 33 mm (artikelnr 51145) samt 37 mm (artikelnr 51144). Diana "svart" kan återge dag och tid analogt samt med dygnsbestämning ("Måndag, fem i halv tre på eftermiddagen") eller digital utan dygnsbestämning ("Måndag, fjorton och tjugofem"). Vid tryck på talknapp anges först dag vilket indikerar att tid kommer.

(OBS vissa klockor har röd transportspärr som ska tas bort). Starta talet genom att hålla TALKNAPPEN nedtryckt i ca 3 sekunder. Två korta ljudsignaler indikerar att talfunktionen är igång. För att stänga av talet upprepas samma procedur i ca 5 sekunder med en kort signalbekräftelse. Sätt på talet inför nästa moment nedan.

Tryck med ett spetsigt föremål (t.ex. penna, gem) på den infällda knappen för DAG på boettens sida vid klockan 10 (se skiss). Stega fram tills rätt dag programmerats. Ställ TIMME genom att göra likadant på den infällda knappen vid klockan 8 (se skiss). Ställ MINUT på den infällda knappen vid klockan 4 (se skiss).

Du skiftar mellan digital och analog tidsangivelse genom att bläddra förbi 00:00 med Ställ TIMME. Diana låser sig automatiskt efter ca 5 sekunder eller när du trycker på talknappen.

Diana kan även ange tiden på Norska, Danska, Finska och Polska. Tryck ned ställknappen DAG/SPRÅK i ca 5 sekunder. Därefter stega fram till önskat språk. Lås genom att trycka på TALKNAPPEN. Alternativt ställs klockan på ett språk och kan sedan växlas över till ett annat språk där gjorda inställningarna följer med.

Intervall för dygnsangivelse i enlighet med SMHIs intervall:

Morgon	06:00 – 09:00
Förmiddag	09:00 – 12:00
Eftermiddag	12:00 – 18:00
Kväll	18:00 – 23:00
Natt	23:00 – 06:00

OBS. Diana gillar inte fukt och salt. Ta av dig uret om du t.ex. diskar, duschar eller sportar. Det finns två hål på baksidan som är högtalare. Uret är behandlat mot nickelallergi och läderarmbandet är fritt från latex. Armbandet kan enkelt bytas mot andra armband på marknaden. Batteribyte sker med fördel hos vanliga urmakare med standardbatteri (CR2025).

Armbandsuren Diana är CE-märkta och godkända som medicinsktekniska hjälpmedel.