

# Manual

## Golvarmatur med förstoring Iris HighLite

Artikelnummer 55665



### Viktig information


- Rikta aldrig tänd LED-ljuskälla direkt mot ögonen.
- Lämna aldrig förstoringsglasat i direkt solljus. Detta kan medföra brandfara. Fäll alltid ned linsskyddet efter användandet.
- Torka ofta av linsen med en mjuk trasa för att förhindra repor.
- Använd inte starka rengöringsmedel när du rengör linsen. För att få bort t.ex. fingeravtryck, använd ett mildt tvättmedel.
- Använd inte armaturen i våtutrymmen.

## Paketets innehåll

- Golvplatta, två sektioner av stangen, sektion med strömbrytare samt lamphuvud på svanhals
- Nätdel
- Manual

## Montering av armaturen

- Lägg bottenplattan på ett jämnt underlag
- Skruv fast den undre sektionen medsols
- Skruva fast den övre sektionen i den undre medsols
- Montera lamphuvudet med svanhalsen på sektionen
- Observera att strömkabeln löper genom hela konstruktion och löper ut genom nedre rörsektionen ovanför lampfoten.

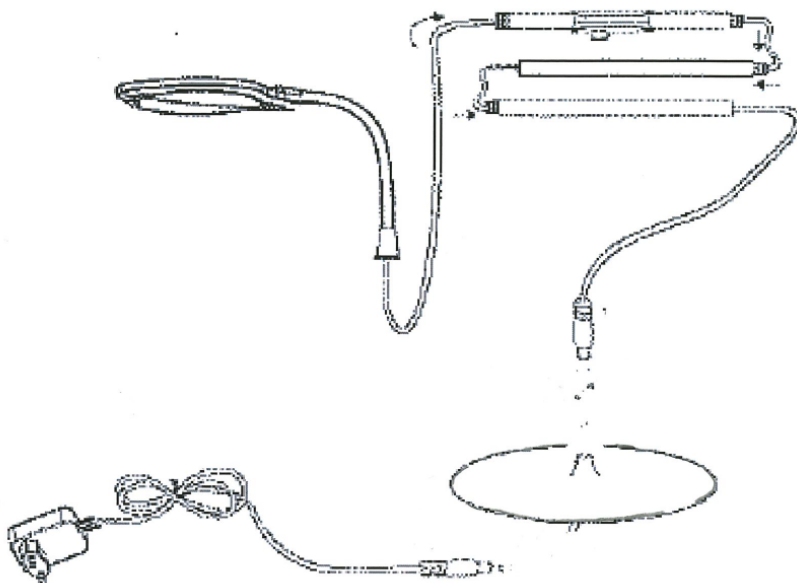

## Hantering

- Anslut strömkabeln till nätdelen och anslut nätdelen till ett vägguttag.
- Tryck in den cylinderformade strömbrytaren i ett par sekunder och lampan tänds.
- Skifta färgtemperatur genom att trycka på strömbrytare. Ljustemperatur i tre lägen, varm vitt, kall vitt och dagsljus.
- Genom att vrida på strömbrytaren kan ljusstyrkan höjas eller sänkas efter eget önskemål.
- För att släcka belysningen hålls strömbrytare intryckt i ett par sekunder.

## Produktdata

- 800 lumen
- 3 färgtemperaturer, 3000, 4500 samt 6000K
- Förstoring 2X/3D
- Linsstorlek 12,7 cm
- Vikt 4,3 kg
- CE-godkänd (MDD)