

Bruksanvisning Iris Colorvario LED Förstoringslampa 1,75X/3D samt 2,25X/5D



Lupplampa med tre (3) olika färgtemperaturer OCH fyra (4) dimmersteg inom varje valt färgläge.

I förpackning finner du arm/linshuvud, bordsfäste, linsskydd och nätanslutning. Börja med att fästa bordsfästet på lämplig plan plats på bordsskivan. Säkerställ att fästet är ordentligt fastskruvat. Vik ut armen och för ned lamparmens styrpinne i fästet. Koppla ihop nätdelens runda kontakt med motsvarande kontakt från lamparmen. Nu kan du ansluta nätdelen till vägguttaget.

Du tänder belysningen med hjälp av den svarta runda knappen på linshuvudets bakre sida. Justering av färgtemperatur och dimmer sker via touchknapparna på lamphuvudets främre del.

Belysning är högeffektiva LED-lampor som knappt avger någon besvärande värme.

Högklassig optik med lins gjord av glas
Dia 17 cm, 3D/1,75X respektive 5D/2,25X
Armlängd 120 cm
Klämskydd
Optiklock
Tre färglägen, 2700, 4000 och 5500 Kelvin
5000 LUX vid 15 cm

VIKTIGT ATT VETA

- Rengör enbart med lätt fuktad mjuk trasa när lampan är strömlös.
- Placera inte linshuvudet i solljus för att minimera brandrisk.
- Använd alltid linsskyddet när du inte använder förstoringslampan.
- Du kan med fördel använda belysningen även när linsskyddet är på.
- Använd förstoringslampan enbart inomhus.
- Klarar förvaring mellan -20C till +40C. Luftfuktighet upp till 95%.
- Vid eventuella fel – kontakta försäljningsstället eller oss. Försök inte reparera själv.
- Vid eventuell destruktion – lämna till återvinning av elektronik, glas och metall – alternativt skicka till oss för återvinning.

Produkten är CE-märkt (RoHS)