

Manual

Milestone 212 Fickminne Ace




Innehållsförteckning

Knappbeskrivning	3
Bild och knappbeskrivning.	3
Ovansidan	3
Övre kortsidan	3
Högra långsidan	3
Nederkant	4
Allmänt	4
Med Milestone 212 Fickminne kan du:	4
Ladda batteriet	4
Knapplås på/av	4
Väcka/Slå på Fickminnet	4
Väljknappen	4
Höj och sänk volym på högtalare	4
Höj och sänk volym i hörlurar	4
Informationslista	4
Fickminne	5
Navigera i mappar med röstanteckningar	5
Spela in kortare minnesanteckning	5
Direktinspelning	5
Spela in kontinuerlig inspelning	6
Spela upp inspelning	6
Radera inspelning	6
Inspelning via linjeingång	6
Tillval med SD-minneskort	7
Uppdateringar	7
Tillbehör	7
Anslutning av andra externa tillbehör	7
Tillverkare och auktoriserad europeisk representant	8
Denna produkt tillverkas av Bones AG, Güterstrasse 8	8
CH-8245 Feuerthalen, Schweiz. info@bones.ch. www.bones.ch	8
Auktoriserad EU-representant är DAISY-support, Marc Van der Aa	8
Hubert Verschraegenlaan 2, 9150 Kruibeke, Belgium.	8
Produktsupport	8
Daisyutbildning av Milestone	8

Knappbeskrivning

Bild och knappbeskrivning.

Text knappbeskrivning, se nedan

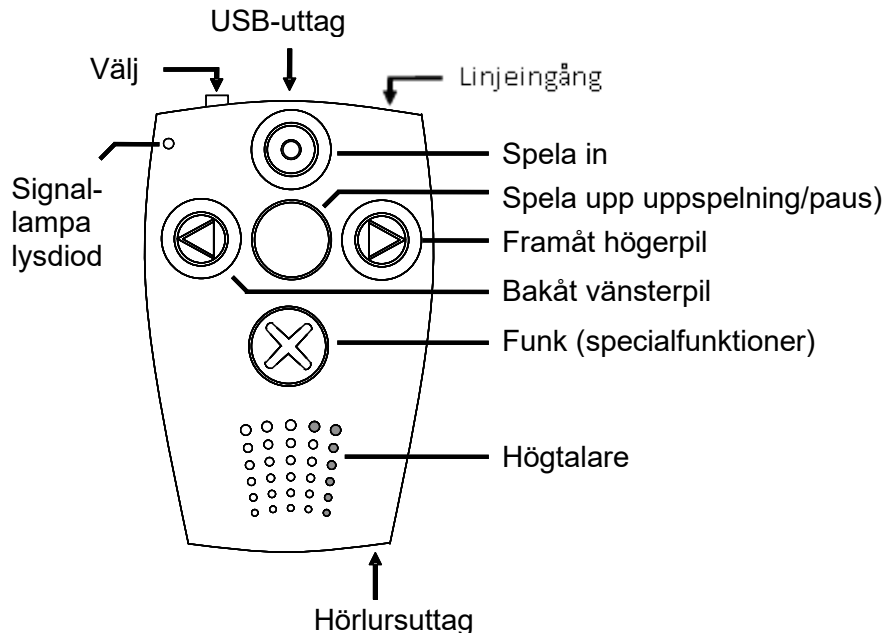

Ovansidan

Här har du fem taktila knappar och längst ner ett högtalargaller. Knapparna sitter i tre rader, en knapp på övre raden, tre på mittraden och en knapp på nedre raden.

- Lampa: sitter längst upp till vänster.
- Översta knappen: **Spela in** och du känner en fördjupning, en ring.
- Mittraden, där heter knapparna:
- Vänstra knappen, heter **Bakåt** och du känner en vänsterpil.
- Mittenknappen, heter **Spela upp** och är slät.
- Högra knappen, heter **Framåt** och du känner en högerpil.
- Nedre knappen, heter **Funktionsknappen** (här **Funk**) och du känner ett kryss.

Övre kortsidan

Där har du:

- Till vänster har du **Välj**.
- I mitten har du **Mini-USB-uttag**, anslutning för laddare och datorkabel.
- Till höger har du en linjeingång

Högra långsidan

Här har du anslutning för minneskortet.

Nederkant

Till höger har du anslutning för hörlurar. När dessa kopplas in tystnar den inbyggda högtalaren.

Allmänt

Internminne ca 11GB. (räcker upp till 420 timmar inspelning).

Fickminnet går in i viloläge efter 10 minuters inaktivitet.

Max 20 timmars användning vid fulladdat batteri.

Med Milestone 212 Fickminne kan du:

- Spela in röstanteckningar med fickminnet
- Spela upp röstanteckningar

Ladda batteriet

Innan användning ska du ladda batteriet ca 3 timmar.

Det kan du göra med hjälp av den medföljande batteriladdaren eller genom att ansluta Milestone till datorn med medföljande USB-kabel för detta.

Knapplås på/av

Tryck och håll inne **Funk** och tryck därefter på **Spela in**. Släpp knapparna, först **Spela in** och därefter **Funk**, och fickminnet bekräftar knapplås på eller av.

Väcka/Slå på Fickminnet

Det gör du genom att tryck på **någon av knapparna**.

Väljknappen

Du väljer funktion med **Välj** som sitter till vänster på överkanten.

Där har du valet Fickminne, (Böcker och Audio ej aktiva).

Med valet Fickminne gör du dina röstanteckningar.

Höj och sänk volym på högtalare

Se till att ingen hörlur är ansluten. Håll ner **Funktionsknappen** och tryck **Framåt/Bakåt** för att öka och minska volym. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå.

Höj och sänk volym i hörlurar

Anslut hörlurar. Håll ner **Funktionsknappen** och tryck **Framåt/Bakåt** för att öka och minska volym. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå.

Informationslista

Genom att hålla nere **Funk** 1,5 sekunder kan du få information om vart du står i Fickminnet, batteristatus, minnesstatus och ledigt utrymme, val att säkerhetskopiera röstanteckningar till SD-minneskortet (om det finns), mjukvarans version samt Fickminnets modell och serienummer.

Batteristatus meddelas på följande sätt:

Batteriet är fulladdat, laddat, ladda batteriet, ladda genast batteriet.

Fickminne

Dina inspelade röstanteckningar sparas på det interna minnet. Inspelning sker via den inbyggda mikrofonen. Den totala inspelningstiden är ca 420 timmar. Mikrofon med förförstärkare går att ansluta. Antalet meddelanden är i praktiken obegränsat. Det finns fem mappar i det interna minnet. På så sätt kan du strukturera dina meddelanden i olika kategorier. Det går bra att stoppa in ett meddelande mellan två gamla. Det man spelar in hamnar direkt efter det man just lyssnat på. På så vis kan man bygga upp en almanacka eller ett telefonregister.

Navigera i mappar med röstanteckningar

För att hitta bland mapparna måste du först välja funktion. Tryck **Välj** tills du hör **Fickminne**. Du väljer vilken mapp du vill arbeta i genom att trycka in **Välj** följt av någon av knapparna på Milestones ovansida. Val av mapp hörs när du släppt båda knappar. Följande kombinationer gäller:

- Välj** och **Spela in** = mapp M1
- Välj** och **Bakåt** = mapp M2
- Välj** och **Spela upp** = mapp M3
- Välj** och **Framåt** = mapp M4
- Välj** och **Funk** = mapp M5.

Milestone talar om för dig vilken mapp du valt.

Spela in kortare minnesanteckning

Din inspelning hamnar i den mapp där du befinner dig.

Så här gäller det att kunna mappnavigationen ordentligt.

Se ovan Navigera i mappar.

1. Gå till funktionen **Fickminne** med hjälp av **Välj**.
2. Det interna minnet används för röstinspelningar.
3. Välj mapp där du vill lagra din inspelning.
4. Tryck och håll in **Spela in** tills du hör ett kort klickljud. Lampan överst till vänster på ovansidan av Fickminnet börjar då blinka.
5. Avsluta inspelning genom att släppa **Spela in**.

Obs! Om du trycker på **Spela in** kortare än en halv sekund blir ingenting inspelat. På så vis förhindras oavsiktliga inspelningar. Vänta därför några ögonblick innan du börjar prata.

Direktinspelning

Du kan göra en röstanteckning direkt oavsett om fickminnet är vaken eller i viloläge förutsatt att spelaren "somnade" i funktionen **Fickminne**.

Tryck bara in **Spela in** och håll intryckt. När du hör ett kort klickljud, spela in ditt meddelande och släpp knappen när du är klar.

Spela in kontinuerlig inspelning

1. Håll ner **Spela in**.
2. Tryck **Spela upp**.
3. Du hör en signal.
4. Lampan blinkar och du spelar in.
5. Du kan göra paus i inspelningen genom att trycka **Spela upp**.
6. Lampan blinkar snabbare och du hör en dov signal.
7. Starta inspelningen igen med **Spela upp**, den dova signalen hörs.
8. Avsluta genom att trycka **Spela in** igen. Ett pip ljud hörs.

Spela upp inspelning

1. Se till att gå till rätt mapp.
2. Tryck **Spela upp**.
3. Har du fler inspelningar i mappen bläddrar du till filerna med **Framåt/Bakåt**.
4. För att snabbspola i ett långt meddelande, håll nere **Framåt/Bakåt**. Efter en sekund ökar hastigheten. När du släpper återgår den till normal hastighet.

Radera inspelning

1. Se till att gå till rätt mapp.
2. Tryck **Spela upp**.
3. När du hör den inspelning som du vill radera.
4. Tryck **Funk** och **Spela upp**. Ett ljud hörs när du släpper knapparna.

Du kan radera flera meddelanden på en gång. För att radera alla meddelanden från och med det du står på, till det sista i den mapp du befinner dig.

1. Håll nere **Funk** och tryck på **Spela upp** och **Framåt** i två sekunder.
2. För att radera det meddelande du står på och alla före detta, håll istället nere **Funk** och tryck på **Spela upp** och **Bakåt** i två sekunder.

Inspelning via linjeingång

Anslut en extern ljudkälla till den 3,5 mm standardingång som finns till höger på den övre kortsidan. När den ansluts så växlar spelaren automatiskt från den inbyggda mikrofonen till den externt anslutna ljudkällan. Du startar en inspelning via linjeingång på samma sätt som via den inbyggda mikrofonen. Resultatet av inspelning via linjeingången blir en mp3-fil (128 kbps). Du kan ansluta mikrofon med förstärkare.

Om inspelningen distorderar (ljudbilden förvrängs), sänk volymen på ljudkällan. När du spelar in via linjeingången kan du samtidigt avlyssna resultatet via hörlurar.

Tillval med SD-minneskort

I grunden är denna produkt ett enkelt och effektivt fickminne. Genom att köpa till ett Secure Digital minneskort kan den bli en kraftfull tal- och ljudsboksspelare med alla Daisyfunktioner. Det sker genom att helt enkelt föra in minneskortet (tillbehör) i minneskortsfacket. Läs mer om de utökade funktionerna i lathunden för Milestone 212plus på vår hemsida.

Uppdateringar

Fickminnet har en mjukvara som är under ständig utveckling för att göra din den successivt bättre och än mer effektiv. Den är versionshanterad och kan enkelt uppdateras via vår hemsida. Gå in på www.irishjalpmedel.se/Milestone/Content och följ instruktionerna. Ta för vana att titta med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du har den senaste versionen. Uppdateringar är kostnadsfria.

Tillbehör

FAME är en färg- och ljusindikator som är ett tillbehör till Milestone och används ansluten till Fickminnet. Den är ett hjälpmedel för synskadade eller färgblinda personer.

Anslutning av andra externa tillbehör

Till spelarens hörlursuttag kan andra hörlurar, hörslinga, auxkabel eller slingförstärkare anslutas utan att det påverkar spelarens CE-märkning. Spelaren kan även anslutas till dator, för att ladda spelaren, ladda ned uppdateringar eller för att exportera filer från internminnet till dator.

Återställa till fabriksinställningar

Återställ fickminnet till ursprunglig konfiguration genom en knappkombination. Lås först knapparna. Tryck och håll inne knapparna **Välj**, **Spela in**, **Spela upp** och **Funk** (i just den ordningen) i ca 10 sekunder. Signalerna låg-hög, låg-hög, låg-hög bekräftar att enheten är återställd till fabriksinställningar.

Rengöring och underhåll

Rengöring bör ske regelbundet med en mjuk och lätt fuktad trasa med neutralt rengöringsmedel. Rengöringsalternativ är också Etylalkohol 10 % till max 20 % utblandat med vatten eller etanolbaserade lösningsmedel med max tensid 50 % eller motsvarande.

Använd INTE bensin, Aceton eller liknande. Dessa är för aggressiva och kan skada plasten och tryckta symboler.

Om enheten inte används under en längre tid behöver batteriet stödladdas och det ungefär var tredje månad.

Godkännanden

Denna produkt är CE-märkt som medicinteknisk produkt, 2017/745 MDR, Klass 1.

Tillverkare och auktoriserad europeisk representant

Denna produkt tillverkas av Bones AG, Güterstrasse 8
CH-8245 Feuerthalen, Schweiz. info@bones.ch. www.bones.ch
Auktoriserad EU-representant är DAISY-support, Marc Van der Aa
Hubert Verschraegenlaan 2, 9150 Kruibeke, Belgium.

Översättning av denna snabbguide har skett i samverkan och med godkännande av tillverkaren. Versionsnummer i sidfot korresponderar med aktuell mjukvaruversion.

Produktsupport

Som kund hos Iris Hjälpmedel har du tillgång till vår support på telefon 08-39 94 00, välj produktförfrågan.

Daisyutbildning av Milestone

Vi tillhandahåller och skräddarsyr utbildning inom detta område.
Kontakta oss på 08 – 39 94 00 eller info@irishjalpmedel.se.

Vi önskar er lycka till med er Milestone.
Iris Hjälpmedel

Iris Hjälpmedel AB
S-122 33 Enskede, Besök: Sandsborgsvägen 52
Telefon: 08-39 94 00
www.irishjalpmedel.se