


Manual Diana

Svensktalande armbandsur

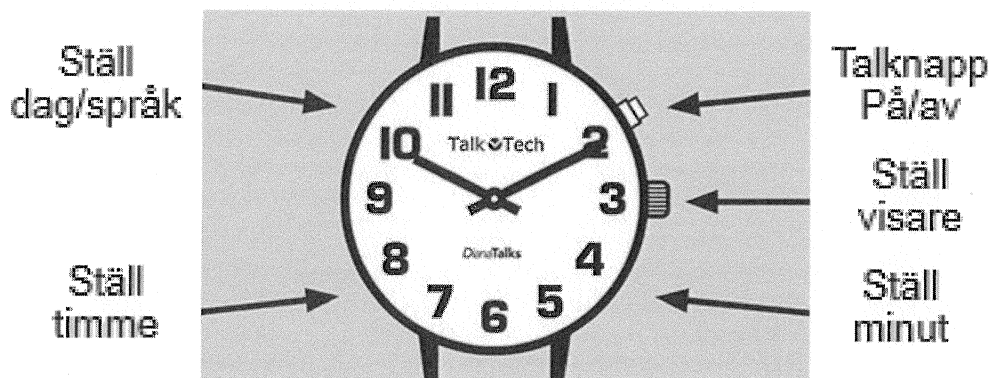

Armbandsuret Diana är ett svensktalande ur med stor och tydlig urtavla. Modellen finns i två storlekar på boett, dia 33 mm (artikel nr 51143) samt 37 mm (artikel nr 51142). Diana kan återge dag och tid analogt samt med dygnsbestämning ("Måndag, fem i halv tre på eftermiddagen") eller digital utan dygnsbestämning ("Måndag, fjorton och tjugofem"). Vid tryck på talknapp anges först dag för att sedan följas av tid.

Visarna ställs som på ett vanligt ur med kronknappen. I intryckt läge startar visarna (OBS vissa klockor har röd transportspärr som ska tas bort). Starta talet genom att hålla TALKNAPPEN nedtryckt **5 till 6** sekunder. En kort ljudsignal indikerar att talfunktionen startat. Starta nu talet inför nästa moment

Diana kan även ange tiden på norska, danska, finska och engelska och ytterligare fem mellan-europeiska språk. Tryck ned ställknappen DAG/SPRÅK vid klockan 10 (se skiss) i ca 5 sekunder med ett spetsigt föremål (t.ex. penna, gem). Därefter stega fram till önskat språk. Lås valt språk genom att trycka på TALKNAPPEN eller vänta i 8 – 10 sekunder tills en pipsignal hörs.

Tryck sedan på samma knapp DAG/SPRÅK och stega fram tills rätt dag programmerats. Ställ TIMME genom att göra likadant på den infällda knappen vid klockan 8 (se skiss). Ställ MINUT genom att göra likadant på den infällda knappen vid klockan 4 (se skiss).

Du skiftar mellan digital och analog tidsangivelse genom att bläddra förbi 00:00 med Ställ TIMME. Diana låser sig automatiskt efter ca 5 sekunder eller när du trycker på talknappen. Intervall för dygnsangivelse i enlighet med SMHI:s intervall:

Morgon	06:00 – 09:00
Förmiddag	09:00 – 12:00
Eftermiddag	12:00 – 18:00
Kväll	18:00 – 23:00
Natt	23:00 – 06:00

Diana är konstruerad så att förändring av dagrapportering sker 06.00 då natt övergår till morgon enligt ovanstående tabell. Med andra ord är det t.ex. onsdag mellan 06.00 på morgonen fram till 06.00 påföljande dag.

Underhåll och Skötselråd

Uret drivs med ett standardbatteri, typ C2025. Livslängden på batteriet beror på batteriets kvalitet samt hur ofta man aktiverar talfunktionen. *När batteriet börjar bli för svagt så brukar talet påverkas först. Det kan innebära otydligt tal eller ofullständiga tidsangivelser. Urverket kräver mindre ström än talet för att fungera som vanligt.*

För batteribyte – vänd dig främst till en urmakare alternativt till Iris Hjälpmedel.

OBS! grundspråket för klockan är engelska (default). Om strömmen från batteriet bryts om än kort, t.ex. vid batteribyte, *så återgår detta ur till engelska*. Språk, dag och tid får då ställas igen enligt de instruktioner som angetts ovan.

Om du inte använder klockan under en längre tid - dra ut kronknappen för att stänga av urverket och därmed spara på batterikapaciteten.

Om du väljer att byta batteri hos din urmakare ber vi dig informera om att uret endast har ett batteri samt att stor varsamhet krävs med den inbyggda högtalaren som finns i boetten och dess anslutningar. Om uret skadas vid batteribyte är garantin förbrukad.

OBS. Diana gillar inte fukt och salt. *Det finns två hål på boettens baksida som är högtalare. Ta för säkerhets skull av dig uret om du t.ex. diskar, duschar eller sportar.*

Uret är behandlat mot nickelallergi och läderarmbandet är fritt från latex.

Armbandet kan enkelt bytas mot andra armband på marknaden.

Garanti

Garanti ett (1) år för fabrikationsfel om inte annat avtalats. Garantin omfattar inte batteribyte.

Armbandsuren Diana är CE-märkta som medicintekniska hjälpmedel 2017/745 MDR, klass 1.

Dokumentversion V1.6, 2023-09-05