

## Bruksanvisning Go-box

# Go-box



## Innehåll

|   |                                  |    |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | Vad är en GObox .....            | 3  |
|   | Förpackningens innehåll .....    | 3  |
|   | Enhetens serienummer .....       | 3  |
| 2 | Ställ in din GObox .....         | 4  |
|   | Grundinställningar .....         | 4  |
|   | Hörlurar med blåtand .....       | 5  |
|   | Flera videokällor .....          | 5  |
| 3 | Utsidan.....                     | 6  |
|   | Baksidan .....                   | 6  |
|   | Framsida.....                    | 6  |
|   | Fjärrkontroll .....              | 7  |
| 4 | Hur gör jag .....                | 8  |
|   | Välj var ljudet ska höras .....  | 8  |
|   | Reglera läshastigheten .....     | 8  |
|   | Reglera ljudet i hörlurarna..... | 8  |
| 5 | Meny .....                       | 8  |
|   | Meny - Tal - Volym .....         | 8  |
|   | Meny - Tal - Balans .....        | 9  |
|   | Meny - Tal - Läshastighet.....   | 9  |
|   | Meny - Tal - Röst.....           | 9  |
|   | Meny - Profiler .....            | 9  |
|   | Meny – Wifi .....                | 9  |
|   | Meny - Blåttand.....             | 10 |
|   | Meny - Go-box .....              | 10 |
| 6 | Frågor och svar .....            | 11 |
| 7 | Specifikationer .....            | 12 |

## 1 VAD ÄR EN GOBOX

Go-box är en maskin med inbyggd talsyntes som läser upp textremsan på din TV, framtagen framför allt för personer med synnedsättning. Enheten har några få inställningar och som alla har talstöd. Därför kan den också styras helt och hållet taktilt och via hörsel. Det gör den mycket användbar för personer med synnedsättning eller blindhet eller äldre med begränsad datorvana. Ingen dator behövs och Go-boxen är mycket enkel att använda. Någon internetanslutning är heller inte nödvändig även om det kan vara användbart för automatiska uppdateringar eller för supportfrågor.

Enheten placeras mellan HDMI-kablarna. Vanligtvis är din TV och din digitalbox ihopkopplad med en sådan HDMI-kabel. I stället ska den gå från digitalbox till Go-box som i sin tur kopplas till din TV via den HDMI-kabel som medföljer din förpackning. Använd som vanligt digitalboxens fjärrkontroll för att välja TV-kanal. Go-box följer med automatiskt.

### *Förpackningens innehåll*

Vid leverans ska följande finnas med i din produktförpackning:

- Go-box med 5V nätanslutning
- HDMI-kabel
- USB-adapter för hörlur
- fjärrkontroll + AAA-batterier
- bruksanvisning



### *Enhetens serienummer*

Serienumret består av ett versalt G följt av 5 siffror (t.ex. G12345). Det hittar du på undersidan av din Go-box, på förpackningens utsida och uppläst i menyn för inställningar. Serienumret är viktigt för alla supportfrågor.


## 2 STÄLL IN DIN GOBOX

Go-boxen behöver bara strömförsörjning och en video (digital-) källa för att börja läsa upp textremsan för dig. Ett exempel beskrivs i avsnittet grundinställningar nedan. Fler exempel finns som kanske passar din omgivning eller dina behov bättre.

### Grundinställningar

Detta exempel beskriver användning av:

- en digitalbox för TV (eller annan videokälla)
- en TV för video och audio
- hörlurar + USB-adapter för den upplästa textremsan

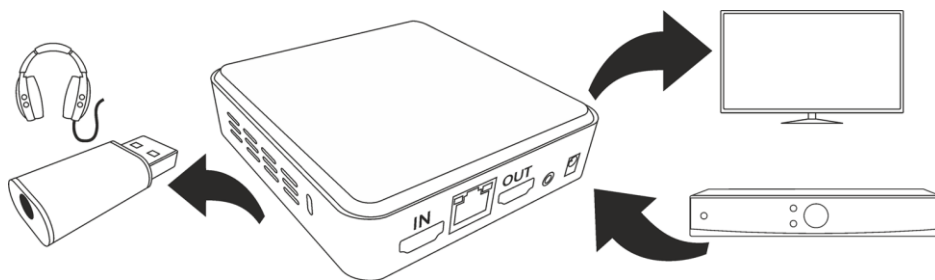

HDMI-kabeln som sitter mellan din digitalbox och TV, tag loss änden som sitter i TV'n och sätt in den i Go-box HDMI-ingång. Säkerställ att din TV-bild har HD-kvalitet (1920x1080). Ta fram den medföljande HDMI-kabeln och anslut den mellan GO-box HDMI-OUT-utgång till TVn's HDMI-ingång. Koppla samman hörlurar (3.5mm) eller hörslinga med USB-adaptern och sätt in den i en av Go-box USB-ingångar. Sätt i den medföljande strömkabeln i ett vägguttag för att ge ström åt din Go-box.


Välj rätt HDMI-ingång på din TV (tillika källa) för att upptäcka signalen från din digitalbox. Möjligen visas Solutions Radio logotype som hastigast och därefter en startskärm. Sedan hör du textremsan läsas upp via TV'n. Om inte, tryck på Tal-knappen på fjärrkontrollen för att växla mellan ljudet från TV och hörlurar.

**Tips:** USB-adapterns 3.5mm ljudanslutning kan kopplas till din hörapparats hörslinga. Rådgör med din hörselkonsulent.

**Tips:** USB- adapterns 3.5mm ljudanslutning kan också kopplas till dina trådlösa hörlurar (RF-hörlurar) basstation.

## Hörlurar med blåtand

Go-box kan också användas med blåtandshörlurar i stället för dem med kabel.

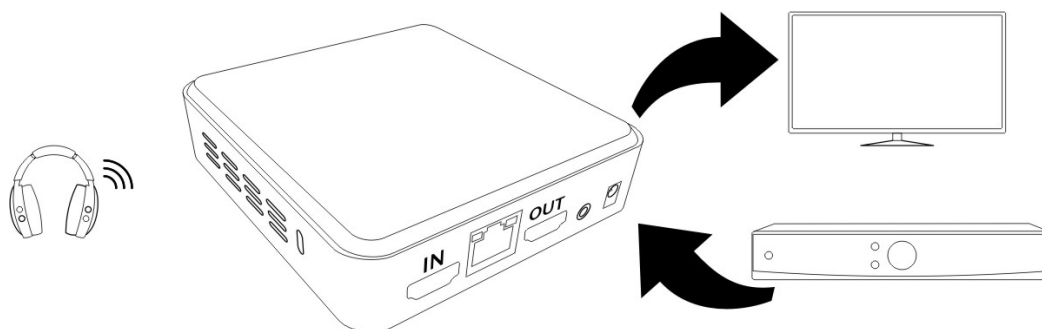


Först behöver du koppla (para) dem till din Go-box. Gör hörlurarna upptäckbara (enligt deras anvisning). Tryck på menyknappen på fjärrkontrollen och välj Blåtand. Namnet på dina hörlurar ska nu visas i listan över hittade enheter. Välj rätt enhet och tryck på OK-knappen. Tryck därefter på Talknappen för att växla mellan ljud från TV och hörlur.

## Flera videokällor

Go-box analyserar videon som kommer in via HDMI-ingången för att upptäcka textremsan. Att byta kablar till en ingång kan vara en tillfällig lösning för att växla källa. Härnäst beskrivs hur du kan använda en HDMI-switch. Den behöver du köpa till då den inte medföljer i förpackningen.

Säkerställ att alla videokällor har HD-kvalitet (1920x1080). Ta ut de tre HDMI-kablarna från din

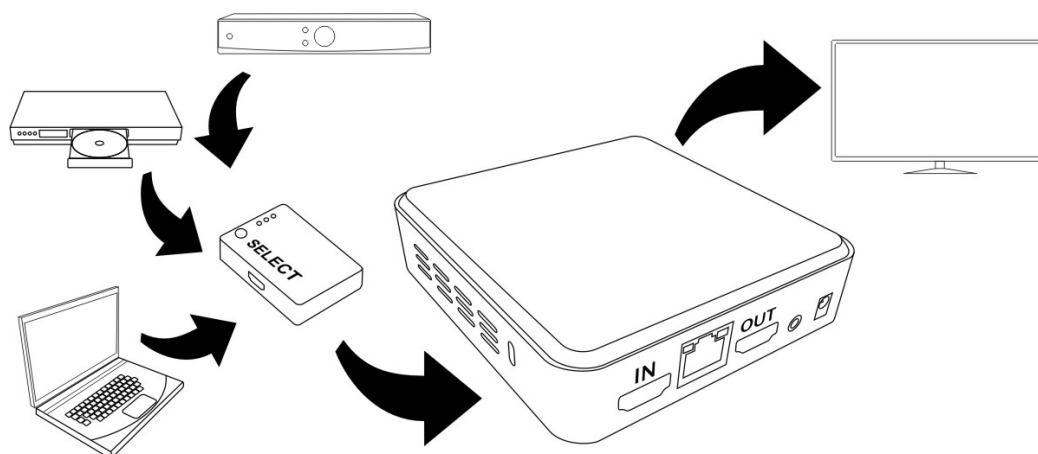

TV. Sätt in dem i HDMI-switchens ingångar och anslut den till HDMI-ingången på din Go-box. Använd ytterligare en HDMI-kabel mellan utgången på Go-box till ingången på TV'n. Välj rätt källa på din TV för att kontrollera signalen från digitalkällan.


På switchen kan du nu välja vilken videokälla som ska skickas till TV'n via Go-boxen (läs mer i manualen för din HDMI switch).

### 3 UTSIDAN

#### Baksidan

På baksidan finns fem anslutningar. Från vänster till höger (med baksidan mot dig):


- **HDMI-ingång** för HDMI-kabel från en DVD-spelare eller digitalbox
- **nätverk** anslutning för nätverkskabel till ditt lokala nätverk
- **HDMI-utgång** för HDMI-kabel till din TV
- **hörlurar** 3.5mm ljudingång för kablade hörlurar
- **strömkabel** (1.3x3.5mm) för anslutning till vägguttag

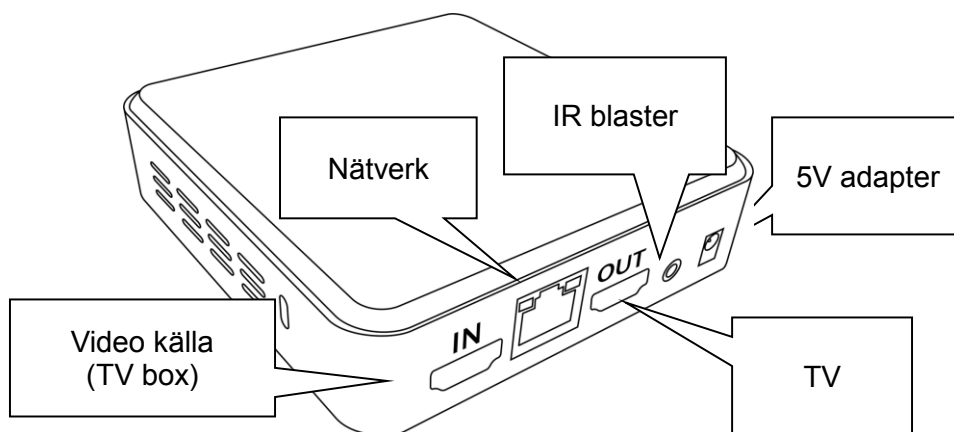

#### Framsida

Framsidan har följande egenskaper från vänster till höger:

- Standby knapp
- Mottagare fjärrkontroll
- Plats för SD-kort
- Diod för nätverksaktivitet
- Ljusindikator strömförsörjning
- två USB-anslutningar (för koppling av USB-adapter till hörlur)

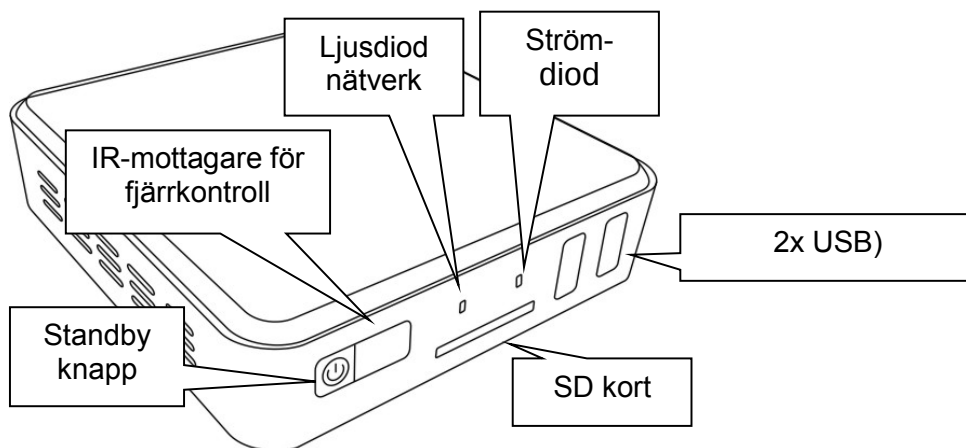

## Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen har 13 knappar.


Knappen **[Tal]** hittar du längst upp i vänster hörn och här väljer du om den upplästa textremsan ska höras i din TV eller via hörlurar.

Knappen **[På]** finns längst upp till höger. Här sätter du på eller stänger av din Go-box.

Just under dessa knappar finns ett par knappar med **[Hastighet]** på vänster sida. Här väljer du vilken hastighet du vill att textremsan läses upp. Till höger finns ett annat par knappar som reglerar volymen i dina hörlurar.

På den nedre halvan finns 5 knappar formade som en diamant där den i mitten är knappen **[OK]** för att välja alternativ i menyn. De fyra knapparna runt om är till för navigering i menyn, **upp**, **ner**, **vänster** och **höger**.

Till vänster om diamantformationen sitter knappen för att öppna menyn **[Meny]** (den övre) eller tillbaka **[Tillbaka]** för att lämna menyn (den nedre).

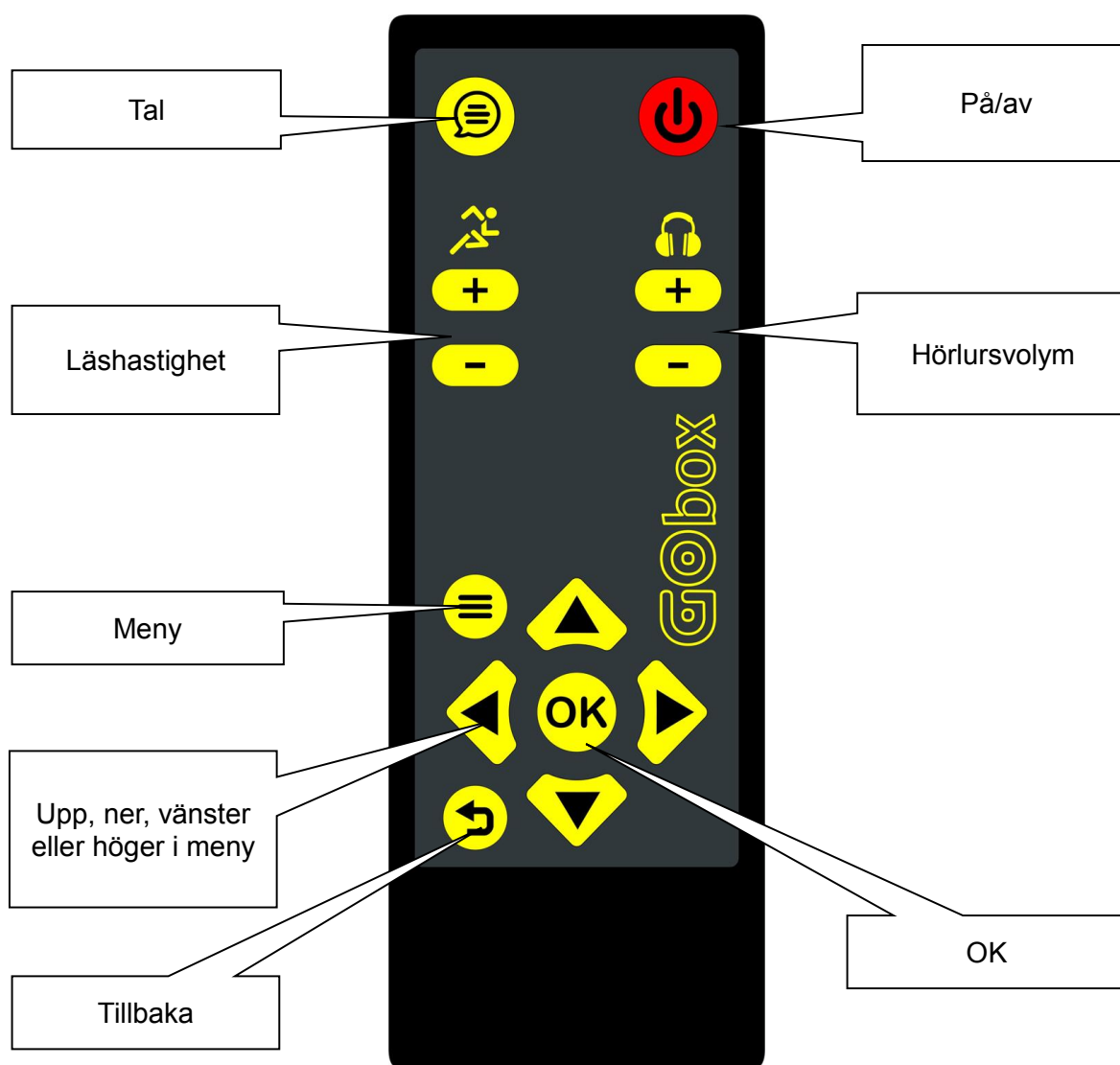

## 4 HUR GÖR JAG

Go-box startar automatiskt när den känner av en videosignal till HDMI-ingången. Du kan också trycka på fjärrkontrollens På/av-knapp.

### *Välj var ljudet ska höras*

Tryck på knappen **[Tal]** på fjärrkontrollen (övre vänstra hornet) för att välja om ljudet ska spelas upp i hörlurar eller via TV.

### *Reglera läshastigheten*

Vissa program eller filmer har så omfattande mängd text att läshastigheten på talsyntesen behöver ökas för att Go-box ska hinna med att läsa i synk med bilden.

På vänster sida av fjärrkontrollens nedre halva sitter ett par knappar som reglerar läshastigheten. Tryck på den övre **[speed+]** för att öka och den nedre **[speed-]** för att minska läshastigheten.

### *Reglera ljudet i hörlurarna*

Du kan koppla hörlurar till Go-box antingen via en kabel (3.5mm ingång i USB-adaptern som låg med i förpackningen) eller via blåtand.


På fjärrkontrollens högra sida finns ett par knappar som reglerar volymen på hörlurarna. Tryck på den övre **[volym+]** för att öka och på den nedre **[volym-]** för att minska volymen.

Tips: Balansen mellan den upplästa texten och ljudet från TV'n regleras i menyn Tal-Volym (som är oberoende av volymen i hörlurarna).

## 5 MENY


I Go-box meny gör du dina egna inställningar, vanligtvis en gång. Tryck på knappen **[Meny]** (till vänster om upp-knappen och sedan knappen **[OK]** för att välja mellan:

- Tal
- Profiler
- Wifi
- Blåtand
- Go-box

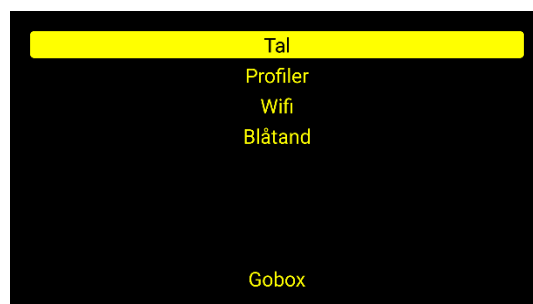

### *Meny - Tal - Volym*

Ljudet på den upplästa textremsan har en volym i förhållande till videons eget ljud. Använd knapparna **[Vänster]** och **[Höger]** för att balansera ljudet dem emellan (t ex 50%). Tryck på knappen **[Meny]** eller **[Bakåt]** för att lämna menyn. Notera: TV'ns originalljud sänks när textremsan läses upp.

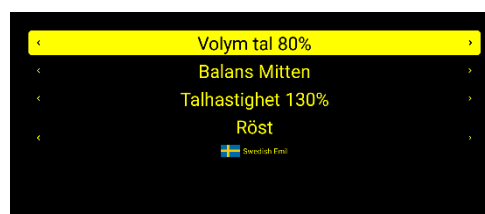




## Meny - Tal - Balans

Rösten som läser upp textremsan kan höras på båda sidor eller enbart i vänster eller höger högtalare/hörlur. Använd knapparna **[Vänster]** och **[Höger]** för att balansera ljudet dem emellan (t ex för att centrera). Tryck på knappen **[Meny]** eller **[Bakåt]** för att lämna menyn.



## Meny - Tal - Lashastighet

Hastigheten på rösten som läser upp textremsan kan höjas eller sänkas beroende på ditt önskemål eller beroende på den hastighet som texten visas på TV'n. Använd knapparna **[Vänster]** och **[Höger]** för att balansera ljudet dem emellan (t ex 120%). Tryck på knappen **[Meny]** eller **[Bakåt]** för att lämna menyn.

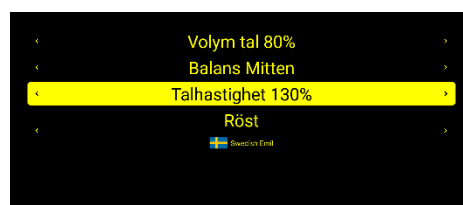

## Meny - Tal - Röst

Rösten som läser upp textremsan kan ändras till en manlig röst istället för den kvinnliga. Använd knapparna **[Vänster]** och **[Höger]** för att välja dem emellan Erik, Elin, Emil och Emma. Tryck på knappen **[Meny]** eller **[Bakåt]** för att lämna menyn.



## Meny - Profiler

På knappen **[Tal]**, längst upp till vänster på fjärrkontrollen, kan du välja mellan att lyssna på textremsan via TV'ns högtalare eller i hörlurar. Båda val har en egen profil, antingen att enbart höra textremsan läsas eller en blandning av den och TV-ljudet.



## Meny – Wifi

Go-box kan anslutas till internet för att bland annat uppdatera sin mjukvara. Det kan du antingen göra via en nätverkskabel direkt till din internetleverantörs router eller genom ett trådlöst nätverk.

Välj ditt nätverk (SSID) i listan och tryck på knappen **[OK]**. Mata in lösenordet (WPA-nyckel).



För att mata in lösenordet (WPA-nyckel): använd knapparna **upp** och **ner**. Listan börjar med alfabetets gemener med a som start, tryck på knappen upp för att fortsätta med b, c, d osv. Därefter följer versaler i samma ordning, sedan specialtecken som utropstecken eller mellanslag och till sist det egna tecknet "Klart". Tryck på knappen **[OK]** eller **[Höger]** när du hittat rätt tecken.



Tryck på knappen **[Bakåt]** eller **[Vänster]** för att rätta ett felaktigt inmatat tecken. För att bekräfta lösenordet, avsluta med "Klart" följt av knappen **[OK]** eller **[Höger]**. Texten '**konfigurerat**' visas bredvid namnet på ditt nätverk. Om du trycker på knappen **[Bakåt]** och väljer Wifi igen ser du om du lyckats (då visas '**uppkopplat**').


Tips: För att koppla ifrån ett nätverk, gå till menyn Wifi och ställ dig på nätverket du vill ta bort och håll inne knappen **[Bakåt]** i 3 sekunder.

### Meny - Blåtand

Se till att din blåtandsenhet är redo för att "upptäckas" (se dess manual). Öppna menyn Blåtand så börjar Go-box söka efter enheter som är redo att kopplas (paras).


Välj önskad enhet och tryck på knappen **[OK]**. Ett meddelande hörs i enheten som säger "... parkopplad". Tryck på knappen **[Meny]** eller **[Bakåt]** för att lämna menyn.

Tips: För att koppla ifrån en blåtandsenhet, gå till menyn Blåtand och ställ dig på enheten du vill ta bort och håll inne knappen **[Bakåt]** i 3 sekunder.

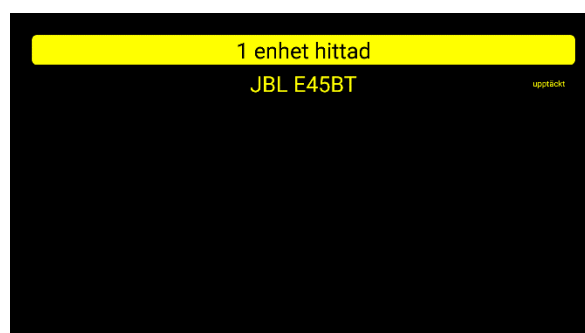

### Meny - Go-box

I Go-box meny visas fakta såsom licensnummer, systeminformation, videokvalitet på din digitalkälla (x1080 helst), mjukvaruversion och serienummer.

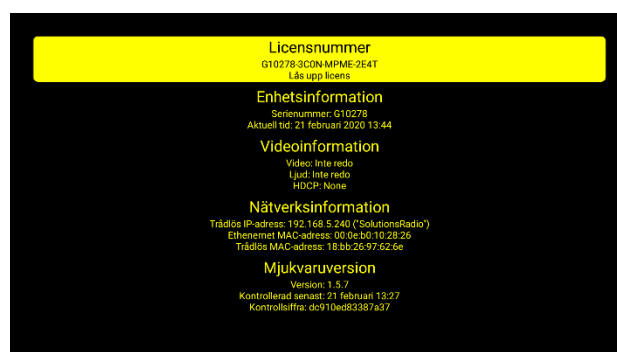

## 6 FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor eller upplever problem med din Go-box, läs igenom svar på vanligt förekommande frågor nedan. Hittar du ingen lösning på ditt problem är du välkommen att kontakta Iris Hjälpmedels produktsupport.

### **Varför läser inte Go-box upp all text på textremsan eller enbart fragment?**

Bildupplösningen på din digital-TV-mottagare kanske inte har rätt inställning. Ställ in upplösningen till 1080p eller 1080 i inställningsmenyn för din mottagare. För information om hur du ställer in din mottagare, konsultera användarmanualen för digital-TV-mottagaren eller kontakta din tjänsteleverantör.

### **Kan jag använda Go-box om jag saknar en extern digital-TV-mottagare eller annan videokälla?**

Go-box fungerar inte om du använder en Smart-TV, eller TV med inbyggd mottagare. Fråga din leverantör efter en extern digital-TV-mottagare, (digitalbox), för samma innehåll.

### **Kan jag använda min hörapparat med Go-box?**

Du kan koppla ihop din hörapparat genom att ansluta en halsslinga till en USB-adapter med 3,5 mm uttag som ansluts till Go-box. Vissa hörapparater kan ansluta till Go-box på samma sätt som blåtandshörlurar.

### **Den gröna lysdioden tänds inte på Go-box när jag sätter på TVn och digital-TV-mottagaren. Vad gör jag?**

Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten. Om ja, kontrollera även att andra enheter som är anslutna till samma eluttag också har ström. Go-box behöver minst en HDMI-kabel ansluten till en aktiv enhet för att visa grönt ljus. Säkerställ att alla enheter är anslutna och påslagna.

### **Jag tittar också på tjänster såsom Netflix eller HBO. Hur fungerar det med Go-box?**

Det enklaste är att be om en digital-TV-mottagare från din leverantör av strömningstjänst. Ett annat alternativ är att starta tjänsten i mobil eller PC och strömma innehållet via chromecast till Go-box. En tredje möjlighet är att koppla en HDMI-kabel direkt mellan Go-box och PC.

### **Hur zappar jag mellan TV-kanalerna?**

Du väljer mellan TV-kanalerna precis som vanligt med fjärrkontrollen till din digital-TV-mottagare. Go-box fortsätter läsa upp textremsan för nästa kanal du väljer.

### **Kan jag använda en leverantör som sänder via satellit i stället för en som har kabel?**

Ja, du kan använda en satellitmottagare så länge som den har en HDMI-utgång med en upplösning på 1080.

### **Go-box läser inte textremsan även om den visas på TVn. Vad gör jag?**

Du kan behöva trycka på talknappen i det övre vänstra hörnet på fjärrkontrollen för att växla mellan TV-ljud eller hörlurar.

### **Varför läser Go-box rappakalja?**

När texten på remsan är kursiv feltolkar Go-box informationen och den uppfattar enstaka bokstäver som siffror istället för ord. Om du tittar via Apple TV, följ inställningarna och ändra teckensnitt.

## 7 SPECIFIKATIONER

### *Nätverk*

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Protokoll      | IPv4 och IPv6                   |
| Ethernet       | 10/100/1000M gränssnitt         |
| Anslutningstyp | RJ45 med kabeldetektering       |
| WLAN/WiFi      | IEEE802.11ac (2.4GHz + 5.0GHz)  |
| Kryptering     | WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS-PB |

### *USB*

1x USB v2.0 höghastighet typ A

1x USB v3.0 höghastighet typ A

### *SD*

1x plats för minneskort (klass 2,4,6) SDSC, SDHC (max. 32GB)

### *HDMI*

HDMI-gränssnittet stöder HDCP v2.0

1x HDMI-ingång + 1x HDMI utgång (för HD, full-HD eller 4K-TV)

### *Hörlurar*

Anslutningstyp 3.5mm mm (via USB-adapter)

Justerbar nivå 2x 100 mW (2x 8 Ohm)

Bluetooth v4.2 Klass2, A2DP profil

### *Allmänt*

Ström 5.0V-2A (1.3x3.5mm nätanslutning)

100-240 V, 50-60 Hz adapter inkluderad

Fjärrkontroll 13 knappar, 140x49x20mm, 2xAAA-batterier

Driftstemperatur -10°C to +40°C

Förvaringstemperatur -20°C to +60°C

Mått 100x106x28 mm

Vikt 204g

Godkänd CE, FCC

# Gobox

v009 original published February 2020  
subject to any changes



SolutionsRadio Ltd  
Kalfjeslaan 38  
2623AJ Delft  
The Netherlands  
Tel: +31 15 262 59 55  
Fax: +31 15 257 15 95  
E-mail: [info@go4tv.nl](mailto:info@go4tv.nl)  
URL : [www.go4tv.nl](http://www.go4tv.nl)

© Copyright 2018

No part of this publication may be reproduced and/or made public by means of printing, photocopying, microfilm or any other way without a prior written permission from SolutionsRadio ([www.solutionsradio.com](http://www.solutionsradio.com)).

SolutionsRadio reserves the right to alter the publication at any time, without prior notice.

The most recent version of this document can be found at [go4tv.nl](http://go4tv.nl).  
voice enabled by Acapel