

## ÖVERSIKT – Plectalk PTN2 med

### tangentbordsöverlägg

Detta dokument beskriver huvudfunktionerna som behövs för att hantera spelaren. Diagrammen är märkta med nummer som hänvisar till texten nedan.

#### 1. Ansluta Plectalk PTN2 till ett strömuttag

Sätt in den lilla runda kontakten i slutet på strömadaptern i baksidan på enheten (1). Försäkra dig om att den medföljande strömkabeln är ordentligt ansluten till strömadaptern innan du ansluter det till ett vägguttag.

#### 2. Ström på/av

Tryck ner och håll inne Strömknappen av/på (2) för att slå på spelaren.

Tryck ner och håll inne Strömknappen av/på (2) igen för att slå av spelaren.

#### 3. Sätt in spelbart media

Skiva, sätt in skivan i CD-läsarens springa (3) i framkanten på enheten tills skivan dras in automatiskt. Sätt in SD-kortet i kortplatsen (4) på enhetens vänstra kant.

USB-minne, sätt USB-minnet i USB-kontakten (5) på vänster sida av enheten.

#### 4. Ta ut spelbart media

Skiva, tryck på knappen Mata ut (6) för att ta ut en skiva, skivan kommer att matas ut automatiskt.


SD-kort, tryck in SD-kortet tills det poppar ut.

USB-minne, dra ut USB-minnet rakt från enheten.


#### 5. Uppspelning och stopp

För att påbörja uppspelningen, tryck på knappen Start/Stopp (7).

För att stoppa uppspelningen, tryck på knappen Start/Stopp (7) igen.

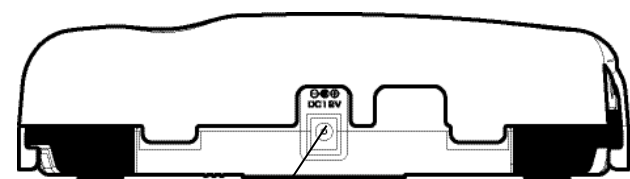


(1) Strömkontakt

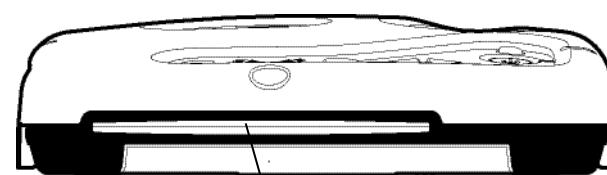


(3) CD-läsare

(5) USB-anslutning (17) Hörlursuttag (4) SD-kortplats

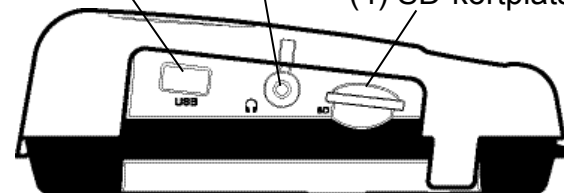

Högtalare

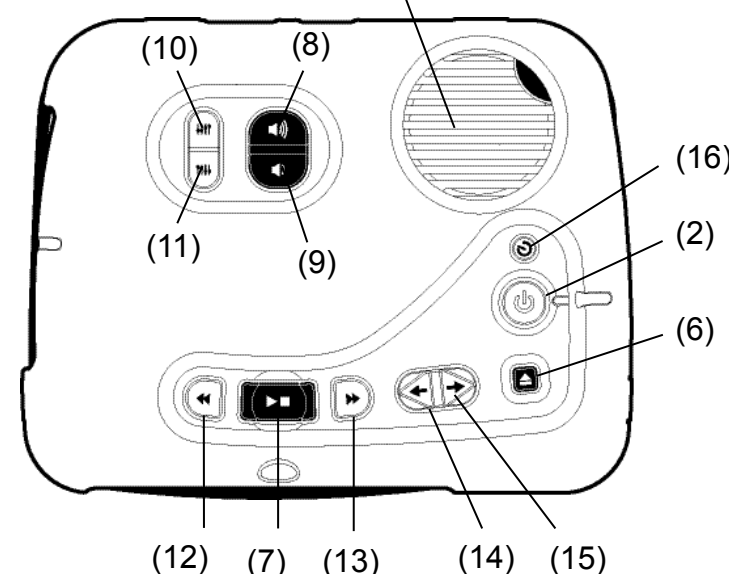

#### 6. Justera volym och tonläge

Volym, tryck på knappen Volym upp (8) för att öka, tryck på knappen Volym ner (9) för att minska.

Tonläge, tryck på knappen Tonläge upp (10) för att öka, tryck på knappen Tonläge ner (11) för att minska.

#### 7. Spolar bakåt/framåt

Tryck ner och håll inne knappen Bakåt (12) för att spola tillbaka.

Tryck ner och håll inne knappen Framåt (13) för att spola framåt.

#### 8. Välj media och bok

Tryck ner knappen Föregående bok (14) och Nästa

bok (15) samtidigt tills du hittat önskat media. Tryck sedan på knappen Föregående bok (14) eller Nästa bok (15) för att välja en bok.

#### 9. Ställ in automatisk avstängning

Tryck på knappen Automatisk avstängning (16) tills du når den önskade inställningen.

#### 10. Använda hörlurar

Sätt in hörlurskontakten i hörlursutgången (17).

#### 11. Systeminformation

Håll inne knappen Start/Stopp (7) så läser spelaren upp systemversion och serienummer.



SHINANO KENSHI  
CO.,LTD.

<http://www.plectalk.com/>

2009 Februari 127-3969901

**iris**  
hjälpmedel

Iris Hjälpmedel AB

S-122 33 Enskede, Besök: Sandborgsvägen 52

Daisysupport: 08-39 94 00, välj produktförfrågan

[www.irishjalpmedel.se](http://www.irishjalpmedel.se)

## ÖVERSIKT – Plectalk PTN2

Detta dokument beskriver huvudfunktionerna som behövs för att hantera spelaren. Diagrammen är märkta med nummer som hänvisar till texten nedan.

### 1. Ansluta Plectalk PTN2 till ett strömuttag

Sätt in den lilla runda kontakten i slutet på strömadaptern i baksidan på enheten (1). Försäkra dig om att den medföljande strömkabeln är ordentligt ansluten till strömadaptern innan du ansluter det till ett vägguttag.

### 2. Ström på/av, automatisk avstängning

Tryck ner och håll inne Strömknappen av/på (2). Tryck på knappen Automatisk avstängning (3) tills du når den önskade inställningen.

### 3. Sätt in spelbart media

Skiva, sätt in skivan i CD-läsarens springa (4) i framkanten på enheten tills skivan dras in automatiskt. Sätt in SD-kortet i kortplatsen (5) på enhetens vänstra kant. USB-minne, sätt USB-minnet i USB-kontakten (6) på vänster sida av enheten.

### 4. Ta ut spelbart media


Skiva, tryck på knappen Mata ut (7) för att ta ut en skiva, skivan kommer att matas ut automatiskt. SD-kort, tryck in SD-kortet tills det poppar ut. USB-minne, dra ut USB-minnet rakt från enheten.

### 5. Uppspelning och stopp



För att påbörja uppspelningen, tryck på knappen Start/Stopp (8). För att stoppa uppspelningen, tryck på knappen Start/Stopp (8) igen.

### 6. Justera volym, hastighet och tonläge

Volym, tryck på knappen Volym upp (9) för att öka, tryck på knappen Volym ner (10) för att minska. Hastighet, tryck på knappen Hastighet upp (11) för att öka, tryck på knappen Hastighet ner (12) för att minska. Tonläge, tryck på knappen Tonläge upp (13) för att öka, tryck på knappen Tonläge ner (14) för att minska.

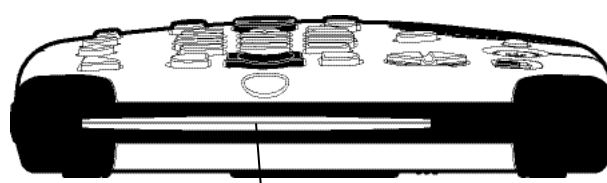

(4) CD-läsare

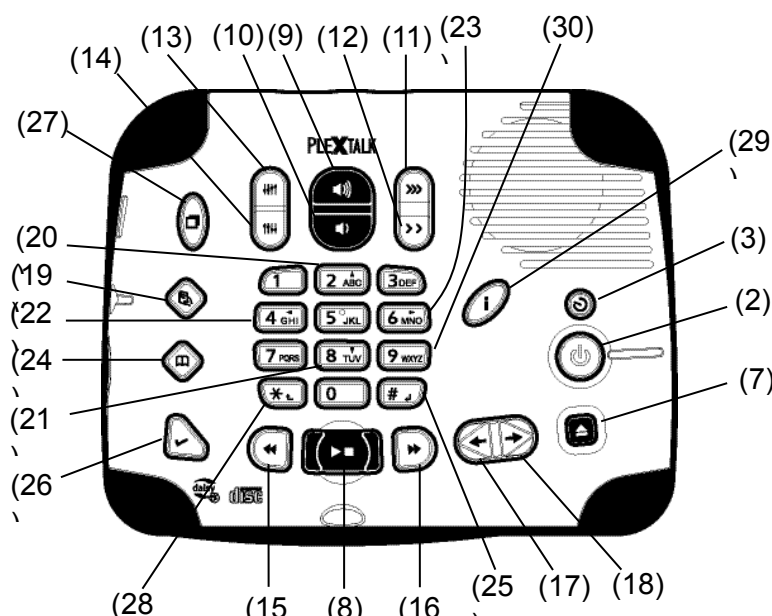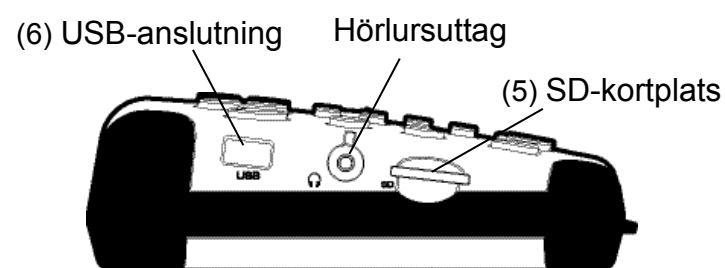

### 7. Spola bakåt/framåt

Tryck ner och håll inne knappen Bakåt (15) för att spola tillbaka. Tryck ner och håll inne knappen Framåt (16) för att spola framåt.

### 8. Välj media och bok

Tryck ner knappen Föregående bok (17) och Nästa bok (18) samtidigt tills du hittat önskat media. Mediaknappen (19) kan också användas för att byta media med en tryckning. Tryck sedan på knappen Föregående bok (17) eller Nästa bok (18) för att välja en bok.

### 9. Flytta efter nivå (bokmärke)

Tryck på knapp 2 (20) eller knapp 8 (21) för att välja navigationsnivå (bokmärke) och tryck på knapp 4 (22) eller knapp 6 (23) för att flytta på den valda nivån (bokmärke).

### 10. Hoppa direkt till sida/rubrik

Sida, tryck på knappen Gå till (24) en gång och skriv in sidnumret med sifferknapparna, tryck sedan Enter (25) för

att gå till sidan.

Rubrik, tryck på knappen Gå till (24) två gånger och skriv in rubriknumret med sifferknapparna, tryck sedan Enter (25) för att gå till rubriken.

### 11. Hoppa direkt till ett bokmärke / lägg in ett bokmärke

Tryck på Bokmärkesknappen (26) en gång och skriv in bokmärkesnumret med sifferknapparna, tryck sedan Enter (25) för att gå till bokmärket.

Tryck på Bokmärkesknappen (26) två gånger och skriv in bokmärkesnumret med sifferknapparna, tryck sedan Enter (25) för att lägga in ett bokmärke.

### 12. Välja i menyn

Tryck på Menyknappen (27) och tryck på knapp 4 (22) eller knapp 6 (23) för att välja meny, tryck sedan på Enter (25) för att bekräfta eller knappen Avbryt (28) för att avbryta.

### 13. Få bokinformation


Tryck på Informationsknappen (29) för att få bokinformation.

### 14. Flytta en bok från ett media till ett annat media

Välj först boken som du vill flytta. Tryck på knapp 9 (30) för att komma åt flyttfunktionen och tryck på knapp 4 (22) eller knapp 6 (23) för att välja målmedia, tryck sedan Enter (25) för att bekräfta. Plectalk frågar om du vill fortsätta eller inte. Tryck på Enter (24) för att fortsätta eller knappen Avbryt (28) för att avbryta.

### 15. Systeminformation

Håll inne knappen Start/Stopp (7) så läser spelaren upp systemversion och serienummer.

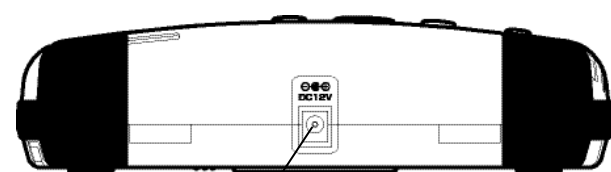

(1) Strömkontakt

**iris**  
hjälpmedel

Iris Hjälpmedel AB

S-122 33 Enskede, Besök: Sandborgsvägen 52

Daisysupport: 08-39 94 00, välj produktförfrågan

[www.irishjalpmedel.se](http://www.irishjalpmedel.se)