

Manual Timglaset TimeFlex



En unik nedräkningstimer inom familjen Timglas

Art nr 55046

Se vår hemsida

Sammanfattning

Timglaset TimeFlex är en nedräkningstimer med fem individuellt programmerbara larm, 1 – 999 minuter. Bygg din egen struktur.


Fronten

På fronten finns 5 olikfärgade knappar, kallade aktivitetsknappar. Till vänster om dessa en orangefärgade lampor, kallade nyckellampor. Längst till vänster på fronten finns en ljusstapel med gröna ledljus, kallad tidsstapel. Högst upp på fronten finns ett fönster, kallad sifferfönster, för tidsangivelse i minuter, 1 – 999 minuter.

Till höger om de färgade knapparna finns utrymme för etiketter och/eller bilder med instruktioner och/eller symboler för aktiviteter.


Höger sida (sett framifrån)

- Omställare för vibration på/av (on/off).
- Uttag för extern hörsnäcka/hörlur, 3,5 mm kontakt. Snäcka medföljer.

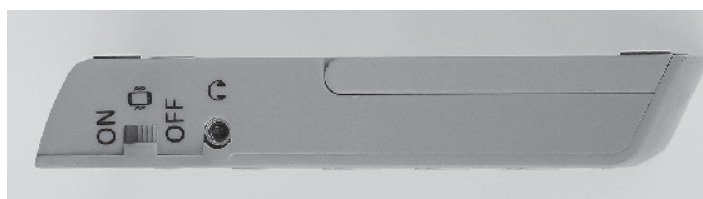

Baksidan

- Baksidan 5 olika inställningsknappar. På vänstra sidan sortera upp eller ned samt OK i mitten. På höger sida + och -. Batterifack för 3 AA standardbatterier (LR06).
- Utfällbart stativ (svart) gör att TimeFlex kan stå upprätt på bordet. Stativet är mjukt och kan avlägsnas och sättas tillbaka med snäppfästet.
- Fyra magneter gör att TimeFlex kan fästas på en metallyta, t.ex. kylskåpsdörr, Whiteboard eller annan planeringstavla (t.ex. Iris NAGA-plan).

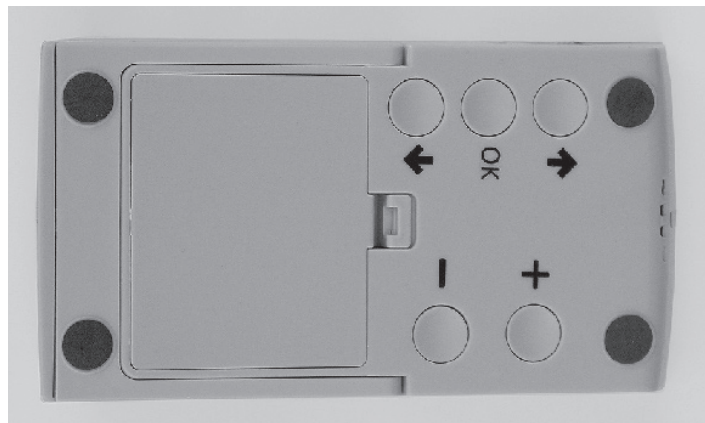

Ovansida (kortsida)

- Uttag för bär- och/eller halsrem (medföljer).

Programmering av aktivitetsknappar

- Håll inne BÅDE sortera upp- och nedknappen samtidigt i några sekunder. Ljuset i sifferfönstret tänds och de orangefärgade nyckellamporna börjar att blinka.
- Välj någon av aktivitetsknapparna. Vald nyckellampa slutar att blinka och i sifferfönstret anges senast lagrade inställning (första gången visas 000).
- Välj tidsinställning genom att trycka på Sortera upp eller sortera ned för att finna korrekt tidmängd. Genom att hålla knappen nedtryckt bläddrar tiden vidare.
- Bekräfta vald tid genom att trycka på OK. Alla lampor börjar blinka och sifferfönstret nollställs. Du kan nu fortsätta att programmera de andra aktivitetsknapparna på samma sätt. Du kan kontrollera inställd tid genom att trycka på vald aktivitetsknapp.
- Vill du avsluta och låsa programmeringen här så håller du in BÅDE sortera upp- och nedknappen samtidigt i några sekunder. Därefter slocknar alla lampor och sifferfönstret. Om du inte väljer aktivt att avsluta och låsa så sker detta automatiskt efter ca 60 sekunder.
- Viktigt! Innan vi ger TimeFlex till en brukare så ska inställningsläget vara avslutat. Detta för att förhindra att inställningar ändras oavsiktligt.

Driftläge

- TimeFlex startar upp när någon aktivitetsknapp valts med fingertryck två gånger, ett aktiverar och nästa startar.
- Vid första knapptryckningen tänds nyckellampan för att förtydliga att rätt aktivitet valts samt att inställd tid visas i

tidsfönstret. Du kan också bläddra mellan knappar innan du aktiverar nedräkning.

- Vid en andra tryckning aktiveras nedräkningen och den gröna ledstapeln tänds.
- **VIKTIG INFORMATION!** Ledstapeln visar ALLTID 100 % av vald tidsrymd och sjunker proportionellt med nedräkningen i sifferfönstret. Det är viktigt att kombinera numerisk nedräkning av tid med korresponderande "mängd" i annat format.
- 10 sekunder innan aktiviteten är slut börjar alla lampor att blinka för att signalera avslut. Larmet kan avslutas med eller utan ljud/vibration.
- När aktiviteten avslutas slocknar TimeFlex helt får att åter aktiveras genom att aktivitetsknapp väljs.
- Önskas en pågående aktivitet avbrytas trycker man med ett finger på aktuell aktivitetsknapp ca 5 sek.

Ställ in volym

- Håll inne BÅDE volymknappen + och – i ca 5 sekunder för att komma till inställningsläge.
- Tryck sedan på antingen + eller – för att höja alternativt sänka alarmvolymen. Det finns 5 lägen varav det lägsta är helt tyst.
- Tryck sedan på BÅDE volymknappen + och – i ca 5 sekunder för att låsa valt volymläge. Om ingen låsning sker aktivt så låser sig FlexTime automatisk efter ca 60 sekunder.

Vibration

- Välj på eller av (on/off) via omställaren på höger sida.

Ljudlöst Larm

- Stäng av vibrationslarm och vrid ned volym till 0.

Hörsnäcka/Hörlur

- Vid anslutning av hörsnäcka eller hörlur tystnar externt larm per automatik.

Övrig produktdata

- TimeFlex levereras med bärrem, hörsnäcka, batterier samt manual.
- TimeFlex rengörs enklast med en fuktig trasa, gärna med ett biologiskt nedbrytningsbart rengöringsmedel.
- TimeFlex väger 120 gram utan batterier, 190 gram med batterier.
- TimeFlex i transportförpackning väger 390 gram.
- TimeFlex är CE-märkt enligt MDR Klass 1.



Timglaset TimeFlex är utvecklad av iris Hjälpmedel tillsammans med det svenska teknikföretaget ViTech. Denna timer ingår i en familj med smarta nedräkningstimers som heter Timglasen. I serien finns den talande nedräkningstimern Timglaset Carina som arbetar enligt kvartsursprincipen och är omställningsbart mellan 20, 40 och 60 minuter. Timglaset Martina fungerar likadant men saknar talfunktion. Läs mer på;

www.irishjalpmedel.se

Miljöinformation

Timglaset TimeFlex uppfyller kraven för RoHS3, vilket innebär att inga skadliga ämnen finns i material och komponenter.

Vid destruktion ska denna produkt lämnas till insamling för elektronik alternativt återlämnas till försäljningsstället eller Iris Hjälpmedel.

Lösa batterier lämnas i batteriholk eller till återvinningsstation.