


1. Knappbeskrivning med tangentbordsöverlägg standard

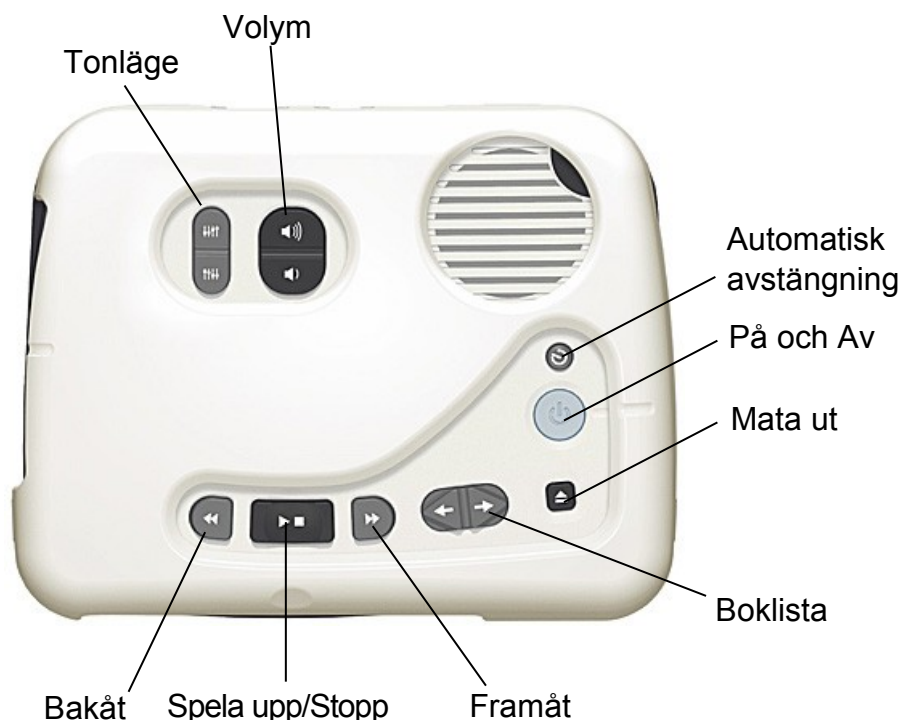

2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2

- Uppe i höger nedsänkning är högtalaren placerad.
- Under högtalaren finns fyra knappar: Automatisk avstängning, På och av, Mata ut och Boklista.
- I övre vänstra nedsänkningen finns Tonläges- och Volymknappen.
- I nedre nedsänkningen finns knapparna Bakåt, Spela upp/Stopp och Framåt (från vänster till höger räknat).
- På baksidans mitt finns anslutning för strömkabel.
- På spelarens vänsterkant finns tre anslutningar: för SD-kort, hörlurar och USB-minne.
- På spelarens framkant finns öppningen för Daisy/ CD-skiva.

3. Knappbeskrivning

- **Automatisk avstängning:** För att ställa tid för automatisk avstängning. Upprepa knapptryck flera gånger för att ställa in tid från 15 minuter till 1 timme.
- **På och Av:** Sätter på eller stänger av PTN2 genom att hålla knappen nedtryckt i ca 2 sekunder.
- **Mata ut:** För att mata ut Daisy/ CD-skiva.



- **Boklista:** Här kan du växla mellan dina böcker. Tryck på höger halva för att gå till nästa bok, eller vänster halva för att gå till föregående bok. Trycker du ner både höger och vänster samtidigt kan du växla mellan media: skiva, USB-minne och minneskort.
- **Tonläge:** Tryck på övre delen för högre tonläge och den nedre för lägre tonläge.
- **Volym:** Tryck på övre delen för ökad volym och den nedre för minskad volym.
- **Bakåt:** Tryck kort på knappen för att gå tillbaka en fras i en Daisybok, det föregående spåret i en ljudfil eller det föregående stycket i en textfil. Tryck och håll nere knappen för snabbspolning bakåt.
- **Spela upp/Paus/Stopp:** För att påbörja, pausa och stoppa uppspelningen. Håller du knappen intryckt länge får du bl a information om systemversion.
- **Framåt:** Tryck kort på knappen för att gå till nästa fras i en Daisybok, det nästa spåret i en ljudfil eller det nästa stycket i en textfil. Tryck och håll nere knappen för snabbspolning framåt.



4. Exempel


Uppspelning av Daisybok från skiva

- Sätt in skivan i spelarens framkant.
- Tryck på Spela upp/Stopp för att börja lyssna.
- Tryck på Spela upp/Stopp för att pausa eller stoppa uppspelningen.
- Tryck och håll nere Framåt för att spola framåt.
- Tryck och håll nere Bakåt för att spola tillbaka.




Spela upp ljud

- Tryck på vänster eller höger halva av boklisteknappen för att välja ljud, tryck därefter på Spela upp/Stopp. Använd Bakåt eller Framåt för att välja spår.

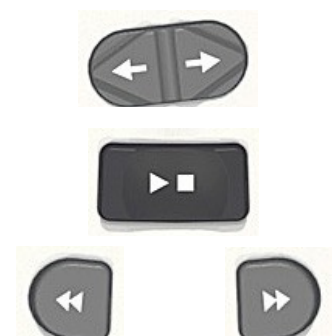

5. Knappbeskrivning utan lock

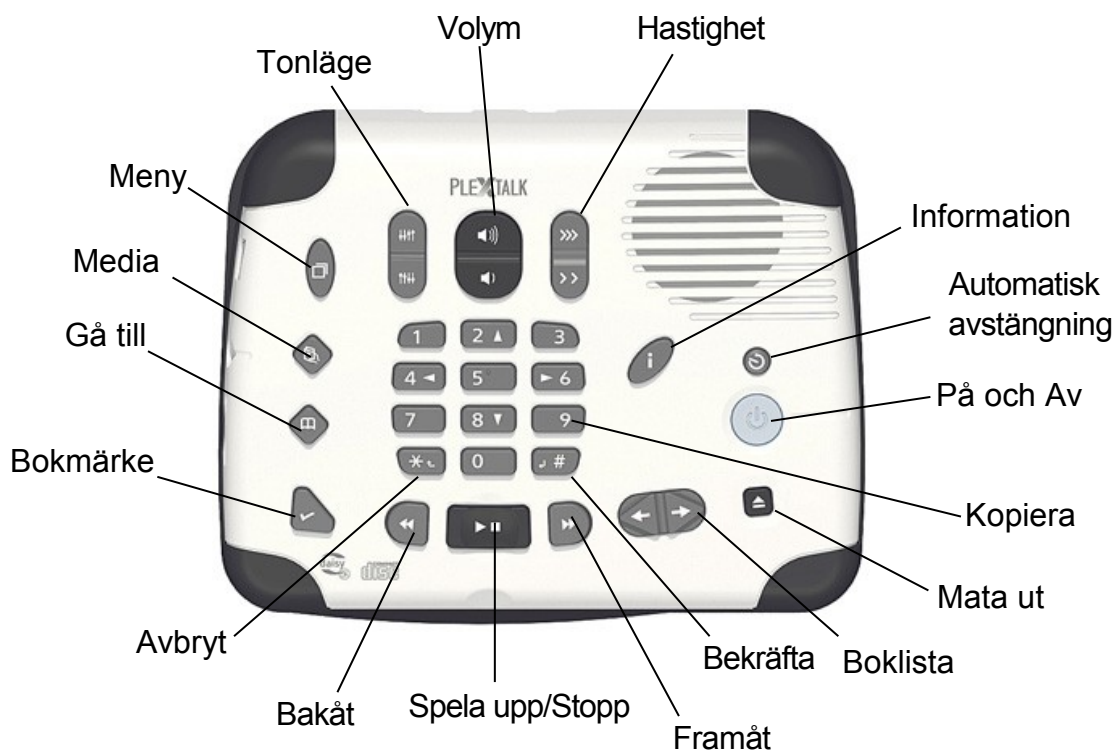

6. Beskrivning av PLEXTALK PTN2

- Uppe till höger är högtalaren placerad.
- Under högtalaren finns fem knappar: Information, Automatisk avstängning, På och av, Mata ut och Boklista.
- Överst från vänster till höger finns Tonläges- Volym- och Hastighetsknappen.
- Sifferknapparna finns i centralt i mitten, inklusive stjärna (*) och fyrkant (#).
- Under sifferknapparna finns Bakåt, Spela upp/Stopp och Framåt (från vänster till höger räknat).
- På vänster sida finns fyra knappar: Meny, Media, Gå till och Bokmärke.
- På baksidans mitt finns anslutning för strömkabel.
- På spelarens vänsterkant finns tre anslutningar: för SD-kort, hörlurar och USB-minne.
- På spelarens framkant finns öppningen för Daisy/ CD-skiva.

7. Knappbeskrivning

- **Automatisk avstängning:** För att ställa tid för automatisk avstängning. Upprepa knapptryck flera gånger för att ställa in tid från 15 minuter till 1 timme.
- **På och Av:** Sätter på eller stänger av PTN2 genom att hålla knappen nedtryckt i ca 2 sekunder.
- **Mata ut:** För att mata ut Daisy/ CD-skiva.
- **Information:** Ger dig bland annat information om batterinivå, aktuell titel, information om var på spelaren du är.



- **Boklista:** Här kan du växla mellan dina böcker. Tryck på höger halva för att gå till nästa bok, eller vänster halva för att gå till föregående bok. Trycker du ner både höger och vänster samtidigt kan du växla mellan media: skiva, USB-minne och minneskort.
- **Tonläge:** Tryck på övre delen för högre tonläge och den nedre för lägre tonläge.
- **Volym:** Tryck på övre delen för ökad volym och den nedre för minskad volym.
- **Hastighet:** Tryck på övre delen för ökad hastighet och den nedre för minskad hastighet.
- **Knapp 9:** För att kopiera från skiva, minneskort eller USB till minneskort eller USB. Välj först en titel och kopiera till valt media.
- **Knapp 0:** För att aktivera hjälpfunktionen. Det är den inbyggda manualen som kan läsas upp och navigeras som en Daisybok.
- **Avbryt:** Tryck på stjärna (*) när du vill avbryta olika val som sektion i bok, bokmärke, menyalternativ och så vidare.
- **Bekräfta:** Tryck på fyrkant (#) när du vill bekräfta olika val som sektion i bok, bokmärke, menyalternativ och så vidare.
- **Bakåt:** Tryck kort på knappen för att gå tillbaka en fras i en Daisybok, det föregående spåret i en ljudfil eller det föregående stycket i en textfil. Tryck och håll nere knappen för snabbspolning bakåt.
- **Spela upp/Paus/Stopp:** För att påbörja, pausa och stoppa uppspelningen. Håller du knappen intryckt länge får du bl a information om systemversion.
- **Framåt:** Tryck kort på knappen för att gå till nästa fras i en Daisybok, det nästa spåret i en ljudfil eller det nästa stycket i en textfil. Tryck och håll nere knappen för snabbspolning framåt.
- **Meny:** Du kan välja mellan Uppspelningsinställningar, Överhoppningsbara, Hantera lagringsmedia och Systeminställningar. Håll nere knappen för att aktivera knappbeskrivningen.
- **Media:** För att växla mellan olika media, skiva, minneskort eller USB.
- **Gå till:** För att gå direkt till en sida eller sektion i en bok eller till spår i ett album (ljud) eller procent i en text.
- **Bokmärke:** Tryck en gång för att gå till bokmärke. Tryck två gånger för att lägga in bokmärke. Tryck tre gånger för att ta bort ett bokmärke.



8. Exempel

Uppspelning av Daisybok från skiva

- Sätt in skivan i spelarens framkant.
- Tryck på Spela upp/Stopp för att börja lyssna.
- Tryck på Spela upp/Stopp för att pausa eller stoppa uppspelningen.
- Tryck och håll nere Framåt för att spola framåt.
- Tryck och håll nere Bakåt för att spola tillbaka.
- Tryck på 2 eller 8 för att välja navigationsnivå, därefter 4 eller 6 för att gå bakåt eller framåt inom vald nivå.



Spela upp ljud

- Tryck på vänster eller höger halva av boklisteknappen för att välja ljud, tryck därefter på Spela upp/Stopp. Använd Bakåt eller Framåt för att välja spår.
- Du kan också gå direkt till ett album eller spår. Tryck på Gå till, sedan på 7 och därefter på Spela upp/Stopp för att spela upp spår 7 i ett album.



Läsa upp text, .txt fil eller MS Word .doc fil

- Kopiera filen från dator till SD-minneskortet.
- Välj textfil med Boklisteknappen.
- Tryck på Spela upp/Stopp för att läsa upp filen.
- Talsyntesen läser upp filen. Det gör du med någon av de två röster som finns i spelaren. Röst väljer du i menyns Systeminställningar.
- Du kan navigera i filen per mening, ord, tecken osv. med hjälp av de olika pilknapparna 2, 4, 6 eller 8.



Kopiera från SD-minneskort till USB-minne

- Anslut USB-minnet till spelaren.
- Välj den titel på SD-minneskortet du vill kopiera.
- Tryck på 9 för att påbörja kopieringen. Följ röstguidens instruktioner.



Kopiera från USB-minne eller skiva till SD-minneskort

- Välj USB-minnet eller skiva med knappen Media.
- Välj titel på USB-minnet eller skivan.
- Tryck på 9 för att påbörja kopieringen till SD-minneskortet och följ röstguidens instruktioner.



9. Menstruktur

UPPSPELNINGINSTÄLLNINGAR (Daisy och text):

Läser namn på ljudfil
Inställning för slumpmässig upprepning

UPPSPELNINGINSTÄLLNINGAR (ljud):

Standarduppspelning
Upprepa spår
Upprepa album
Upprepa alla album
Upprepa slumpvis uppspelning

ÖVERHOPPNINGSBARA:

Välj sidnummer
 Spela
 Hoppa över
Välj fotnot
 Spela
 Hoppa över
Välj anteckningsreferens
 Spela
 Hoppa över
Välj kommentar
 Spela
 Hoppa över
Välj radnummer
 Spela
 Hoppa över
Välj sidofält
 Spela

Hoppa över
Välj producentanteckning
Spela
Hoppa över

HANTERA LAGRINGSMEDIA:

Bokinformation för lagringsmedia
Radera alla filer på SD-kortet
Radera markerad bok (album).

SYSTEMINSTÄLLNINGAR:

Systemegenskaper
 Systemversion
 Serienummer
Välj guidevolym
Välj talsyntes
 Röst 1
 Röst 2
Välj vänteljud
 Vänteljud 1
 Vänteljud 2
 Inget vänteljud
Ställ in datum och tid
Inställning av tonhöjd för talsyntes
Återställa till grundinställningar

SHINANO KENSHI CO., LTD.

<http://www.plextalk.com/>

2009/11 127-4305900

Som kund hos Iris Hjälpmedel har du tillgång till vår Daisysupport på telefon 08-39 94 00, välj produktförfrågan eller produktsupport@irishjalpmedel.se.

Iris Hjälpmedel AB
S-122 33 Enskede, Besök: Sandsborgsvägen 52
Telefon: 08-39 94 00
www.irishjalpmedel.se