

mobilux® LED


Bruksanvisning



Eschenbach Optik GmbH
Fuerther Strasse 252 | 90429 Nuremberg | Germany

For the authorized representative in your country please refer to:
www.eschenbach-optik.com

 **ESCHENBACH**

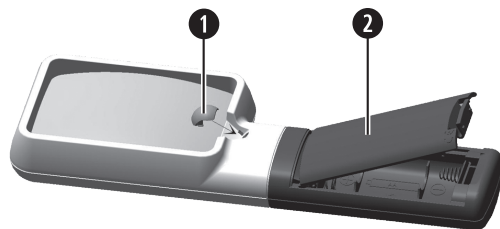

Tekniska Data

	Ø	🔍	🔑 ← 📏
15122	90 × 54 mm	8,0 dpt / 3 ×	250 mm
15112	60 mm	12,0 dpt/3,0×	250 mm
15113	75 × 50 mm	10,0 dpt/3,5×	250 mm
15114	75 × 50 mm	16,0 dpt/4,0×	180 mm
151141	60 mm	16,0 dpt/4,0×	150 mm
15115	58 mm	20,0 dpt/5,0×	140 mm
15116	58 mm	24,0 dpt/6,0×	100 mm
15117	35 mm	28,0 dpt/7,0×	60 mm
151110	35 mm	38,0 dpt/10,0×	40 mm
151112	35 mm	50,0 dpt/12,5×	40 mm

Svenska

Inledning

Du har just köpt en märkesprodukt från företaget Eschenbach som tillverkats med de modernaste metoder i Tyskland. Läs igenom den här anvisningen noga innan du använder produkten första gången och sätt dig in i alla dess funktioner. mobiluxLED ska användas som ett synhjälpmedel som förstörar bild och text.

Föreskriven användning

Den här produkten ska endast användas för att förstora text, bilder och små detaljer.

Säkerhetsanvisningar

- ▶ **Den här produkten är ingen leksak! Låt inte barnen handskas med den utan att någon håller uppsikt!**
 - ▶ **Kvävningsrisk! Den här produkten innehåller smådelar som kan sväljas och fastna i halsen!**
 - ▶ **Brandrisk! Linser i optiska apparater kan fungera som brännglas och orsaka stora skador om de hanteras och förvaras på fel sätt! Lagg aldrig oskyddade optiska linser i solen!**
 - ▶ **Risk för bländning och personsador! Titta aldrig rakt in i solen eller andra starka ljuskällor med optiska instrument! Titta inte rakt in i ljuskällan på undersidan av höljet!**
- Riskgrupp 1 enl. EN 62471.**



- ▶ **Skydda apparaten från stötar och slag, fukt och alltför hög värme. Lägg aldrig produkten på värmeelement eller i solen!**
- ▶ **Kontrollera batterierna regelbundet. Läckande batterier kan orsaka skador på produkten och irritera huden.**
- ▶ **Ta ut batterierna ur batterifacket så snart de laddats ur och om du inte ska använda produkten under en längre tid.**
- ▶ **Utsätt aldrig mobiluxLED för väta!**
- ▶ **Gör andra personer - i synnerhet barn - uppmärksamma på riskerna!**
- ▶ **Det här är en medicinsk produkt i Klass I (inte steril, utan mätfunktion) som uppfyller kraven enligt EU-förordning 2017/745. Om produkten används utanför EU ska de bestämmelser som gäller i respektive land följas.**

Ta produkten i drift

För att läsytan ska bli jämnt belyst är mobiluxLED utrustad med en högeffektiv diodlampa som drivs med 2 batterier (av typ AA/LR6). Batterierna måste läggas in innan produkten kan användas första gången.

1. Öppna locket till batterifacket (❷).
2. Lägg in de 2 batterierna med polerna så som visas i facket. Om polerna ligger fel kommer produkten inte att fungera.
3. Stäng batterifacket igen.

Använda mobiluxLED

Du kan använda mobiluxLED tillsammans med dina läsglasögon.

1. Håll mobiluxLED med linsen rakt över den text som ska förstoras.
2. Det optimala resultatet får du om du håller mobiluxLED på det avstånd som anges för den förstoring du använder. Det här värdet (i mm) finns i kapitel Technische Daten / Technical Data / Caractéristiques techniques på sidan 3,  (Avstånd mellan lupp och öga) eller på mobiluxLED brytare.
3. Tänd belysningen genom att flytta brytaren (❸) mot linsen (❹). Om du vill ha en kraftigare belysning kan du sätta på ett av de transparenta filterskydden (❶) - av de 3 filterskydd som ingår i leveransen - så som visas på bilden till vänster på sidan 3.
4. Släck belysningen när du är färdig genom att flytta brytaren (❸) från linsen (❹).

Observera: Om ljuset fladdrar är batterierna urladdade och måste bytas ut. Gå tillväga så som beskrivs i kapitel Ta produkten i drift.

Om du tycker att ljusets färg är obehaglig kan du sätta ett av de medföljande filterskydden (❶, orange eller gult) över lampan, så som visas på den övre bilden på sidan 3.

För att skydda linsen får du också ett etui till din mobiluxLED. Om du vill hänga mobiluxLED runt halsen eller handleden kan du använda öglan på handtagsdelen för att trä in en lanyard som kan köpas som extra alternativ. (Art.nr. 15981).

Skötsel

- Använd inte tvålösning som innehåller mjukgörare, alkohol, organiska lösningsmedel eller slipande medel för att rengöra mobiluxLED! Då kan linserna förstöras!
- Rengör inte mobiluxLED i ultraljudsbad eller under rinnande vatten!
- Rengör endast mobiluxLED med en mjuk, luddfri duk (t ex den du använder till glasögonen). Grövre smuts (t ex fingeravtryck) tar du bort genom att fukta duken en aning.

Kassering

- Den här produkten omfattas av det europeiska WEEE-direktivet om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter i dess aktuella version. Kasta inte produkten i hushållssoporna, utan lämna in den till ett godkänt återvinningsföretag eller till din kommunala avfallsanläggning. Följ de bestämmelser som gäller i landet. Kontakta din avfallsanläggning om du har några frågor. Lämna in allt förpackningsmaterial till miljövänlig återvinning.
- Batterier får inte slängas bland hushållssoporna eller eldas upp, utan måste kasseras enligt lokala bestämmelser för farligt avfall. Lämna in produkten till ett insamlingsställe i närheten.



Garanti

Inom ramarna för de lagstadgade bestämmelserna lämnar vi en garanti som täcker fabrikations- eller materialfel på den produkt som beskrivs här. Garantin gäller inte för skador som är ett resultat av felaktig behandling, stötar eller för att produkten fallit i golvet. Garantiförmåner kan endast utnyttjas mot uppvisande av inköpskvitto!