

Manual

PennyTalks


Organisera din vardag med ljud
Din personliga etikettläsare

Snabb guide:


- Fäst etiketten på önskad plats
- Spela in ditt personliga meddelande via mikrofon eller via PC
- Håll PennyTalks mot etiketten för att lyssna på din inspelning

1

Framsida

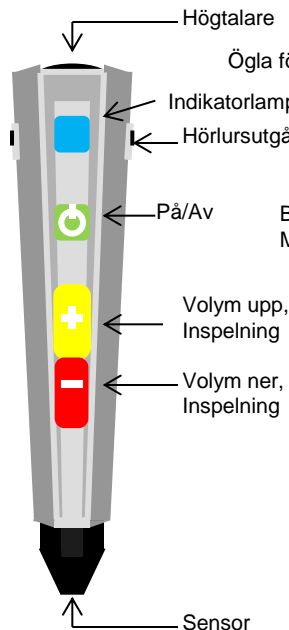


Baksida

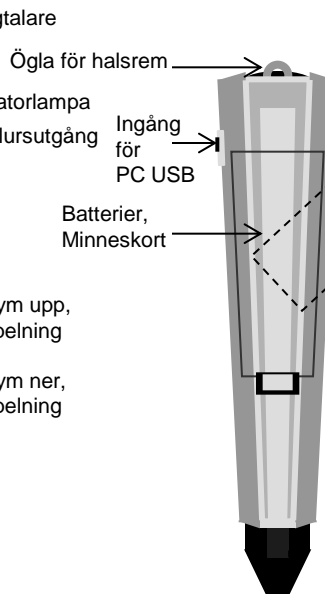

2

Minneskortet är placerat under batterierna:

Alla röstinspelningar sparas på ett minneskort (micro SD). Om produkten går sönder kan minneskortet enkelt flyttas över till en ny PT. Via USB-kabel kan du enkelt spara en backup på din dator eller lägga in ljudfiler.

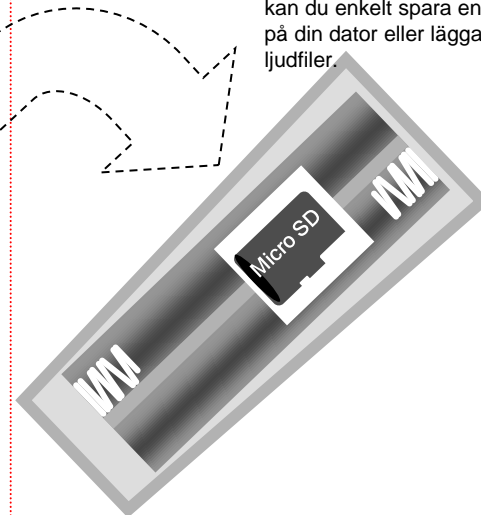

3

Välj språk för talstödet:

PennyTalks levereras med ett språkvalskort där du kan välja mellan 6 olika språk och en inställning där man enbart får en signal-feedback istället för tal.

1. Starta PennyTalks genom att hålla På/Av (gröna) knappen inne i 3 sekunder.
2. Håll pennan mot det språk du önskar använda.
3. PT talar nu om vilket språk du valt.

4

Sätta på/Stänga av:

Sätt i 2 st AAA batterier. Håll in På/Av (grön knapp) i 3 sek. Talstödet säger "Apparaten på" eller "Apparaten av". Efter 60 sek stänger PT av sig själv och säger "Apparaten av".

Spela in:

1. Håll pennan mot etiketten. PT säger "Ny etikett".
2. Håll in + eller - (gul eller röd knapp) tills PT säger "Spela in nu".
3. Håll kvar knappen tills du spelat in ditt röstmeddelande.
4. Släpp knappen när du är klar.
5. Röstmeddelandet är nu sparad och PT säger "Inspejning klar".

Volym

Tryck på + eller - (gul eller röd knapp) för att höja och sänka volymen

5

Spela upp:

Håll PT mot etiketten så läser den upp ditt inspelade meddelande.

Radera och spela in på etikett:

1. Håll PT mot etiketten.
2. PT börjar att läsa ditt inspelade meddelande
3. Tryck samtidigt in + och - (gul och röd knapp) tills PT säger "Raderat".

Du kan nu spela in ett nytt meddelande på etiketten.

Vid leverans ingår:

- 2 st batterier (ej laddningsbara)
- USB-Kabel
- Halsrem
- Hörsnäck
- 160 etiketter
- 72 etiketter som klarar tvätt och torktumling
- Språkvalslista

Tekniska specifikationer:

Batterier: AAA max 1.5 V
AC adapter input: 100-240V, 50-60 Hz
AC adapter output: max 5V, 1000mA
128MB micro SD minneskort:
upp till 2700 meddelanden, motsvarar
ca 70 tim samtalstid