



Modell med 3 hål (3-6 mm) för de flesta ögondroppar

**Varning! Dessa glasögon är inte lämplig för minimipipetter. Använd dessa endast när ögondroppflaskan är väl fastsatt och inte kan komma i direkt kontakt med ögat.**



Följ instruktionerna noggrannt

1. Tvätta händerna



2. Fixera flaskan i lämpligt hål  
det finns 3 storlekar



3. Sätt på dig glasögonen  
och håll/behåll ögat öppet



4. Luta dig bakåt och när flaskan är i  
position, tryck på den för att droppa i ögat



5. Vid behov, upprepa proceduren för det andra ögat