


PLEXTALK PTN2: Snabbguide med överlägg Specialnavigering 54066-09

1. Knappbeskrivning

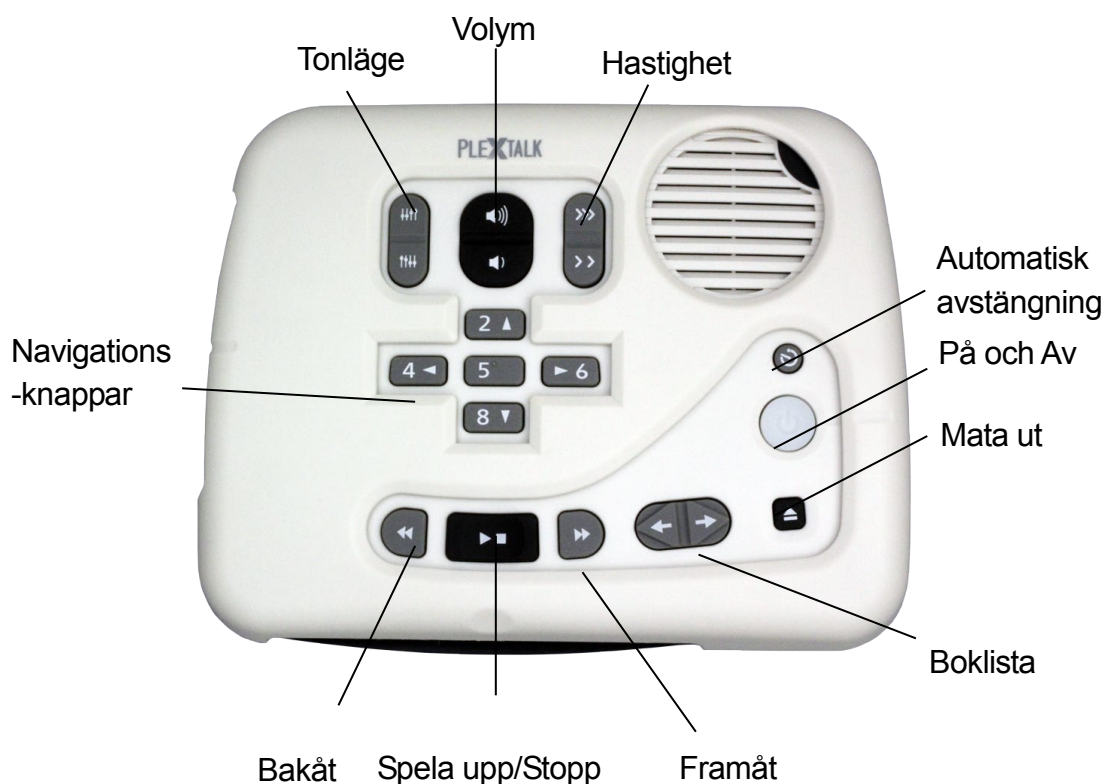

2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2

- Uppe i höger nedsänkning är högtalaren placerad.
- Under högtalaren finns fyra knappar: Automatisk avstängning, På och av, Mata ut och Boklista.
- I övre nedsänkningen finns Tonläges-, Volym- och Hastighetsknappen.
- Navigationsknapparna finns centralt i mitten, 2, 4, 6 och 8.
- I nedre nedsänkningen finns knapparna Bakåt, Spela upp/Stopp och Framåt (från vänster till höger räknat).
- På baksidans mitt finns anslutning för strömkabel.
- På spelarens vänsterkant finns tre anslutningar: för SD-kort, hörlurar och USB-minne.
- På spelarens framkant finns öppningen för Daisy/ CD -skiva.

3. Knappbeskrivning

- **Automatisk avstängning:** För att ställa tid för automatisk avstängning. Upprepa knapptryck flera gånger för att ställa in tid från 15 minuter till 1 timme.
- **På och Av:** Sätter på eller stänger av PTN2 genom att hålla knappen nedtryckt i ca 2 sekunder.




- **Mata ut:** För att mata ut Daisy/ CD -skiva.
- **Boklista:** Här kan du växla mellan dina böcker. Tryck på höger halva för att gå till nästa bok, eller vänster halva för att gå till föregående bok. Trycker du ner både höger och vänster samtidigt kan du växla mellan media: skiva, USB-minne och minneskort.
- **Tonläge:** Tryck på övre delen för högre tonläge och den nedre för lägre tonläge.
- **Volym:** Tryck på övre delen för ökad volym och den nedre för minskad volym.
- **Hastighet:** Tryck på övre delen för ökad hastighet och den nedre för minskad hastighet.
- **Navigationsknappar:** pil- och sifferknapparna uppåt/2, bakåt/4, framåt/6 eller nedåt/8.
- **Bakåt:** Tryck kort på knappen för att gå tillbaka en fras i en Daisybok, det föregående spåret i en ljudfil eller det föregående stycket i en textfil. Tryck och håll nere knappen för snabbspolning bakåt.
- **Spela upp/Paus/Stopp:** För att påbörja, pausa och stoppa uppspelningen. Håller du knappen intryckt länge får du bl a information om systemversion
- **Framåt:** Tryck kort på knappen för att gå till nästa fras i en Daisybok, det nästa spåret i en ljudfil eller det nästa stycket i en textfil. Tryck och håll nere knappen för snabbspolning framåt.



4. Exempel

Uppspelning av Daisybok från skiva

- Sätt in skivan i spelarens framkant.
- Tryck på Spela upp/Stopp för att börja lyssna.
- Tryck på Spela upp/Stopp för att pausa eller stoppa uppspelningen.
- Tryck och håll nere Framåt för att spola framåt.
- Tryck och håll nere Bakåt för att spola tillbaka.

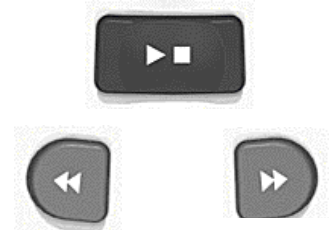

Spela upp ljud

- Tryck på vänster eller höger halva av boklisteknappen för att välja ljud, tryck därefter på Spela upp/Stopp. Använd Bakåt eller Framåt för att välja spår.

