

## Snabbguide för talande febertermometer **Snabbtemp** (Living TH1091)



Bild ovan på termometer

Denna snabbguide är en kortfaktlig beskrivning hur du kommer igång med att mäta kroppstemperatur mot pannan och vad du bör tänka på.

### **Beskrivning av produkt**

I förpackning finns termometern och ett stativ för att placera termometern stående när din termometer inte används.

Om du håller termometern i handen så ska "tratten" (infraröd sensor) riktas emot dig. Längst fram på "tratten" sitter avläsningsfönstret i en lite grop. Fönstret ska alltid hållas rent från smuts för att korrekt avläsning ska erhållas. Kan göras rent med en "mirakeltrasa" eller en bomullstopps. Eventuellt med ett mildt rengöringsmedel. Torka rent.

På baksidan i handtaget, längs ned, sitter två AAA-batterier (ingår vid leverans) som kan bytas genom att hålla tummen på de två taktila strecken på locket och dra nedåt. Bägge batterierna ligger med pluspolerna nedåt. När batterierna är på plats sätter du tillbaka skyddslocket och skjuter upp med tummen på de två taktila strecken till dess locket låser. Vid leverans sitter ett litet plastskydd vid pluspolerna som ska avlägsnas.

På baksidan, högst upp bakom "tratten" sitter en taktill knapp som används för avläsning för temperatur mot pannan.

#### **Att mäta temperatur mot pannan;**

- Sätt "tratten" dikt mot pannan mitt emellan ögonbrynen.
- Tryck på den taktilla knappen på baksidan med tummen.
- Ett "bipp" indikerar att mätningen genomförs.
- Två snabba "bipps" indikerar att mätningen genomförts och mätt temperatur läses upp på engelska i Celsius.
- Vi rekommenderar att genomföra två till tre mätningar i följd. Vänta i ca 3 sekunder mellan varje mätning.

#### **Att tänka på;**

- Har termometern legat i annan temperatur än vanlig rumstemperatur bör den få vara i rumstemperatur i ca 20 minuter innan mätning genomförs.
- Undvik lagring i extrema temperaturer.
- Mät inte efter ett varmt bad eller dusch. Detsamma gäller direkt efter träning eller andra aktiviteter som kan höja kroppstemperaturen och därmed ge en missvisande bild.
- Håll sensorn ren för att få bästa mätresultat.
- Ha alltid extra batterier (AAA) hemma.

#### **Övrigt**

Denna termometer har även andra funktioner som inte beskrivs här men i den medföljande originalmanualen på engelska. Det går t.ex. att mäta örontemperatur, lagra matningar i minne, tid- och datum m.m.

Har du övriga frågor kan du kontakta Iris Hjälpmedels produktsupport 08-399400.

Produkten är;

- CE-märkt (0197) i enlighet med direktivet MDR (2017/745).
- IP22-klassad.