

Bruksanvisning

LOOKY MAG



Handhållen elektronisk förstoring

Innehåll

Looky MAG.....	3
Enhetsbeskrivning.....	3
Säkerhetsföreskrifter.....	4
Använda LOOKY MAG.....	4
Felsökning.....	5
Support och underhåll.....	6
Information om avfallshantering och återvinning.....	6
Garanti.....	7
Tekniska specifikationer.....	7

Looky MAG**Enhetsbeskrivning**

Looky MAG är en kompakt och snygg handhållen elektronisk förstöringsapparat designad för användare som behöver förbättrad synhjälp i vardagen. Med en 2,8-tums ljusstark TFT-skärm erbjuder denna lätta enhet 1x till 8x förstoring, vilket gör den idealisk för läsning, precisionsarbete och andra närbildsuppgifter.

Bra funktioner:

- 2,8-tums TFT-skärm med hög ljusstyrka för tydlig och levande bild.
- Flera visningslägen: standard, inverterad och högkontrast.
- Förstoringsnivåer: 1x, 2x, 4x, 6x och 8x.
- 5 cm fokusedjup för bekväm användning.
- Frysbildsfunktion för att fånga och granska detaljer.
- Lämplig för både vänster- och högerhänta användare.
- Upp till 2 timmars batteritid för längre användning.
- USB-C-laddning för snabb och bekväm uppstart.

Säkerhetsföreskrifter

	Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten. Spara dem för framtida referens.
	Modifiera, öppna eller reparera inte enheten eller dess delar utan tillverkarens tillstånd.
	Temperaturgränser anger de lägsta och högsta tillåtna temperaturerna för lagring, transport eller användning.
	Placera inte enheten eller dess delar i direkt solljus eller nära värmeöverförande föremål.
	Tappa inte Looky MAG i någon vätska och avstå från att använda en våt trasa för rengöring.
	Förvara batteriet och små delar (SD-kort, USB-minne) utom räckhåll för barn.
	Släng inte elektronisk och elektrisk utrustning eller tillbehör i hushållsavfallet.

Använda LOOKY MAG

Ström På/AV	Tryck länge på den lila knappen (1) i 4 sekunder för att slå på eller av enheten.
Förstora bilden	Tryck kort på knappen lila (1) för att ändra förstöringsnivåerna. Varje kort tryck ökar förstoringen med 1x, 2x, 4x, 6x, 8x och sedan tillbaka till 1x.
Ändra kontrastläge	Tryck kort på svarta knappen (2) för att växla mellan tillgängliga videolägen (Normal fullfärg, Gråskala, Inverterad gråskala, Hög kontrast svart på vitt och Hög kontrast vitt på svart).

Frysfunktion	Långt tryck på den svarta knappen (2) i 3 sekunder för att frysa bilden och tryck länge igen för att återställa frysningen. Enheten återgår till livevideoflöde.
Justera fryst bild	Tryck kort på den lila knappen (1) för att ändra förstöringsnivåerna. Tryck kort på den svarta knappen (2) för att ändra videoläge.

Felsökning

1. Enheten startar inte	Ladda enheten. Se till att du håller den Lila knappen (1) intryckt i 4 sekunder.
2. Bilden är suddig	Justera förstöringsgraden med den lila knappen (1).
3. Bilden är för ljus eller mörk	Ändra videolägen med den svarta knappen (2).
4. Knapparna svarar inte	Stäng av och slå på enheten. Ladda enheten om problemet kvarstår.
5. Ingen bild visas	Kontakta kundsupport.

Support och underhåll

- Rengör regelbundet kameranlinsen (4) och utsidan med en torr mikrofiberduk. Använd inte vätskor eller kemiska rengöringsmedel.
- Om inget av ovanstående fungerar, kontakta teknisk support för hjälp.

Information om avfallshantering och återvinning



EU:s WEEE-direktiv kräver att produkter som säljs i EU-länder måste ha logotypen för en överkorsad soptunna på produkter och batterier. Denna logotyp för en överkorsad soptunna innebär att kunder och slutanvändare inte ska slänga elektronisk och elektrisk utrustning eller tillbehör i hushållsavfallet. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Förhindra potentiella skador på miljön och människors hälsa. Fråga din leverantör eller lokala myndigheter om aktuella avfallshanteringsanläggningar eller avfallshantering i länder utanför Europeiska unionen.

Försiktighetsåtgärder vid avfallshantering av batterier:

- Följ alla säkerhetsanvisningar för batterier.
- Felaktigt batteribyte kan orsaka läckage, explosion eller skada. Undvik att lämna batteriet urladdat under längre perioder, kortslut det inte och förvara det utom räckhåll för barn under 3 år.



Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder: - Omorientera eller flytta mottagarantennen. - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. - Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. - Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

GARANTI

Garantin för denna produkt överensstämmer med gällande konsumentskyddslagar i ditt land eller din region. Det innebär att garantiperioden och villkoren baseras på de minimikrav som fastställs i lokal eller nationell lagstiftning. Som konsument har du laglig rätt till en produkt som uppfyller de rimliga förväntningar du kan ha på den. Om produkten utvecklar ett fel på grund av tillverknings- eller materialproblem inom den lagstadgade garantiperioden har du rätt till kostnadsfri reparation, utbyte eller återbetalning, beroende på situationen. Denna garanti täcker inte (a) skador orsakade av felaktig hantering, (b) skador på grund av reparationer eller manipulation av kunden eller obehörig tredje part, (c) onormal användning, (d) normalt slitage. Garantireparationer förlänger inte garantiperioden för enheten eller några reservdelar. För mer information om din lagstadgade garanti, kontakta din leverantör.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Paketets innehåll	Looky MAG, USB-C laddningskabel + adapter, bruksanvisning
Batteritid	2 timmar
Laddningstid	2,5 timmar
Skärmstorlek	2,8"
Vikt	150 g
Ladduttag	USB-C, placerad i handtaget
Batteriindikator	Visas på skärmen, visuell batterinivåindikator
Förstoringsnivåer	1x, 2x, 4x, 6x, 8x (stegvis)
Anslutning	5V 1A
Driftstemperatur	0°C till 40°C
Certifieringar	CE-EMC, ROHS, LVD, FCC, PSE-EMC, C-tick, RCM, IC, UKCA-EMC



Rehan Electronics Ltd.
Brunswick Row, Aughrim Road, Carnew
Co. Wicklow Y14 NY60, Republic of Ireland
Phone: +353 (0) 53 942 6742
sales@rehanelectronics.ie
technical@rehanelectronics.ie
www.rehanelectronics.com

Iris Hjälpmedel AB
08- 39 94 00
produktsupport@irishjalpmedel.se
www.irishjalpmedel.se