









UNWIRED THINGS IKÖNN



SV Bruksanvisning

Symboler

	Tillverkare		Serienummer
	Katalognummer		Parti-/batchnummer
	Varning		Förvaras torrt
	Se bruksanvisningen före användning		Uppfyller kraven i EU:s harmoniserade standarder

Förord

Gratis till ditt köp av fjärrkontrollen IKONN®.

Den här handboken fungerar som en guide för effektiv och säker användning av produkten. Läs igenom informationen noggrant innan du använder produkten och spara dokumentet för framtida referens.

Beskrivning av enheten

Fjärrkontrollen IKONN är utformad för universell användning och erbjuder personer med nedsatt syn många användbara och praktiska funktioner. Den har inbyggda funktioner såsom klocka, timers, alarm, fickminne och spel. IKONN kan anslutas till en rad kompatibla hushållsapparater för att läsa av deras mätvärden. Förutom trådlösa tillbehör stöder den även plug-in-sensorer som ansluts direkt till fjärrkontrollen. Den fungerar både som fjärrkontroll och ljudguide.

Innan första användningen


Packa försiktigt upp produkten. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart, men du kanske vill behålla förpackningen om du skulle behöva returnera produkten.

När du packat upp produkten, kontrollera att alla delar finns med och är i gott skick. Om något saknas, kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.



Varning: För att undvika skador på produkten eller personskador, läs avsnittet *Hantering och säkerhet* innan du använder produkten för första gången.

Delar och komponenter

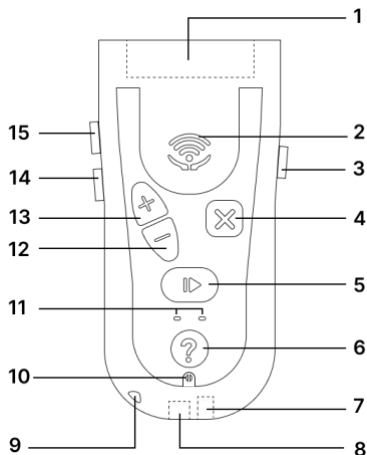

Artikel	Symbol
1	Tillbehörspport
2	Högtalare
3	Strömknapp []
4	Avbryt-knapp []
5	OK-knapp []
6	Hjälp-knapp []
7	Hörlursuttag
8	Laddningsport
9	Hållare för halsrem
10	Mikrofon
11	LED-lampor
12	Minusknapp []
13	Plusknapp []
14	Volym ned-knapp []
15	Volym upp-knapp []

Användning

Kom igång

För att starta fjärrkontrollen, tryck och håll inne strömknappen som är placerad på enhetens högra sida tills du hör ett pip (efter cirka 3 sekunder). För att stänga av enheten, håll samma knapp intryckt. Enheten kan behöva laddas innan den används. Använd den medföljande USB-C-kabeln. Läs avsnittet om *laddning*.

SV

Efter uppstart är IKONN i viloläge med klockfunktionen vald. Om du trycker kort på OK-knappen får du tiden uppläst. Om du gör ett långt tryck på OK-knappen får du datumet uppläst. Knapparnas funktioner kan variera beroende på långt eller kort tryck.

Uttryck	Betydelse
Kort tryck	Tryck på knappen i en halv sekund
Långt tryck	Tryck på knappen i cirka 1 sekund eller längre
Håll ned	Tryck på knappen i mer än 2 sekunder




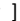





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





De funktioner som finns tillgängliga på IKONN presenteras i en meny. Du kan bläddra i listan med hjälp av plus- [+] och minusknappen [-]. När du har hittat den funktion du vill använda trycker du på OK-knappen [►] för att välja. Genom att trycka på den fyrkantiga knappen Avbryt [✕] går du tillbaka ett steg i menyn eller avbryter vald funktion.

Om du vill ha mer detaljerad information om vald funktion kan du trycka länge på hjälpknappen [?] för att få en förklaring av hur du använder funktionen eller tillbehöret. Vissa alternativ är endast tillgängliga om du har anslutit ett specifikt tillbehör, till exempel en färgindikator eller lagt till en produkt, till exempel en köksvåg.

Alla funktioner fungerar på liknande sätt. Du kan när som helst lämna en funktion genom att hålla ned den fyrkantiga knappen Avbryt [✕] i en sekund för att återgå till huvudmenyn. Om du är osäker på vad du kan göra kan du trycka på den runda knappen Hjälp [?] för att höra informationsguiden.

För att spara batteritid går IKONN automatiskt in i viloläge efter en period av inaktivitet, förutsatt att den inte laddas, är i en funktion eller ansluten till en annan enhet. Du kan väcka fjärrkontrollen genom att trycka på valfri knapp. Om du placerar den i en ficka eller väska där knapparna kan tryckas in av misstag, kan du använda knappläsfunktionen. Om du vet att

enheten inte kommer att användas under en längre tid rekommenderas att du stänger av den helt.

För att	Aktivitet
Slå på eller stäng av enheten	Håll ned strömknappen, []
Bläddra i listan med tillgängliga funktioner eller öka/minska ett värde när du ställer in t.ex. en timer,	Använd plus- och minusknapparna [] []
Justera volymen	Använd [ +] eller [ -]
Öppna vald funktion Starta eller stoppa en funktion i en funktion	Tryck kort på OK-knappen []
Starta en alternativ åtgärd för en app	Långt tryck på OK-knappen []
Återgå till ett tidigare steg eller avbryt aktuell aktivitet	Tryck kort på knappen Avbryt []
Avbryt all aktivitet och återgå till standardläget	Långt tryck på knappen Avbryt []
Få vägledning om en viss funktion eller ett visst tillbehör	Tryck på Hjälpknappen []
Avvisa varningar som timer eller larm som löper ut	Tryck kort på [] eller []
Lås och lås upp knappsatsen	Håll ned [] och tryck sedan på []. Släpp hjälpknappen []

Inbyggda funktioner

IKONN's standardfunktioner är tillgängliga efter att enheten startats. Bland dessa finns ett **utbildningsprogram** som hjälper dig bekanta dig med produktens funktioner.

Vi rekommenderar att du lyssnar på utbildningsprogrammet för att få en översikt över kontrollerna och funktionerna.

Du väljer det genom att trycka en gång på minusknappen när du slagit på fjärrkontrollen för första gången. När du hör "Träning" trycker du kort på OK-knappen [▶]. Följ röstguiden som hjälper dig att bekanta dig med enheten. Utbildningsprogrammet tar cirka 12 minuter att genomföra, men du kan ta så lång tid du behöver och har även möjligheten att repetera.

Utöver utbildningsprogrammet kan du komma åt följande funktioner från huvudmenyn:

Klocka – Anger aktuell tid i **12 eller 24-timmars format**.

Datum – För att få datum uppläst håll inne OK-knapp [▶] i 3 sek.

Väckarklocka – Gör det möjligt att ställa in upp till **fem alarm**, antingen som engångsarm eller med återkommande repetition för en vald veckodag eller varje dag.

Röstmemo – Gör det möjligt att **spela in och lagra korta röstmeddelanden**, som kan fungera som personliga påminnelser.

Timer – Låter dig ställa in upp till **tre individuella timers**, som kan stoppas och startas om efter behov.

Lägg till ny produkt – Ansluter din IKONN-fjärrkontroll till kompatibla enheter. För mer information, se avsnitten *Kompatibla produkter* och *Lägga till en ny produkt* i manualen.


Spel – Erbjuder enkla, interaktiva funktioner som virtuell **myntkastning** och **tärningskastning**.

Inställningar – Ställa in och anpassa din fjärrkontroll. Detta inkluderar:

- Ställa in datum och tid och välja önskat **tidsformat**.
- Ändra **enheterna** som IKONN använder för mätningar.

- Kontrollera enhetens **batterinivå**.
- Justera hur mycket IKONN automatiskt ger hjälp i varje funktion.
- Ange din **längd** för BMI-mätning.
- Återställer enheten för att **ta bort** alla installerade produkter, inställningar och röstmemon.


Laddning

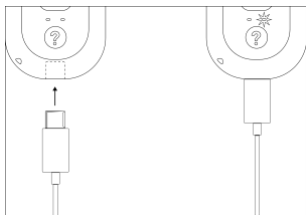

För att ladda IKONN, anslut den tunna USB-C-ändan av USB-C-kabeln till laddningsporten på enhetens undersida. Den andra rektangulära änden (USB-A) kan anslutas till en laddare eller en dator. IKONN meddelar dig när batteriet börjar ta slut och behöver laddas. Laddningsförloppet indikeras av en orange LED-lampa på knappsatsen. När IKONN är fulladdad meddelar den dig detta via tal. När laddningen är klar rekommenderar vi

att du kopplar bort IKONN från laddningskabeln. Även om laddningen inte är klar kan du alltid koppla bort kabeln om du behöver använda enheten.

Plug-in-tillbehör

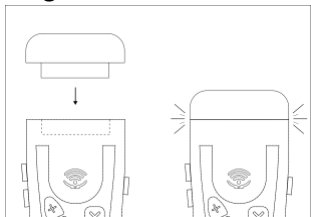

På enhetens ovsida finns en bred, böjd **moduldockningsport** där du kan ansluta tillbehör. När du tar ut enheten ur förpackningen för första gången hittar du en silikonplugg som skyddar dockningsporten – se till att ta bort denna innan du ansluter några tillbehör. När du ansluter ett tillbehör kan nya funktioner bli tillgängliga i menyn, till exempel en färgindikator eller ljusindikator. När du tar bort ett tillbehör kommer de tillhörande funktionerna inte längre att vara tillgängliga. Ta ett tillbehör och notera att basen

SV

har några utskjutande skenor. Dessa skenor glider in i spåren på dockningsportens undersida. Tryck försiktigt in tillbehöret tills du känner ett klick. När du har anslutit tillbehöret hör du ett ljud och ett meddelande som anger vilken modul som har anslutits. När du tar bort tillbehöret hör du också ett meddelande. Sätt tillbaka den skyddande silikonpluggen för att skydda dockningsporten.



Varning: Sätt inte in något annat i dockningsporten för tillbehör, eftersom det kan skada porten eller enheten. Tvinga aldrig in tillbehöret; om det inte glider in med lätt tryck är det troligen upp och ner.

Mikrofon

IKONN har en mikrofon placerad precis under hjälpknappen. Mikrofonen används när du spelar in röstmemon eller för att namnge objekt som timers eller alarm. Alla funktioner som använder mikrofonen kräver att du trycker länge på OK-knappen [►] för att starta inspelningen. Under inspelningen trycker du kort på OK för att stoppa och spara inspelningen eller avbryta för att ta bort.


Kompatibla produkter

Förutom att ansluta till plug-in-tillbehör kan IKONN också anslutas till en rad andra produkter som är märkta som **IKONN-kompatibla**. Detta växande utbud av enheter inkluderar köksvågar, badrumsvågar, rumstermometrar, kökstermometrar, måttband och mycket mer.


För att använda någon av dessa funktioner, välj den från menyn med hjälp av plusknappen

[+] och minus knappen [-] och tryck sedan på OK-knappen [►]. Se till att den IKONN-kompatibla produkten är påslagen, så bör IKONN omedelbart upptäcka den. Om du är osäker på vilka funktioner som finns tillgängliga för en viss produkt kan du alltid trycka länge på hjälp-knappen [?].

Lägga till en ny produkt

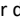IKONN visar endast produkter som du har installerat. För att installera en ny produkt väljer du alternativet *”Lägg till ny produkt”* i huvudmenyn. Tryck på OK [] för att söka efter den och se till att den nya produkten är påslagen och finns i närheten. Slå endast på en ny produkt av samma typ åt gången. IKONN lokaliserar produkten och frågar om du vill installera den. Tryck på åtgärdsknappen för att bekräfta eller på Avbryt om fel produkt hittades och du behöver söka efter den nya produkten igen. Om du inte kan hitta din nya produkt, se till att den har batterier och är påslagen.

Observera att vissa produkter kan levereras med förinstallerade batterier. I så fall kan du behöva dra ut den lilla plastiseringen innan du använder produkten.

Du behöver bara utföra denna installationsåtgärd en gång med en ny produkt. Därefter startar IKONN om automatiskt och produkten läggs till i listan över alternativ i huvudmenyn mellan klockan och utbildningen. I klockläget trycker du på minusknapp [] för att välja ett tillbehör. Du kan också installera samma produkt på flera IKONN-kontrollenheter om du delar den med andra, och du kan installera flera produkter av samma typ på kontrollenheten. I såfall väljer IKONN den enhet som den hittar först vid sökningen.

Anslutning av hörlurar

3,5 mm-ljuduttaget för hörlurar sitter på enhetens undersida nära USB-C-laddningskontakten. När du ansluter hörlurar omdirigeras ljudet från högtalaren till hörlurarna, så om du inte hör något ljud från högtalaren bör du kontrollera att hörlurarna är anslutna. Denna version av IKONN stöder endast 3,5 mm-ljuduttag, och hörlurar med andra kontakter, till exempel från tidiga iPhone-modeller, är inte kompatibla.

Undvik att lyssna på onödigt hög volym. Observera att kontrollenheten inte kan driva hörlurar med mycket hög impedans.

SV

Halsrem



Varning: IKONN har ett litet hål i höljet som gör det möjligt att fästa en hals- eller handledsband. Om du väljer att fästa ditt eget band, se till att det har en säkerhetsfunktion som gör att det lossnar om bandet plötsligt dras i vid en olycka, för att undvika allvarliga skador.

Mobilapp (ej Android)

Även om IKONN är utformad för att fungera som en fristående enhet kan du använda den tillsammans med den dedikerade *IKONN Update*-smartphoneappen för att maximera dess kapacitet.

Denna smartphone-app ansluter till IKONN och ger tillgång till systemuppdateringar, möjlighet att ändra röster samt **ytterligare funktioner** och **anpassningsalternativ** efter dina önskemål. Appen synkroniserar också IKONN klockan med telefonnätets tid, vilket möjliggör en mycket exakt tidsinställning.

Ladda ner

Ladda ner appen **IKONN Update**, som finns tillgänglig i App Store®, och följ instruktionerna på skärmen för att ansluta till IKONN.

Inställning

Öppna appen och följ instruktionerna för att ansluta till din IKONN-enhet, som bör placeras nära telefonen.

Observera att IKONN måste vara ansluten med en kabel till en laddare för att kunna upprätta en anslutning till telefonappen.

När anslutning begärs börjar den vänstra blå LED-lampan på IKONN **att blinka** och du uppmannas av både IKONN-enheten och appen att godkänna anslutningen. Lampan lyser med fast sken när du har godkänt begäran med IKONN.

Tips och felsökning

Du hittar en lista med lösningar på de vanligaste problemen på:

ikonn.info/sv/products/ikonn-controller

Om du har problem med att använda din produkt, kontakta återförsäljaren där du köpte den.

Om du inte kan komma i kontakt med dem, kontakta tillverkaren på: ikonn.info/sv/support

Varningar, hantering och säkerhet



Varning: Läs igenom all säkerhetsinformation nedan innan du använder IKONN och spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Som med alla elektroniska produkter kan underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna leda till brand, elstötar eller andra skador, samt skador på IKONN eller annan egendom.

Allmän säkerhet och hantering

Denna enhet ska användas i enlighet med avsedd användning. Hantera IKONN med försiktighet, eftersom den innehåller känsliga elektroniska komponenter. IKONN kan skadas om den tappas, bränns, punkteras, krossas eller doppas i vätska. Kontrollera alltid om det finns synliga tecken på skador. Om du upptäcker några, kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Öppna inte och försök inte reparera IKONN själv, eftersom demontering av enheten kan orsaka skador på dig eller enheten. Använd inte en skadad IKONN-enhet.

Ladda IKONN med den medföljande kabeln och den valfria adaptern eller annan kabel och kompatibla strömadaptrar från tredje part som är avsedda för IKONN. Användning av skadade kablar eller laddare eller laddning i fuktig miljö kan orsaka elektriska fel eller stötar. Se till att nätkontakten eller nätkabeln är ordentligt isatt i ett eluttag.

Höga ljudnivåer kan orsaka hörselskador. Lyssna inte på ljud med hög volym under långa perioder. Kontrollera volymen innan du sätter in något i örat.

SV

Radiofrekvensutsläpp från IKONN kan påverka funktionen hos annan elektronisk utrustning negativt.

IKONN sänder inte ut några radiofrekvenser när den är i grundläge och fungerar som klocka eller väckarklocka, men den använder radiofunktionen för att signalera sin närvaro när en laddningskabel är ansluten. Ladda inte IKONN och använd den inte med kompatibla produkter i känsliga miljöer, till exempel i ett flygplan under flygning.

Undvik att utöva överdrivet tryck eller böja enheten. Tvinga aldrig in en kontakt i en port och utöva inte överdrivet tryck på knapparna. Om kontakten och porten inte passar ihop med rimlig lätthet, kontrollera om det finns hinder, se till att kontakten passar porten och att kontakten är korrekt placerad i förhållande till porten.

Använd inte enheten på platser som är varma, fuktiga, överdrivet dammiga, där insekter kan tränga in, där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, nära brandfarliga föremål och i rum med rök eller ånga. Undvik att lämna den i solljus i en varm bil, till exempel.

Använd IKONN endast vid acceptabla temperaturer. IKONN's arbets- och förvaringstemperaturområde anges i avsnittet *Tekniska specifikationer*. Användning utanför detta område kan leda till skador och förkortad batteritid. Undvik att utsätta IKONN för dramatiska förändringar i temperatur eller fuktighet. Det är normalt att IKONN känns något varmt under laddning eller vid långvarig användning.

Se till att IKONN alltid hålls torr. Använd inte enheten när du har våta händer eller utsatt den för vatten. För att rengöra IKONN, koppla bort alla kablar, stäng av den och använd en mjuk, lätt fuktad, ludd fri trasa. Undvik att använda alkohol eller starka slipande rengöringsmedel. Undvik att få fukt i öppningarna.

Om du har medicinska tillstånd som du tror kan påverkas av IKONN, rådfråga din läkare innan du använder IKONN.

Batterier

Försök inte byta batteriet i IKONN själv. IKONN-batteriet ska endast bytas ut av en auktoriserad serviceleverantör och måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfall.

Bränn inte batterierna och utsätt dem inte för höga temperaturer, eftersom detta kan leda till explosioner. Manipulera inte batterierna eller cellerna på något sätt.

Om din IKONN-produkt förstörs av misstag, lägg den i en förseglad plastpåse innan du transporterar den någonstans.

Säkerhet

Enheten lagrar inte personliga identifierare. Den använder starka hårdvaru- och IT-säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och autentisering, för att skydda mot obehörig åtkomst och datain fångning. Anslutningarna är begränsade till betrodda nätverk, vilket garanterar säker och pålitlig drift.

Tekniska specifikationer

Modell	IKONN-1	Mått	120x65x15 mm
Vikt	83	RF TX-effekt	Max 12 dBm
Strömförsörjning	Litiumjonbatteri (ej utbytbart)	Sändningsfrekvensområde	RF: ISM, 2,400–2,4835 GHz
Batteriets livslängd	300 laddningscykler eller 24 månader	Laddningsspänning/ström	4,9 V–5,1 V, 500 mA
Transporttemperatur	från 10° C till 40° C	Arbetstemperatur	från 5° C till 40° C
Transportfuktighet	från 0 % till 85 %	Arbetsfuktighet	från 0 % till 85 %
Modulering	DSSS	Förväntad livslängd	3 år

SV

Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktkvaliteten.

Tillverkad i EU.

Support och garanti

Denna produkt omfattas av en garanti mot material- och tillverkningsfel under en period av två år från det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, olyckshändelse, ändringar eller otillåtna modifieringar. För delar som utsätts för slitage, inklusive batteriet, gäller en garanti på sex månader. Spara ditt inköpsbevis.

Kassering av elektroniska apparater



Produkten och/eller batterierna ska kasseras separat från hushållsavfall. När produkten nått slutet av sin livslängd ska du se till att celler, batterier eller ackumulatörer kasseras på rätt sätt genom att lämna dem till en insamlingsplats som utsetts av din lokala myndighet. Konsumenter uppmanas att kontakta sina lokala myndigheter eller återförsäljaren för vägledning om korrekt avfallshantering av gamla maskiner och tillhörande batterier. I EU regleras dessa regler av direktiv 2012/19/EU (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter).

Upphovsrätt

Unwired Things ApS behåller immateriella rättigheter till innehållet i detta dokument och all hårdvarudesign, ljudinnehåll och programvarufunktionalitet som ingår i IKONN-produkten. Alla rättigheter förbehålls. Obehörig reproduktion, distribution eller användning av någon del av detta dokument och denna produkt kan bryta mot gällande lagar och kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. IKONN är ett registrerat varumärke som tillhör Unwired Things. Alla rättigheter förbehålls.

©Unwired Things 2025

Försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren, Unwired Things, förklarar att IKONN-1-enheten uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU om radioutrustning. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig online: ikonn.info/sv/conformity

IKÖNN



www.ikonn.info



UNWIREDTHINGS

Unwired Things ApS

Tagensvej 22, 2200 Copenhagen, Denmark

Email: info@unwiredthings.com

CVR 4148 9553