

Manual Milestone 312 Ace samt Milestone 312 Ace Internet (tillägg delmanual för Internet/Wifi)



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Knappbeskrivning	4
Bild och knappbeskrivning.	4
Ovansidan	4
Övre kortsidan	4
Högra långsidan	5
Nederkant	5
Allmänt	5
Olika funktionerna i Milestone 312	5
Ladda batteriet	5
Knapplås på/av	5
Väcka/Slå på spelaren	5
Väljknappen	5
Informationslista	5
Grundinställningar	6
Ställa in klockan	6
Ställa in datum	6
Läshastighet ledtext	6
Höra programversion	6
Höra tid och datum	6
Tillgängliga inställningar	6
Gå till tillgängliga inställningar	7
Automatisk avstängning	7
Uppspelningshastigheter i "Böcker".	7
Talsyntes	7
Välj röst	7
Minneskort	7
Sätta in och ta ut minneskortet	7
Milestone och datorn.	8
Anslutning med kabel	8
Ansluta minneskortet	8
Daisyfunktionen	8
Lägga in en ny Dasiybok	8
Spela upp Daisyboken	9
Ändra uppläsninghastighet	9
Höj och sänk volym	9
Navigera i Daisyboken	9
Gå till sida	9
Lägga in bokmärke	9
Ta bort bokmärke	10
Ta bort alla bokmärken	10
Byta bok	10
Ta bort bok	10
Andra böcker	10
Musik	10
Navigera i mappar	10
Spela in	11
Kortare minnesanteckning	11
Kontinuerlig inspelning	11
Spela upp inspelning	11
Radera inspelning	11
Textfiler	12


Manual Milestone 312 Ace samt WiFi

Spela upp textfil _____	12
<i>Alarm</i> _____	<i>12</i>
<i>Uppdateringar</i> _____	<i>12</i>
<i>Tillbehör</i> _____	<i>12</i>
<i>Anslutning av andra externa tillbehör</i> _____	<i>13</i>
<i>Tillverkare och auktoriserad europeisk representant</i> _____	<i>13</i>
<i>Daisysupport</i> _____	<i>14</i>
<i>Daisyutbildning av Milestone</i> _____	<i>14</i>
<i>Bilaga Menykarta</i> _____	<i>15</i>

Knappbeskrivning

Bild och knappbeskrivning.

Text knappbeskrivning, se nedan

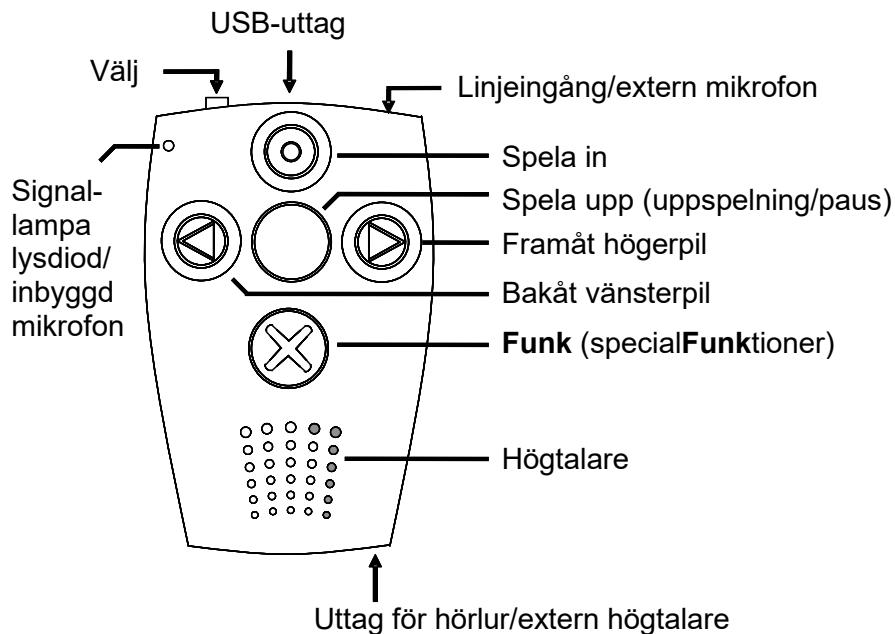

Ovansidan

Här har du fem taktila knappar och längst ner ett raster för högtalaren. Knapparna sitter i tre rader, en knapp på övre raden, tre på mittraden och en knapp på nedre raden.

- Lampa: sitter längst upp till vänster. Under lampan är den inbyggda mikrofonen placerad.
- Översta knappen: heter **Spela in** och du känner en ring.
- Mittraden, där heter knapparna:
 - Vänstra knappen, heter **Bakåt** och du känner en vänsterpil.
 - Mittenknappen, heter **Spela upp** och är slät.
 - Högra knappen, heter **Framåt** och du känner en högerpil.
- Nedre knappen, heter **Funktionsknappen** (här **Funk**) och du känner ett kryss.

Övre kortsidan

Där har du tre olika funktioner.

- Till vänster har du **Välj**.
- I mitten har du **Mini-USB-uttag**, anslutning för laddare och datorkabel.
- Till höger **linjeingång/extern mikrofon**.

Högra långsidan

Här har du anslutning för minneskortet.

Nederkant

Till höger har du anslutning för hörlurar eller externa högtalare.

Allmänt

Minneskort: SD, stödjer max 32 GB. Ett minneskort följer med spelaren.

Interna minnet: ca 11GB.

Röstinspelningskapacitet på interna minnet upp till 420 timmar.

Max speltid 20 timmar vid fulladdat batteri. Spelaren går in i viloläge om den inte används på 10 min.

Olika funktionerna i Milestone 312

Med Milestone 312 kan du:

- Läs Daisy och andra böcker
- Lyssna på Musik
- Inspelningsfunktion
- Talsyntes, för att lyssna på textfiler
- Alarm, klocka och timer

Ladda batteriet

Innan användning ska du ladda batteriet ca 3 timmar.

Det kan du göra med hjälp av den medföljande batteriladdaren eller genom att ansluta Milestone till datorn med medföljande kabel för detta.

Knapplås på/av

Tryck och håll inne **Funk** och tryck därefter på **Spela in**. Släpp knapparna, först **Spela in** och därefter **Funk**, och fickminnet bekräftar knapplås på eller av.

Väcka/Slå på spelaren

Det gör du genom att tryck på **Spela upp** minst en halv sekund.

Väljknappen

Du väljer funktion med **Välj** som sitter till vänster på överkanten.

I standardutförande har du valen; Alarm, Audio, Böcker.

I funktionen Audio gör du inspelningar och lyssnar på musik och textfiler. Den säger även Radio och Agenda om dessa extra funktioner har köpts till.

Informationslista

Genom att hålla nere **Funk** 1,5 sekunder kan du få information vart du står i spelaren, minnesstatus, tid, datum och batteristatus.

Batteristatus meddelas på följande sätt:

Batteriet är fulladdat, laddat, ladda batteriet, ladda genast batteriet.

Grundinställningar

Trycker du **Framåt** två gånger när du valt **Information** kommer du till **Grundinställningar**.

Trycker man då **Funk** kan du ställa in tid och datum samt höra vad du har för programversion och serienummer på din spelare. Vill du gå tillbaka till föregående val så gör du det med **Spela in**.

Ställa in klockan

1. Håll nere **Funk** tills du hör Informationslistan.
2. Tryck **Framåt** tills du hör **Grundinställningar**.
3. Tryck **Funk** tills den säger **Klocka Ställ timme**
4. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa in timtid
5. Tryck **Funk** igen för att ställa in minut
6. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa in minuttid.

Ställa in datum

1. Håll nere **Funk** tills du hör **Informationslistan**.
2. Tryck **Framåt** tills du hör **Grundinställningar**.
3. Tryck **Funk** till **Datum, Ställ dag**.
4. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa in dag.
5. Steg 3-4 upprepas för att ställa in månad och år.

Läshastighet ledtext

1. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa in hur fort Milestone ska läsa upp ledtexterna.

Höra programversion

1. Håll nere **Funk** tills du hör **Informationslistan**.
2. Tryck **Framåt** tills du hör **Grundinställningar**.
3. Tryck **Funk** tills du hör **Mjukvara**.
4. Därefter hör du vilken programversion din spelare har.
5. Ett tryck till på **FUNK** och du hör din spelares serienummer.

Höra tid och datum

1. Tryck **Välj** till **Alarm**.
2. Tryck **Spela upp**, tiden läses upp.
3. Tryck och håll nere **Spela upp**, tid och datum läses upp.

Tillgängliga inställningar

Under tillgängliga inställningar kan du tex ställa in:

- Automatisk avstängning
- Ställ tid för automatisk avstängning
- Språk – se nedan under talsyntes

Vilka val du kan göra i Tillgängliga inställningar beror på var du befinner dig.

Gå till tillgängliga inställningar

1. Håll in **Funk** ca 1,5 sek.
2. Tryck **Framåt** till **Tillgängliga inställningar**

Automatisk avstängning

1. Välj med **Framåt/Bakåt** om den ska vara på eller av.
2. Tryck **Funk** igen för att välja **Ställ tid för automatisk avstängning**
3. Tryck **Framåt/Bakåt** för att välja antal minuter för avstängning.

Uppspelningshastigheter i "Böcker".

1. Håll ner **Funk** till **Information**.
2. Tryck **Framåt** till **Tillgängliga inställningar**.
3. Tryck **Funk** till **Uppspelningshastighet**.
4. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa in hastighet.

Talsyntes

Du har tillgång till rösterna Erik, Elin och Emma för svenskt tal. Dessa finns i kvalitet 50, som är den högre kvaliteten.
Engelska rösten är Heather och kan väljas i olika kvaliteter, 20 och 50.

Välj röst

1. Håll ner **Funk** tills du hör **Information** om var du står.
2. Tryck då **Framåt** och du hör **Tillgängliga inställningar**.
3. Tryck **Funk** tills du hör **Språk**, 5 gånger.
4. Bläddra mellan rösterna och kvalitéerna med **Framåt/Bakåt**.
5. Bekräfta röst genom att trycka **Spela upp**.

Minneskort

Sätta in och ta ut minneskortet

Kortet sätts in på spelarens högra sida, en bit ovanför mitten.
Se till att ha det avfasade hörnet på kortet inåt spelaren och mot dig.
Tryck in kortet i spelaren tills det snäpps fast och du hör ett pip.
Du tar ut kortet genom att först trycka det inåt och sedan dra ut. Inget pip hörs.

På minneskortet kan du skapa mappar för de olika funktionerna i Milestone 312. Du skapar helt och hållet den mappstruktur du vill.
Daisyböcker måste alltid läggas in i en separat mapp.
Andra filer kan identifieras av spelaren även om du lägger dem direkt på kortet. Men vi föreslår att du gör olika mappar för god struktur.
Exempel: Musik, Text, Böcker.

Om du skapar mappen **Böcker** och lägger in alla dina böcker i undermappar under den, får du tillgång till dina böcker när väljer funktionen Böcker vilket kan vara en fördel.

Milestone och datorn.

Du kan arbeta med Milestone och datorn på två sätt, genom att använda medföljande USB-kabel eller ta ut minneskortet ur spelaren och sätta in i datorns minneskortsläsare (intern eller extern).

Anslutning med kabel

1. Sätt in kabel i uttaget överst på Milestone och anslut till datorn via USB-uttag.
2. Ett fönster kommer upp på skärmen.
3. Tryck **Escape** för att stänga det fönstret.
4. Starta **Den här datorn** tex genom att trycka **Start + E**.
5. Du ser Milestone som två Flyttbara diskar. Enhetsbokstav kan variera beroende på vilka enheter du har tillgång till på din dator. Du ser skillnad på enheterna eftersom det interna minnet har namnet M312 och minneskortet enbart namnet flyttbar disk.

Det är på minneskortet du lägger in din musik, dina böcker mm.

Ansluta minneskortet

Om du tar ut minneskortet ur spelaren och ansluter det till datorn så ser du givetvis enbart det externa minnet.

Daisyfunktionen

Daisy = Digital Accessible Information System, eller Digitalt Audiobaserat Informationssystem på svenska.

Daisyböcker lägger du in på det externa minneskortet.

Lägga in en ny Dasiybok

1. Se till att ha **Den här datorn** öppet.
2. Anslut **Milestone** till datorn med medföljande kabel. Du hör meddelandet "Anslutning till datorn".
3. Tryck **Escape** för att stänga fönstret som kommer upp.
4. Stoppa in Daisyskivan in datorns **CD-enhet**.
5. Tryck **Escape** för att stänga fönstret som kommer upp.
6. Gå till **Cd-enheten**.
7. Tabba till **Innehållsdelen**.
8. Markera alla filer med **Ctrl+A**.
9. Kopiera med **Ctrl+C**.
10. Gå nu till Milestones **externa** minne (flyttbar disk, ej M312).
11. Skapa en mapp för boken, förslagsvis med bokens namn och under mappen **Böcker**.
12. **Öppna** mappen.

13. Klistra in med **Ctrl+V**.

Spela upp Daisyboken

1. Tryck **Välj** tills du hör **Böcker**.
2. Tryck **Spela upp** för att spela upp. Ett tickande ljud hörs medan boken förbereds för läsning. Notera att böcker i formaten DAISY 3.0 samt EPUB kan ta lite längre tid att förbereda läsning.
3. Tryck och håll nere **Framåt/Bakåt** för att spola fram och tillbaka.

Ändra uppläsningshastighet

Håll nere **Väljknappen** och tryck på **Framåt/Bakåt** för att öka/minska hastighet. Du hör ett svagt pip när du nått min och maxhastighet samt ett svagt pip för normal hastighet. Du har 5 steg neråt från normalhastighet och 10 steg uppåt.

Höj och sänk volym

Håll ner **Funktionsknappen** och tryck **Framåt/Bakåt** för att öka och minska volym. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå.

Navigera i Daisyboken

Det gör du på samma sätt som på andra Daisy-spelare.

1. Tryck **Spela in** eller **Funk** för att välja nivå.
2. Tryck **Framåt/Bakåt** för att bläddra på den nivån.

Liksom andra spelare kan det ta lite tid för spelaren att hitta till rätt ställe. Bli inte för ivrig och knappa igen och igen – då blir den ledsen!

Gå till sida

- Gå med **Spela in** eller **Funk** tills du hör **Sidhopp**.
- Håll in **Välj** och tryck:
 - Bakåt för hundratal
 - Spela upp för tiotal
 - Framåt för ental

Exempel:

- Gå till sidan 123
- Se till att stå på **Sidhopp** i navigationen.
- Håll in **Välj** och tryck 1 gång på **Bakåt**, 2 gånger på **Spela upp**, 3 gånger på **Framåt**
- Milestone säger sidnumret och börjar läsa.

Lägga in bokmärke

Tryck och håll nere **Spela in** i två sekunder. Milestone säger "**Bokmärke inlagt**"

Bokmärkena läggs in i kronologisk ordning i boken, inte i den ordning du lagt in dem.

När du lagt in bokmärken hittar du det valet i navigationsnivåerna.

Ta bort bokmärke

Enstaka: för ta bort senast inlagde bokmärke trycker du **Funk** och **Spela upp** samtidigt. Milestone säger "**Bokmärke raderat**"

Ta bort alla bokmärken

För att ta bort alla bokmärken från en daisybok trycker du samtidigt, och i följande ordning på tangenterna **Funk – Spela upp – Spela in**.

Milestone säger "Alla bokmärken raderade".

Byta bok

Om du har flera böcker på ditt minneskort byter du bok genom att använda navigationsnivåerna.

1. Tryck **Spela in** eller **Funk** tills du hör **Bokhylla**.
2. Tryck **Framåt/Bakåt** för att gå till rätt bok.

Ta bort bok

Det gör du genom att ansluta Milestone eller minneskortet till datorn och radera bokens mapp på vanligt sätt.

Andra böcker

Dessa lägger du in på samma sätt som en Daisybok, tex i MP3.

Har du vanliga CD-böcker så är de oftast i CDA-format.

Först behöver boken rippas i tex Windows Media Player. Välj där ett format som Milestone stöder. Filformat som Milestone stöder är: MP3, AAC, WAV, WMA. Vi rekommenderar MP3 då dessa är minst. Eller så kan du använda Milestones separata överföringsenhet som överför skivans innehåll direkt till minneskortet i spelaren.

Musik

Här gäller samma sak som ovan, Milestone stöder inte det vanligaste formatet på en musik-cd, CDA. Därför måste du först rippa dina skivor för att föra över till Milestone. Lägg in dina musikfiler i mappar efter artist, spellistor eller dylikt. Eller via överföringsenheten, se föregående stycke. Du hittar din musik under funktionen **Audio** som du väjer med **Välj**.

Navigera i mappar

För att hitta bland dina mappar måste du först välja enhet.

Det gör du med **Spela in**.

1. Tryck **Spela in** tills du hör den enhet du vill titta på, tex Externa minneskortet.
2. Med **Funk** går du neråt i mappstrukturen

3. Med **Spela in** går du uppåt i mappstrukturen.
4. Tryck **Framåt/Bakåt** för att bläddra mellan dina mappar.
5. Har du undermappar till någon mapp så trycker du **Funk** igen för att gå ner en nivå.
6. Sedan trycker du **Framåt/Bakåt** för att bläddra mellan undermapparna.
7. Vill du spela upp en fil ur den undermapp du står på trycker du **Funk** igen för att öppna mappen och sedan **Spela upp**.

Spela in

Kortare minnesanteckning

Din inspelning hamnar i den mapp där du befinner dig.

Så här gäller det att kunna mappnavigationen ordentligt.

Se ovan Navigera i mappar.

1. Gå till funktionen **Audio** med hjälp av **Välj**.
2. Vanligtvis används det interna minnet för inspelningar.
3. Där finns mappen **Röstinspelning** och två undermappar till den, Att göra lista och Inköpslista.
4. Välj mapp där du vill lagra din inspelning.
5. Tryck därför **Spela in** till det interna minnet.
6. Tryck och håll in **Spela in** tills du hör ett kort klickljud.
7. Lampan överst till vänster på ovansidan av spelaren blinkar.
8. Avsluta inspelning genom att släppa **Spela in**.

Kontinuerlig inspelning

1. Håll ner **Spela in**.
2. Tryck **Spela upp**.
3. Du hör en signal.
4. Lampan blinkar och du spelar in.
5. Du kan göra paus i inspelningen genom att trycka **Spela upp**.
6. Lampan blinkar snabbare och du hör en dov signal.
7. Återuppta inspelningen med **Spela upp**, den dova signalen hörs.
8. Avsluta genom att trycka **Spela in** igen.

Spela upp inspelning

Se till att gå till rätt mapp och öppna den mappen.

Tryck **Spela upp**.

Har du fler inspelningar i mappen bläddrar du till filerna med **Framåt/Bakåt**.

Radera inspelning

Se till att gå till rätt mapp och öppna den mappen.

Tryck **Spela upp**.

När du hör den inspelning som du vill radera.

Tryck **Funk** och **Spela upp**.

Textfiler

Du kan spara textfiler (.txt och .doc) och lägga på ditt minneskort. Förslagsvis lägger du alla dina textfiler i en och samma mapp, tex Text.

Spela upp textfil

1. Välj **Audio** med **Välj-knappen**.
2. Gå till externa minnet med **Spela in**.
3. Pila till din **Textmapp**.
4. Gå in i mappen med **Funk**.
5. Bläddra mellan dina textfiler med **Framåt/Bakåt**.
6. Läs vald fil med **Spela upp**.
7. Det går att ställa in hastighet på uppspelningen genom att hålla ner **Funk** och **Framåt/Bakåt**.

Alarm

1. Tryck **Välj-knappen** till **Alarm**.
2. Först ställer du in om du ska ha alarm på eller av.
3. Det gör du med **Framåt/Bakåt**.
4. Tryck sedan **Funk** för att ställa in timme.
5. Välj timme med **Framåt/Bakåt**.
6. Tryck **Funk** igen för att ställa in minut.
7. Välj minut med **Framåt/Bakåt**.
8. Tryck **Funk** igen för nästa val.
9. Föregående inställning sparas automatiskt.

Vill du bara veta vilken tid du satt alarmet på trycker du **Välj** till **Alarm** och sedan håller du ner **Funk** så säger den Klockan är och alarmtiden.

Uppdateringar

Milestone 312 har en mjukvara som är under ständig utveckling för att göra din den successivt bättre och än mer effektiv. Den är versionshanterad och kan enkelt uppdateras via vår hemsida. Gå in på www.irishjalpmedel.se/Milestone/Content och följ instruktionerna. Ta för vana att titta med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du har den senaste versionen. Uppdateringar är kostnadsfria.

Tillbehör

FAME är en färg- och ljusindikator som är ett tillbehör till Milestone och används ansluten till Fickminnet. Den är ett hjälpmedel för synskadade eller färgblinda personer.

Anslutning av andra externa tillbehör

Till spelarens hörlursuttag, 3,5 mm, kan andra hörlurar, hörslinga, auxkabel eller slingförstärkare anslutas utan att det påverkar spelarens CE-märkning. Spelaren kan även anslutas till dator, för att ladda spelaren, ladda ned uppdateringar eller för att exportera filer från internminnet till dator.

Återställa till fabriksinställningar

Återställ spelaren till ursprunglig konfiguration genom en knappkombination. Lås först knapparna. Tryck och håll inne knapparna **Välj**, **Spela in**, **Spela upp** och **Funk** (i just den ordningen) i ca 10 sekunder. Signalerna låg-hög, låg-hög, låg-hög bekräftar att enheten är återställd till fabriksinställningar.

Rengöring och underhåll

Undvik att förvara spelaren i solen under en längre tid. Undvik även förvaring i fuktiga miljöer under en längre tid.

Vid rengöring använd helst ett mildt tvättmedel på fuktig trasa. Rengöringsalternativ är också Etylalkohol 10 % till max 20 % utblandat med vatten eller etanolbaserade lösningsmedel med max tensid 50 % eller motsvarande. Använd INTE bensin eller Aceton. Dessa är för aggressiva och kan skada plasten och även skada tryckta symboler på plasthöljerna.

Om enheten inte används under en längre tid behöver batteriet stödladdas och det ungefär var tredje månad.

Godkännanden

Denna produkt är CE-märkt som medicinteknisk produkt, 2017/745 MDR, Klass 1.

Tillverkare och auktoriserad europeisk representant

Denna produkt tillverkas av Bones AG, Güterstrasse 8
CH-8245 Feuerthalen, Schweiz. info@bones.ch. www.bones.ch
Auktoriserad EU-representant är DAISY-support, Marc Van der Aa
Hubert Verschraegenlaan 2, 9150 Kruibeke, Belgium.

Översättning av denna manual har skett i samverkan och med godkännande av tillverkaren. Versionsnummer i sidfot korresponderar med aktuell mjukvaruversion.

Daisysupport

Som kund hos Iris Hjälpmedel har du tillgång till vår support på telefon 08-39 94 00, välj produktförfrågan.


Daisyutbildning av Milestone

Vi tillhandahåller och skräddarsyr utbildning inom detta område.
Kontakta oss på 08 – 39 94 00 eller info@irishjalpmedel.se.

Vi önskar er lycka till med er Milestone!
Iris Hjälpmedel

Bilaga Menykart

Här ser du en bild över vad du har för val i de olika menyerna.

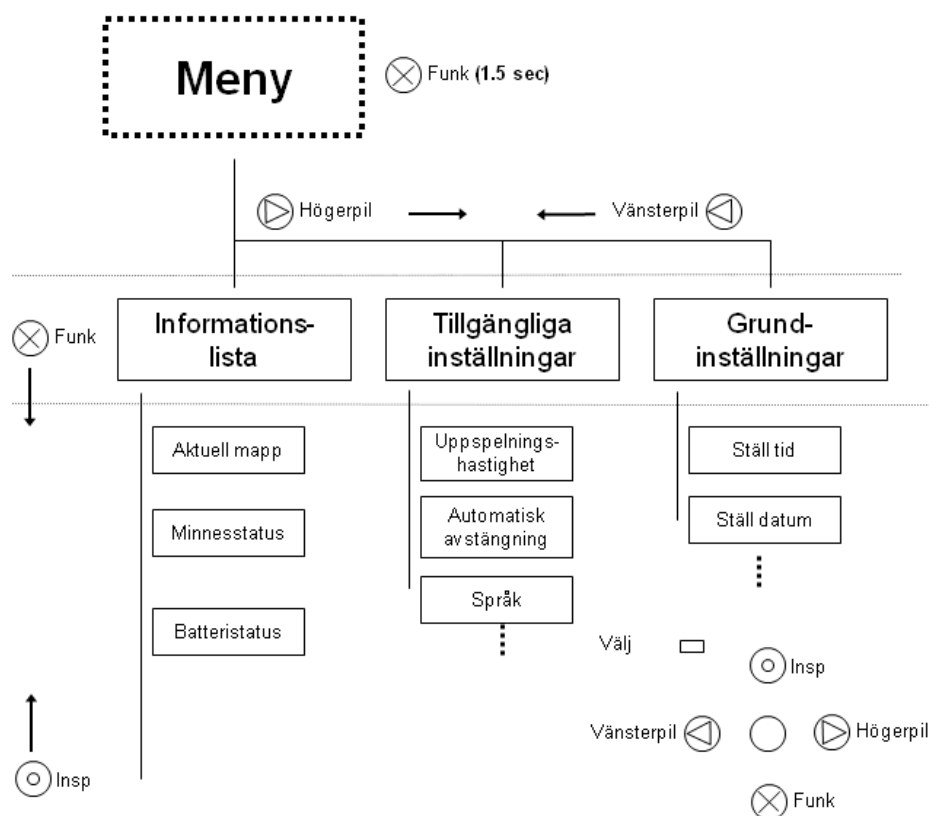

Säkerhetsinstruktioner och symboler som används

	Läs eller lyssna på manualen (kort och fullständig version) innan du använder enheten. Spara dessa för framtida referens.
	Undvik att lyssna på höga volymer under långa perioder. Detta kan skada din hörsel. Anslut endast hörlurar till hörlursuttaget på enhetens undersida. Anslut aldrig hörlurarna till mikrofoningången (den övre delen av enheten) för att undvika hörselskador. Använd aldrig hörlurarna när du sover utan att ha aktiverat insomningstimern.
	Det är förbjudet att modifiera, öppna eller reparera enheten eller dess delar utan tillstånd från tillverkaren eller den auktoriserade återförsäljaren. Ett batteribyte får endast utföras av en auktoriserad återförsäljare.
	Använd endast den medföljande laddaren eller USB-kabeln för att ladda batteriet.
	Var medveten om att enheten innehåller ett batteri och kasta inte enheten i vatten eller eld. Ta inte hål på eller krossa enheten. Om batteriet i enheten sväller och höljet inte längre kan stängas, packa enheten försiktigt i en stängd låda och lämna in den till en auktoriserad återförsäljare eller återvinningsföretag. Ladda aldrig batteriet!
	Enheten bör inte utsättas för temperaturer lägre än 5°C och temperaturer högre än 40°C.
	Enheten kan rengöras med en torr trasa. Om enheten är mycket smutsig kan den rengöras försiktigt med en trasa indränkt i ett alkoholbaserat rengöringsmedel. Under inga omständigheter får fukt tränga in i enheten.
	Tillbehör som USB-kabeln eller linan får endast användas på avsett sätt. Var försiktig så att du inte stryper dig själv. Se till att små delar som ingår i förpackningen, såsom SD-minneskortet, inte sväljs av misstag, särskilt när små barn är i närheten.
	Använd endast enheten så länge den är i perfekt skick. Så fort du märker att interna delar sitter lösa och t.ex. skramlar eller höljet inte längre stänger jämnt, ska enheten lämnas till en auktoriserad återförsäljare för inspektion. Använd i allmänhet endast oskadade tillbehör.

	Avfallshantering: Enheten är en elektronisk enhet inklusive ett batteri och får inte kasseras med hushållsavfallet. Fråga de lokala myndigheterna om de aktuella kasseringsalternativen eller lämna in enheten till en auktoriserad återförsäljare för kassering. Kassera förpackningar och andra tillbehör på ett miljövänligt sätt.
	Denna symbol betyder "serienummer". Du hittar den på baksidan av Milestone samt på utsidan av originalkartongen. Varje Milestone får ett serienummer som endast tillhör den, under vilket tillverkaren (Bones AG) lagrar information om garantiperioden och tillverkningsdatum.
	"Europeisk auktoriserad representant". Detta är en auktoriserad representant i Europa, utsedd av Bones AG som en juridisk person, för att representera Bones AG i EU och för att säkerställa efterlevnad av europeiska direktiv. Det är en fråga om Daisy Support B.V. , H. Verschraegenlaan 2, 9150 Kruibeke, Belgien SRN: BE-AR-000014945
	Denna enhet är certifierad som en klass 1 medicinsk utrustning (MDR klass I), enligt förordning 2017/745 (EU). Försäkran om överensstämmelse (EU Declaration of Conformity) kan ses på vår hemsida (www.bones.ch) i området "Support".
	Bones AG intygar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU och andra tillämpliga EU-direktiv. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse kan ses på www.bones.ch/support.php
	Tillverkare: Bones AG, Güterstrasse 8, 8245 Feuerthalen, Schweiz info@bones.ch, www.bones.ch

Tekniska specifikationer

Modell: Milestone ACE.

Strömförsörjning: 5V DC, 500mA, inbyggt batteri: litiumpolymer, 850mAh.

Laddningstid: 3 timmar för full laddning.

Minne: ca 11 GB tillgängligt (gäller inte M212).

Internminnesinspelningskapacitet: Cirka 420 timmar eller 17 dagar (gäller inte M212).

Mikrofoninspelningsbithastighet: Intern 64 kbps mono, externt valbar 128 till 320 kbps stereo. (Gäller endast M312 och M312i).

Ljudinspelningar: Samplingshastighet 44,1 kHz, upplösning 24 bitars intern, konvertering 16 bitar.

Ljuduppspelning: 8 till 320 kbps och VBR (variabel bithastighet).

USB 2.0 höghastighetsanslutning.

Hörlursanslutning: standard 3,5 mm jack-uttag, impedans 16 till 32 ohm.

Line-in-anslutning för extern mikrofon: 3,5 mm jack-uttag.

ABS plastfodral, mått 85 x 54 x 14 mm, vikt 53 gram.

Ytterligare tekniska data kan ses i manualen.

Service, support, mjukvaruuppdatering

Fråga din återförsäljare www.irishjalpmedel.se eller gå till Bones hemsida www.bones.ch. Under "Support" hittar du aktuell programvara för nedladdning.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Bones AG
Güterstrasse 8
8245 Feuerthalen
Switzerland
SRN: CH-MF-000026569
CHRN: CHRN-MF-20001879

Authorized Representative Daisy Support B.V.
H. Verschraegenlaan 2
9150 Kruibeke
Belgium
SRN: BE-AR-000014945

Basic UDI-DI 7649995112MILESTONE7EZ

Product Description Support/technical aid for disabled persons

Product Identification Milestone Ace devices, Helen and Ping Pong

Product-No. see «Products covered»

Classification MDR Class I

On our sole responsibility, we declare that the products comply with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. The products are in conformity with the following standards and/or other normative documents:

SAFETY (RED art 3.1.a): EN 62479: 2010
EMC (RED art 3.1.b): EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17 V3.2.4
SPECTRUM (RED art 3.2): EN 300 328 V2.2.2
MDR (EU) 2017/745
RoHS 2011/65/EU

This declaration is valid until the next change of the product. Any modification of the medical device not authorized by us will invalidate this declaration.

Place and date of issuees Güterstrasse 8, 8245 Feuerthalen, Switzerland, 30. Sep 2022.

Updated 14. Oct 2024

Stephan Knecht, CEO Bones AG

Products covered:

Trade Name	Article No.	Regulation / Directive		
Milestone 112 Ace	M 112 Ace	MDR	---	RoHS
Milestone 212 Ace	M 212 Ace	MDR	---	RoHS
Milestone 312 Ace	M 312 Ace	MDR	---	RoHS
Milestone 312 Ace WiFi	M 312 Ace WiFi	MDR	RED	RoHS
Milestone 412	M 412	MDR	RED	RoHS
Helen	Helen	MDR	---	RoHS
Ping Pong	Ping Pong	MDR	RED	RoHS