

Lathund Milestone 112 Ace




Innehållsförteckning

<i>Knappbeskrivning</i>	3
Bild och knappbeskrivning.	3
Ovansidan	3
Övre kortsidan	3
Nederkant	3
<i>Allmänt</i>	4
Ladda batteriet	4
Knapplås på/av	4
Väcka/Slå på fickminnet	4
Höj och sänk volym på högtalare	4
Höj och sänk volym i hörlurar	4
Informationslista	4
<i>Fickminne</i>	4
Direktinspelning	5
Spela in kortare minnesanteckning	5
Spela in kontinuerlig inspelning	5
Spela upp inspelning	5
Radera inspelning	5
<i>Milestone och datorn</i>	6
<i>Uppdateringar</i>	6
<i>Skötsel</i>	6

Knappbeskrivning

Bild och knappbeskrivning.

Text knappbeskrivning, se nedan

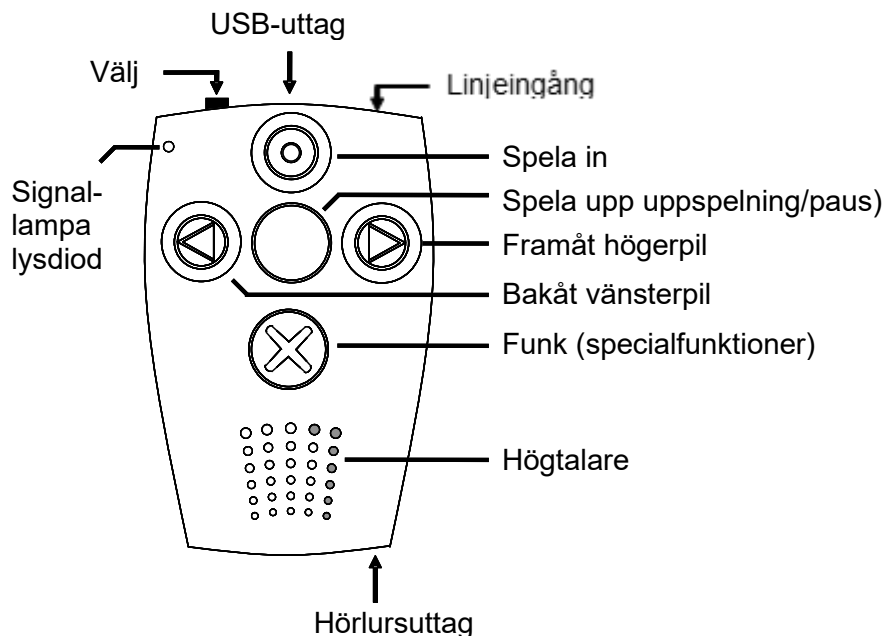

Ovansidan

Här har du fem taktila knappar och längst ner ett högtalarraster. Knapparna sitter i tre rader, en knapp på övre raden, tre på mittraden och en knapp på nedre raden.

- Lampa: sitter längst upp till vänster.
- Översta knappen: **Spela in** och du känner en ring.
- Mittraden, där heter knapparna:
- Vänstra knappen, heter **Bakåt** och du känner en vänsterpil.
- Mittenknappen, heter **Spela upp** och är slät.
- Högra knappen, heter **Framåt** och du känner en högerpil.
- Nedre knappen, heter **Funktionsknappen** (här **Funk**) och du känner ett kryss.

Övre kortsidan

Där har du:

- Till vänster har du **Välj**.
- I mitten har du **Mini-USB-uttag**, anslutning för laddare och datorkabel.
- Till höger **linjeingång**.

Nederkant

Till höger har du anslutning för hörlurar.

Allmänt

Lagringsutrymmet i fickminnet är ca 11GB (upp till 420 min tal).

Den går in i viloläge efter 10 minuters inaktivitet.

Maximalt 20 timmars inspelning vid fulladdat batteri.

Ladda batteriet

Innan användning ska du ladda batteriet ca 3 timmar.

Det kan du göra med hjälp av den medföljande batteriladdaren eller genom att ansluta Milestone till datorn med medföljande USB-kabel för detta.

Knapplås på/av

Tryck och håll inne **Funk** och tryck därefter på **Spela in**. Släpp knapparna, först **Spela in** och därefter **Funk**, och fickminnet bekräftar knapplås på eller av.

Väcka/Slå på fickminnet

Det gör du genom att tryck på **Spela upp** minst en halv sekund.

Höj och sänk volym på högtalare

Se till att ingen hörlur är ansluten. Håll ner **Funktionsknappen** och tryck **Framåt/Bakåt** för att öka och minska volym. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå.

Höj och sänk volym i hörlurar

Anslut hörlurar. Håll ner **Funktionsknappen** och tryck **Framåt/Bakåt** för att öka och minska volym. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå.

Informationslista

Genom att hålla nere **Funk** 1,5 sekunder kan du få information om aktuellt röstmeddelande, om fler foldrar är aktiverade, vart du befinner dig, ledigt utrymme, batteristatus, serienummer samt mjukvarans version.

Batteristatus meddelas på följande sätt:

Batteriet är fulladdat, laddat, ladda batteriet, ladda genast batteriet.

Fickminne

Inspelning av röstanteckningar sker via den inbyggda mikrofonen. Den totala inspelningstiden är ca 420 timmar. Antalet meddelanden är i praktiken obegränsat. Mikrofon med förförstärkare kan anslutas.

Direktinspelning

Du kan göra en röstanteckning direkt oavsett om fickminnet är vaken eller i viloläge. Tryck bara in **Spela in** och håll intryckt. När du hör ett kort klickljud, spela in ditt meddelande och släpp knappen när du är klar.

Spela in kortare minnesanteckning

1. Tryck och håll in **Spela in** tills du hör ett kort klickljud. Lampan överst till vänster på ovansidan av fickminnet börjar då blinka.
2. Avsluta inspelning genom att släppa **Spela in**.

Det går bra att stoppa in ett meddelande mellan två gamla

***Obs!** Om du trycker på **Spela in** kortare än en halv sekund blir ingenting inspelat. På så vis förhindras oavsiktliga inspelningar. Vänta därför några ögonblick innan du börjar prata.*

Spela in kontinuerlig inspelning

1. Håll ner **Spela in**.
2. Tryck **Spela upp**.
3. Du hör en signal.
4. Lampan blinkar och du spelar in.
5. Du kan göra paus i inspelningen genom att trycka **Spela upp**.
6. Lampan blinkar snabbare och du hör en dov signal.
7. Starta inspelningen igen med **Spela upp**, den dova signalen hörs.
8. Avsluta genom att trycka **Spela in** igen. Ett pipljud hörs.

Spela upp inspelning

1. Tryck **Spela upp**.
2. Har du fler inspelningar i mappen bläddrar du till filerna med **Framåt/Bakåt**.
3. För att gå till det första meddelandet i en mapp, håll nere **Bakåt** och tryck på **Spela upp**. För att gå till det sista meddelandet, håll nere **Framåt** och tryck på **Spela upp**.
4. För att snabbspola i ett långt meddelande, håll nere **Framåt/Bakåt**. Efter en sekund ökar hastigheten. När du släpper återgår den till normal hastighet.

Radera inspelning

1. Tryck **Spela upp**.
2. När du hör den inspelning som du vill radera.
3. Tryck **Funk** och **Spela upp**. Ett ljud hörs när du släpper knapparna.

Milestone och datorn

Du kan säkerhetskopiera dina röstanteckningar från det interna minnet till datorn genom att använda medföljande USB-kabel.

1. Sätt in kabel i uttaget överst på Milestone och anslut till datorn via USB-uttag.
2. Ett fönster kommer upp på skärmen.
3. Klicka **Ok** för att **Öppna mappen för att visa filerna i Utforskaren**.
4. Du ser Milestones interna minne som **M112**. Här kan du välja de filer du vill kopiera till din dator. Du kan även lyssna på dina röstanteckningar via datorn med t ex Windows Media Player.

Uppdateringar

Produkten har en mjukvara som styr funktionerna. Mjukvaran är under ständig utveckling för att göra ditt fickminne successivt bättre. Gå in på www.irishjalpmedel.se/Milestone/Content och följ instruktionerna. Ta för vana att titta med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du har den senaste versionen. Uppdateringar är kostnadsfria.

Skötsel

Rengöring bör ske regelbundet med en mjuk och lätt fuktad trasa med neutralt rengöringsmedel. Rengöringsalternativ är också Etylalkohol 10 % till max 20 % utblandat med vatten eller etanolbaserade lösningsmedel med max tensid 50 % eller motsvarande.

Använd INTE bensin, Aceton eller liknande. Dessa är för aggressiva och kan skada plasten och tryckta symboler.

Om enheten inte används under en längre tid behöver batteriet stödladdas och det ungefär var tredje månad.

Vi önskar er lycka till med er Milestone!
Iris Hjälpmedel

Iris Hjälpmedel AB
Hästhagsvägen 14A
S-194 52 Upplands Väsby
Telefon: 08-39 94 00
www.irishjalpmedel.se