

## Dymotapehållare i metall till Nya generationen Perkins samt SmartBrailler

### Bruksanvisning



- Flytta skrivhuvudet till mitten av Perkins.
- Fäll fram pappersfrigörarna.
- Skjut in dymotapehållaren så att den är dikt mot bakkanten.
- Fäll tillbaka pappersfrigörarna.
- Justera marginalstoppen på Perkins framsida så att positionerna är inom de två metallbläcken.
- Dra ut en tillräckligt lång remsa tape, sträck ut den och för försiktigt in den under metallbläcken så långt in det går.
- För skrivhuvudet bakåt så att det stannar vid vänster marginalstopp.
- Börja skriva precis som vanligt och stanna upp när klockan ljuder.
- Ta försiktigt ut tapen från ett metallbläck i taget.
- Lösgör pappersfrigörarna och ta bort metallhållaren.

- Fäll tillbaka pappersfrigörarna.