

Manual och skötselråd Ultraflex teknikkäpp med teleskophandtag, hopfällbar avancerad



Fäll ut käppen

Lossa kardborrbandet som håller ihop käppens delar men håll fortfarande ihop delarna. Håll käppen så högt att den kan vecklas ut utan att röra marken. Håll kvar greppet i handtaget, men släpp de andra delarna. Kontrollera att alla skarvarna hakar i varandra innan användandet. Håll räfflad del mellan tumme och pekfinger. Vrid handtaget ett kvarts varv moturs. Dra ut eller ihop käppen så den får önskad längd. Vrid handtaget medurs för att låsa fast det igen.

Fäll ihop käppen

Ta tag i den nedersta delen av käppen och dra ut den och vik ned in mot resten av käppen. Gör motsvarande med del för del. Fäst kardborrbandet runt den hopfällda käppen.

Skötsel

Känn alltid efter så att doppskon är ordentligt fastskruvad varje gång käppen fälls ut. Se till att hålla käppen ren. Rengöringen bör genomföras med käppen utfälld. Den ska regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel (typ diskmedel). Om skarvarna kärvar så smörj dem med någon kräm (typ Nivea – inte olja). Använd inte käppen om gummibandet som håller ihop käppen är slitet.

Byte av doppsko

Med varje käpp medföljer en skiftnyckel för användning vid byte av doppsko. Vrid doppskon medurs. Fäst den nya doppskon genom att gånga på den på käppen moturs.

Byte av handledsband

Lossa skruven i trähandtagen. Stick i det nya handledsbandet och fäst skruven igen.

Byte av kardborreband som sitter fast på käppen

Lossa skruven i trähandtagen. Sätt på kardborrebandet på käppen med den lilla ögla på käppen. Sätt på handtaget och fäst skruven igen.

Byte av gummisträckband i Ultraflex

Verktyg som behövs: Plattång

Monteringssats, som består av ett 5-delat mässingsrör (längd 150 cm, diameter 3 mm) med 0,5 mm stålrepögla och festsättningsring (för att dra igenom gummibandet).

Sexkantnyckel 2 mm till M4 sexkantskruv

Virknål 1 mm

M8 sexkantsmutter

1,5 meter gummiband.

Borttagning av felaktigt gummiband

- a. Skruva av trähandtaget genom att vrida den räflade metallbussningen.
- b. Klipp av gummibandet mellan rör II och III, skruva av doppskon. Knuten som finns längst fram i röret kan lossas med en virknål. Spännskruven är säkrad med en M4 sexkantskruv. Skruva loss M4-skraven med en 2 mm sexkantsnyckel och ta bort spännskruven. Om det inte går; skruva på en M8-mutter på spännskruven och vidrör endast muttern för att undvika skador på precisionsgängorna. Tag bort resten av gummibandet.

Att sätta in nytt gummiband

- a. Tryck ihop rören VI, V, IV, III och II (för att undvika skador på rörfogarna).
- b. Drag med plattången ut en bandslinga på cirka 3 cm och drag igenom tyget runt gummibandet genom slingan/öglan. För att få tillräckligt med tyg; tryck ner tyget från gummibandet och klipp av gummibandet ungefär 3 mm, drag sedan tillbaka tyget.

Godkännanden

Comde Ultraflex är godkänd som medicinktekniskt hjälpmedel, 2017/745, Klass 1