

Lathund Milestone 212plus rekonditionerad Daisyspelare och Fickminne




Innehållsförteckning

Knappbeskrivning	3
Bild och knappbeskrivning. _____	3
Ovansidan _____	3
Övre kortsidan _____	3
Högra långsidan _____	4
Nederkant _____	4
Allmänt	4
De olika funktionerna i Milestone 212plus _____	4
Ladda batteriet _____	4
Knapplös på/av _____	4
Väcka/Slå på spelaren _____	4
Väljknappen _____	4
Informationslista _____	5
Talsyntes	5
Minneskort	5
Sätta in och ta ut minneskortet _____	5
Milestone och datorn	5
Anslutning med kabel _____	5
Ansluta minneskortet _____	6
Daisyfunktionen	6
Lägga in en ny Daisybok _____	6
Spela upp Daisyboken	6
Ändra uppläsningshastighet _____	6
Höj och sänk volym _____	7
Ändra tonläge (pitch) _____	7
Navigera i Daisyboken _____	7
Gå till sida _____	7
Lägga in bokmärke _____	7
Ta bort enstaka bokmärke _____	7
Ta bort alla bokmärken _____	8
Byta bok _____	8
Ta bort bok _____	8
Automatisk avstängning _____	8
Andra böcker	8
Musik	8
Navigera i mappar på minneskortet	9
Fickminne	9
Navigera i mappar med röstanteckningar _____	9
Spela in kortare minnesanteckning _____	9
Spela in kontinuerlig inspelning _____	10
Spela upp inspelning _____	10
Radera inspelning _____	10
Säkerhetskopiera röstanteckningar _____	10
Tillbehör	11
Skötsel	11

Knappbeskrivning

Bild och knappbeskrivning.

Text knappbeskrivning, se nedan

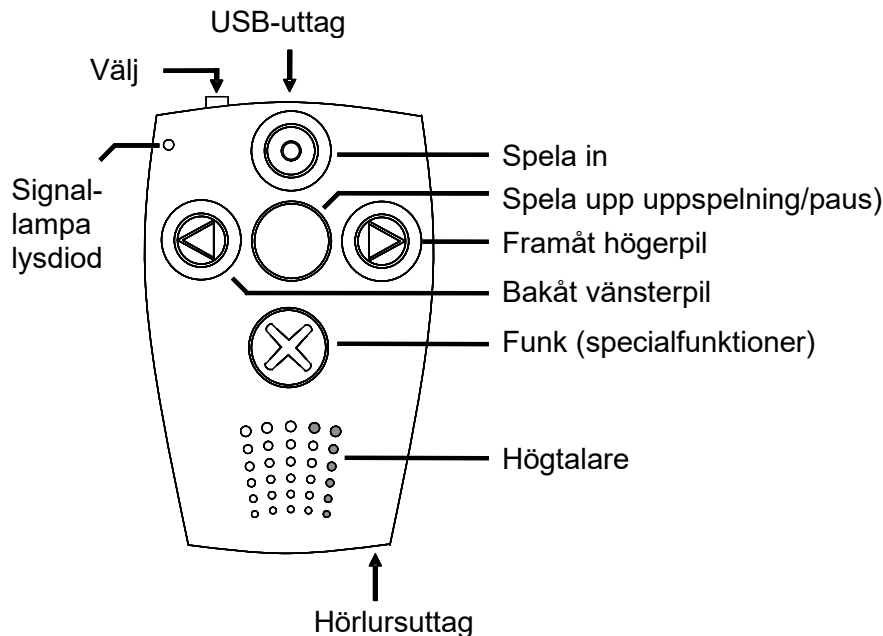

Ovansidan

Här har du fem taktila knappar och längst ner ett högtalarraster. Knapparna sitter i tre rader, en knapp på övre raden, tre på mittraden och en knapp på nedre raden.

- Lampa: sitter längst upp till vänster.
- Översta knappen: **Spela in** och du känner en ring.
- Mittraden, där heter knapparna:
- Vänstra knappen, heter **Bakåt** och du känner en vänsterpil.
- Mittenknappen, heter **Spela upp** och är slät.
- Högra knappen, heter **Framåt** och du känner en högerpil.
- Nedre knappen, heter **Funktionsknappen** (här **Funk**) och du känner ett kryss.

Övre kortsidan

Där har du:

- Till vänster har du **Välj**.
- I mitten har du **Mini-USB-uttag**, anslutning för laddare och datorkabel.

Högra långsidan

Här har du anslutning för minneskortet.

Nederkant

Till höger har du anslutning för hörlurar.

Allmänt

Minneskort: SD, maxminne 32 GB. Minneskortet som följer med spelaren är på 2 GB.

Spelaren går in i viloläge om den inte används på 10 min.

Max speltid 12 timmar vid fulladdat batteri.

De olika funktionerna i Milestone 212plus

Med Milestone 212 kan du:

- Läs Daisy
- Lyssna på Musik och andra böcker i mp3-format.
- Talsyntes för att läsa textfiler (txt och doc) samt höra mapparnas namn läsas upp.
- Spela in röstanteckningar med fickminnet

Ladda batteriet

Innan användning ska du ladda batteriet ca 5 timmar.

Det kan du göra med hjälp av den medföljande batteriladdaren eller genom att ansluta Milestone till datorn med medföljande USB-kabel för detta.

Knapplås på/av

Tryck och håll inne **Funk** och tryck därefter på **Spela in**. Släpp knapparna, först **Spela in** och därefter **Funk**, och fickminnet bekräftar knapplås på eller av.

Väcka/Slå på spelaren

Det gör du genom att tryck på **Spela upp** minst en halv sekund.

Väljknappen

Du väljer funktion med **Välj** som sitter till vänster på överkanten.

Där har du valen Fickminne, Böcker och Audio.

Med valet Böcker läser du Daisyböcker.

Med valet Audio läser du andra böcker och lyssnar på musik i mp3-format. Med valet Fickminne gör du röstanteckningar.

Informationslista

Genom att hålla nere **Funk** 1,5 sekunder kan du få information om vart du står i spelaren, batteristatus, minnesstatus och ledigt utrymme, val att säkerhetskopiera röstanteckningar till SD-minneskortet, mjukvarans version samt spelarens modell och serienummer.

Batteristatus meddelas på följande sätt:

Batteriet är fulladdat, laddat, ladda batteriet, ladda genast batteriet.

Talsyntes

I spelaren finns en talsyntes för att du ska kunna höra namnen på dina mappar samt för att läsa textfiler, antingen i txt- eller doc-format. Vi har valt rösten Erik från Acapela.

Minneskort

Sätta in och ta ut minneskortet

Kortet sätts in på spelarens högra sida, en bit ovanför mitten.

Se till att ha det avfasade hörnet på kortet inåt spelaren och mot dig.

Tryck in kortet i spelaren tills det snäpps fast och du hör ett pip.

Du tar ut kortet genom att först trycka det inåt och sedan dra ut. Inget pip hörs.

På minneskortet kan du skapa mappar för de olika funktionerna i Milestone 212. Du skapar helt och hållet den mappstruktur du vill. Daisyböcker måste alltid läggas in i en separat mapp för att bli navigerbara.

Andra filer kan identifieras av spelaren även om du lägger dem direkt på kortet. Men vi föreslår att du gör olika mappar för olika typer av filer för god struktur.

Milestone och datorn

Du kan arbeta med Milestone och datorn på två sätt, genom att använda medföljande USB-kabel eller ta ut minneskortet ur spelaren och sätta in i datorns minneskortsläsare (intern eller extern).

Anslutning med kabel

1. Sätt in kabel i uttaget överst på Milestone och anslut till datorn via USB-uttag.
2. Ett fönster kommer upp på skärmen.
3. Klicka **Ok** för att **Öppna mappen för att visa filerna i Utforskaren**.
4. Du ser Milestone som **Flyttbar disk**. Enhetsbokstav kan variera beroende på vilka enheter du har tillgång till på din dator

Ansluta minneskortet

1. Ta ut kortet ur Milestone och sätt i det i datorns interna eller externa minneskortsläsare.
2. Klicka **Ok** för att **Öppna mappen för att visa filerna i Utforskaren**.
3. Du ser minneskortet som **SD Card** och en enhetsbokstav som kan variera från dator till dator.

Oavsett vilket anslutningssätt du väljer ser du samma innehåll då allt innehåll ligger på minneskortet, utom röstanteckningarna som du har på interna minnet, dessa ser du inte på datorn.

Daisyfunktionen

Daisy = Digital Accessible Information System, eller Digitalt Audiobaserat Informationssystem på svenska.

Daisyböcker kan du bara läsa i läget **Böcker**.

Lägga in en ny Dasiybok

1. Se till att ha **Den här datorn** öppet.
2. Anslut **Milestone** till datorn med medföljande kabel. Du hör meddelandet "Anslutning till datorn".
3. Tryck **Escape** för att stänga fönstret som kommer upp.
4. Stoppa in Daisyskivan in datorns **cd-enhet**.
5. Tryck **Escape** för att stänga fönstret som kommer upp.
6. Gå till **cd-enheten**.
7. Gå till **Innehållsdelen**.
8. Markera alla filer med tex **Ctrl+A**.
9. Kopiera med tex **Ctrl+C**.
10. Gå nu till Milestone, som du hittar som **SD Card** eller **Flyttbar disk** beroende på anslutningssätt.
11. Skapa en ny mapp för boken, förslagsvis med bokens namn.
12. **Öppna** mappen.
13. Klistra in med tex **Ctrl+V**.

Spela upp Daisyboken

1. Tryck **Välj** tills du hör **Böcker**.
2. Tryck **Spela upp** för att spela upp.
3. Tryck och håll nere **Framåt/Bakåt** för att spola fram och tillbaka.

Ändra uppläsningshastighet

Håll nere **Väljknappen** och tryck på **Framåt/Bakåt** för att öka/minska hastighet. Du hör ett svagt pip när du nått min och maxhastighet samt ett svagt pip för normal hastighet. Du har 5 steg neråt från normalhastighet och 10 steg uppåt.

Höj och sänk volym

Håll ner **Funktionsknappen** och tryck **Framåt/Bakåt** för att öka och minska volym. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå.

Ändra tonläge (pitch)

Håll ner **Väljknappen** och tryck **Spela in/Funk** för att höja eller sänka tonläge. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå.

Navigera i Daisyboken

Det gör du på samma sätt som på andra Daisy-spelare.

1. Tryck **Spela in** eller **Funk** för att välja nivå.
2. Tryck **Framåt/Bakåt** för att bläddra på den nivån.

Liksom andra spelare kan det ta lite tid för spelaren att hitta till rätt ställe. Bli inte för ivrig och knappa igen och igen – då blir den ledsen! Men 212 är snabbare än tidigare spelare!

Gå till sida

- Stoppa uppläsningen
- Gå med **Spela in** eller **Funk** tills du hör **Sidhopp**.
- Håll in **Välj** och tryck:
 - Bakåt för hundratal
 - Spela upp för tiotal
 - Framåt för ental

Exempel:

- Gå till sidan 123
- Se till att stå på **Sidhopp** i navigationen.
- Håll in **Välj** och tryck 1 gång på **Bakåt**, 2 gånger på **Spela upp**, 3 gånger på **Framåt**
- Milestone säger sidnumret och börjar läsa.

Lägga in bokmärke

Tryck och håll nere **Spela in** i två sekunder. Milestone säger ”**Bokmärke inlagt**”

Bokmärkena läggs in i kronologisk ordning i boken, inte i den ordning du lagt in dem.

När du lagt in bokmärken hittar du det valet i navigationsnivåerna.

Ta bort enstaka bokmärke

1. Se till att stå i **Nivå Bokmärken**
2. Tryck **Framåt/Bakåt** till det bokmärke du vill ta bort
3. Tryck **Funk** och **Spela upp** samtidigt. Milestone säger ”**Bokmärke raderat**”

Ta bort alla bokmärken

1. Se till att stå i **Nivå Bokmärken**
2. Sedan trycker du samtidigt, och i följande ordning på tangenterna **Funk – Spela upp - Spela in**.
3. Milestone säger "Alla bokmärken raderade".

Byta bok

Om du har flera Daisyböcker på Milestone byter du bok genom att använda navigationsnivåerna.

1. Tryck **Spela in** eller **Funk** tills du hör **Bokhylla**.
2. Tryck **Framåt/Bakåt** för att gå till rätt bok.

Ta bort bok

Det gör du genom att ansluta Milestone eller minneskortet till datorn och radera bokens mapp på vanligt sätt.

Automatisk avstängning

I Nivålistan har du också valen **Automatisk avstängning** och **Tid för automatisk avstängning**.

1. Tryck **Spela in** eller **Funk** tills du hör **Automatisk avstängning**.
 2. Tryck **Framåt** för att slå på Automatisk avstängning.
 3. Tryck **Bakåt** för att slå av Automatisk avstängning.
-
1. Tryck **Spela in** eller **Funk** tills du hör **Tid för automatisk avstängning**.
 2. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa in den tid du vill ha som automatisk avstängning. Du ställer in i steg om 5 minuter.

Andra böcker

Dessa lägger du in på samma sätt som en Daisybok

Har du vanliga cd-böcker så är de oftast i CDA-format.

Då måste du först rippa boken till mp3-format, i till exempel Windows Media Player.

När du lyssnar på en mp3-bok har du inte samma navigationsmöjligheter som i en Daisybok. Du kan bara hoppa fram och tillbaka mellan spår som med musikfiler. Du kan däremot öka och minska hastighet på samma sätt som i en Daisybok.

Musik

Här gäller samma sak som ovan, Milestone stöder inte det vanligaste formatet på en musik-cd, CDA. Därför måste du först rippa dina skivor för att sedan föra över till Milestone. Lägg in dina musikfiler i mappar efter artist, spellistor eller dylikt.

Du hittar din musik under funktionen **Audio** som du väjer med **Välj**.

Navigera i mappar på minneskortet

För att hitta bland dina mappar måste du först välja **Audio**.

1. Tryck **Välj** för att gå till **Audio**.
2. Tryck **Framåt/Bakåt** för att bläddra mellan dina mappar.
3. Har du undermappar till någon mapp så måste du gå ner i nivå i din mappstruktur.
4. Med **Funk** går du neråt i mappstrukturen
5. Med **Spela in** går du uppåt i mappstrukturen.
6. Sedan trycker du **Framåt/Bakåt** för att bläddra mellan undermapparna.
7. Vill du spela upp en fil ur den undermapp du står på trycker du **Funk** igen för att öppna mappen och sedan **Spela upp**.

Fickminne

Det interna minnet används för att spela in röstanteckningar. Inspelning sker via den inbyggda mikrofonen. Den totala inspelningstiden är ca 70 timmar. Antalet meddelanden är i praktiken obegränsat.

Det finns fem mappar i det interna minnet. På så sätt kan man strukturera sina meddelanden i olika kategorier. Det går bra att stoppa in ett meddelande mellan två gamla. Det man spelar in hamnar direkt efter det man just lyssnat på. På så vis kan man bygga upp en almanacka eller ett telefonregister.

Navigera i mappar med röstanteckningar

Du väljer vilken mapp du vill arbeta i genom att trycka in **Välj** följt av någon av knapparna på Milestones ovansida. Val av mapp hörs när du släppt båda knappar. Följande kombinationer gäller:

- Välj** och **Spela in** = mapp M1
- Välj** och **Bakåt** = mapp M2
- Välj** och **Spela upp** = mapp M3
- Välj** och **Framåt** = mapp M4
- Välj** och **Funk** = mapp M5.

Milestone talar om för dig vilken mapp du valt.

Spela in kortare minnesanteckning

Din inspelning hamnar i den mapp där du befinner dig.

Så här gäller det att kunna mappnavigationen ordentligt.

Se ovan Navigera i mappar.

1. Gå till funktionen **Fickminne** med hjälp av **Välj**.
2. Det interna minnet används för röstinspelningar.
3. Välj mapp där du vill lagra din inspelning.
4. Tryck och håll in **Spela in** tills du hör ett kort klickljud. Lampan överst till vänster på ovansidan av spelaren börjar då blinka.
5. Avsluta inspelning genom att släppa **Spela in**.

Obs! Om du trycker på **Spela in** kortare än en halv sekund blir ingenting inspelat. På så vis förhindras oavsiktliga inspelningar. Vänta därför några ögonblick innan du börjar prata.

Spela in kontinuerlig inspelning

1. Håll ner **Spela in**.
2. Tryck **Spela upp**.
3. Du hör en signal.
4. Lampan blinkar och du spelar in.
5. Du kan göra paus i inspelningen genom att trycka **Spela upp**.
6. Lampan blinkar snabbare och du hör en dov signal.
7. Starta inspelningen igen med **Spela upp**, den dova signalen hörs.
8. Avsluta genom att trycka **Spela in** igen. Ett pipjud hörs.

Spela upp inspelning

1. Se till att gå till rätt mapp.
2. Tryck **Spela upp**.
3. Har du fler inspelningar i mappen bläddrar du till filerna med **Framåt/Bakåt**.
4. För att snabbspola i ett långt meddelande, håll nere **Framåt/Bakåt**. Efter en sekund ökar hastigheten. När du släpper återgår den till normal hastighet.

Radera inspelning

1. Se till att gå till rätt mapp.
2. Tryck **Spela upp**.
3. När du hör den inspelning som du vill radera.
4. Tryck **Funk** och **Spela upp**. Ett ljud hörs när du släpper knapparna.

Du kan radera flera meddelanden på en gång. För att radera alla meddelanden från och med det du står på, till det sista i den mapp du befinner dig.

1. Håll nere **Funk** och tryck på **Spela upp** och **Framåt** i två sekunder.
2. För att radera det meddelande du står på och alla före detta, håll istället nere **Funk** och tryck på **Spela upp** och **Bakåt** i två sekunder.

Säkerhetskopiera röstanteckningar

Du kan säkerhetskopiera dina röstanteckningar från det interna minnet till SD-minneskortet.

1. Gå till funktionen **Fickminne** med hjälp av **Välj**.
2. Håll nere **Funk** till dess informationslistan börjar läsas upp.
3. När du hör meddelandet "För att säkerhetskopiera innehållet på det interna minnet till SD-minneskortet", tryck högerpil nu.

4. Tryck högerpil så kopieras filerna till SD-minneskortet. Det hörs några knäppningar och när kopieringen är klar fortsätter spelaren att läsa upp resten av informationslistan.

Tillbehör

FAME är en färg- och ljusindikator som är ett tillbehör till Milestone och används ansluten till spelaren. Den är ett hjälpmedel för synskadade eller färgblinda personer.

Skötsel

Rengöring ska ske regelbundet med en mjuk och lätt fuktad trasa med neutralt rengöringsmedel.

Vi önskar er lycka till med er Milestone!
Iris Hjälpmedel

Iris Hjälpmedel AB
S-122 33 Enskede, Besök: Sandborgsvägen 52
Telefon: 08-39 94 00
www.irishjalpmedel.se