

Manual och skötselråd teknikkäpp Lätt och Ultralätt



Art nr 50350; längd 72 cm – 125 cm, rördimension över/nedre 13 resp 9 mm

Art nr 50353; längd 84 cm – 150 cm, rördimension över/nedre 13 resp 9 mm

Art nr 50355; längd 95 cm – 175 cm, rördimension över/nedre 13 resp 9 mm



Art nr 50125; längd 72 cm – 125 cm, rördimension över/nedre 13 resp 9 mm

Art nr 50126; längd 84 cm – 150 cm, rördimension över/nedre 13 resp 9 mm

Art nr 50097; längd 95 cm – 175 cm, rördimension över/nedre 13 resp 9 mm

Konstruktion

För att göra käppen lätt så är den tillverkad av armerad kolfiber. Armerad kolfiber är starkt men kan vara känsligt för hårda slag mot vassa kanter, framför allt när det är minusgrader.

Käppen består av 2 delar. Greppa doppskon med vänster hand. Vrid överdelen moturs ett halvt varv. Dra ut till önskad längd. Håll i underdelen och vrid överdelen försiktigt medurs tills den sitter fast.

Fäll ihop käppen

Håll i underdelen. Vrid överdelen moturs. Tryck ihop. Lås genom att försiktigt vrida överdelen medurs.

Skötsel

Se till att hålla käppen så ren som möjligt. Rengöringen bör genomföras med käppen utdragen. Rengör uppifrån och ned med doppskon riktad nedåt. Den ska regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel (till exempel diskmedel).

Byte av doppsko

Håll käppens nedre del med vänster hand. Vrid doppskon moturs. Fäst den nya doppskon genom att gänga på den på käppen medurs.

Denna käpp har europastandard för doppsko. Det betyder att de flesta av våra doppskor går att använda till denna käpp. Sortimentet av doppskor finner du på vår hemsida. Vi rekommenderar dock "lätta" doppskor. Det finns olika doppskor utifrån brukarens käppteknik och andra behov.

Godkännanden

Käppen är godkänd som medicintekniskt hjälpmedel, 2017/745 MDR, klass 1