

Snabbguide – TimeTalk (CW901)

Innan första användningen

1. Ladda klockan: Anslut den magnetiska laddaren och anslut den till vägguttaget. En full laddning tar cirka 1,5 timmar. Röst: "Laddning pågår" → "Laddad 100 %".
2. Slå på: Om klockan inte startar, anslut den till laddaren i några minuter.

Grundläggande användning

- Tala om tiden: Tryck och släpp den mittersta knappen (Talk) – tiden talas och visas.
- Justera volymen: Den övre knappen (+) = högre, den nedre knappen (-) = lägre.
- Växla mellan digital/analog: Anslut laddaren, håll + och - i 3 sekunder → välj Tidsformat.

Ställ in tiden

1. Koppla bort laddaren.
2. Håll ned + och - i 3 sekunder → "Ändra tid".
3. Använd + / - för att ställa in timmen, bekräfta med Talk.
4. Använd + / - för att ställa in minuter, bekräfta med Talk.
5. Tiden kommer att läsas högt när den sparas.

Laddning och batteri

- Ladda helt innan du använder den första gången. Ladda när du hör "Batterinivå låg".
- Undvik extrema temperaturer (under 5 °C / över 35 °C).
- Om den lämnas oladdad under en längre tid kan inställningar gå förlorade.

Rengöring

- Torka av med en mjuk, lätt fuktad trasa. Sänk inte ner i vatten.
- Desinficera med 70 % alkohol vid behov.

Säkerhetsanvisningar

- Ej vattentät – ta av dig innan du duschar eller badar.
- Använd endast den medföljande laddaren.
- Håll laddkabeln borta från barn eller riskgrupper.
- Om enheten blir varm, ta bort den och kontakta service.