

Manual och skötselråd nordisk stödkäpp



Max vikt användare; 117 kg

Korrekt användning av stödkäppen

Användaren ska vid upprätt kroppshållning hålla käppen med armbågen något vinklad. Justera käppen till korrekt höjd. På så sätt får kroppsvikten det bästa tänkbara stöd.

Inställning av käppen

Håll käppen med doppskon emot dig. Lossa låsringen rejält genom att vrida den motsols. Ställ in önskad längd genom att skruva den undre delen med- eller motsols. Lås valt läge genom att vrida låsringen medsols tills dess att den låser mot den övre delen.

Generell säkerhet

- Den skruvbara underdelen ska rengöras emellanåt eller vid behov med vatten och något milt, miljövänligt lösningsmedel, till exempel såpa.
- Säkerställ att låsskruven är åtdragen.
- Nordisk stödkäpp går att använda både utomhus och inomhus. Se även tillbehör för utomhusbruk.

Produktfakta

Stödkäppen har tre reflexer på övre sektionen och finns i tre längder;

Art nr 50220; S (64 – 84 cm), 390 gr

Art nr 50222; M (74 – 94 cm), 410 gr

Art nr 50224; L (84 – 104 cm), 420 gr

Tillbehör

50100-29 Isdubb med krona

50100-30 Käpphållare med reflex

50100-32 Doppsko ersättning elastisk hals

Käppen är CE-märkt enligt 745/2021 MDR, klass 1. Miljöklass enligt RoHS3.