

Användarmanual

CW901 TimeTalk talande klocka

distribueras av



Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta dokument är korrekt, men vi garanterar inte detta och skulle uppskatta alla kommentarer angående innehållet i detta dokument. Vi kan komma att göra förbättringar och ändringar på instrumentet och dessa ändringar kommer att införas i nya utgåvor av denna publikation när det är praktiskt möjligt.

Layout och design:

Fantasiskafferiet, Sollentuna

Print:

Uffe Tryckare, Upplands Väsby, 2025

Version 2.0

Oktober 2025



Varningar och försiktighetsåtgärder	2
1. Omfattning	5
1.1 Introduktion	5
1.2 Prestanda och specifikationer	7
1.3 CW901 delar och reservdelar	13
1.4 Beskrivning av symboler och märkning	15
2. Installation	20
2.1 Uppackning och inspektion	20
2.2 Miljökrav	21
2.3 Procedur för installation	21
2.4 Avancerade inställningar	22
2.5 Inställning av tid	23
2.6 Justering av volym	24
2.7 Laddning	25
3. Funktionell beskrivning	26
3.1 Beskrivning av användning	26
3.2 Beskrivning av utrustningen	27
3.3 Grundläggande funktion	27
3.4 Kontroll av batteriet	27
4. Bruksanvisning	29
4.1 Förberedelse före användning	29
4.2 Hur man använder klockan	30
4.3 Om klockan inte startar	30
5. Rengöring	31
6. Felsökning	33
7. Garanti och service	34
7.1 Garanti	34
7.2 Service	35
7.3 Avfallshantering av produkter	37
8. Lokalt försäljningskontor	33

Varningar och försiktighetsåtgärder

Den allmänna säkerhetsinformationen i manualen är avsedd för driftpersonal. Specifika anmärkningar, försiktighetsåtgärder och varningar finns i hela manualen där det är tillämpligt.

Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Obs! Identifierar villkor som bör noteras noggrant.

Försiktighet! Identifierar förhållanden som kan leda till skada på utrustningen.

Varning! Identifierar tillstånd som kan leda till personskada.

Varning! CW901 måste användas i enlighet med alla specifikationer och driftsprocedurer som anges i denna handbok.

Varning! Före användning måste CW901 ställas in av utbildad personal.

Varning! Följ bruksanvisningen när du använder CW901.

Varning! Magneter kan påverka pacemakers. Rådgör med din pacemakerleverantör.

- Varning!** Laddare och tillbehör, andra än de som anges, kan leda till skada på enheten eller personskada. Endast tillbehör som är avsedda för användning med CW901 bör användas.
- Varning!** Modifiera inte denna utrustning utan tillstånd från Conroy Medical eller Conroy Medical-auktoriserad representant.
- Varning!** Risk för strypning.
Förvara laddarkabeln utom räckhåll för barn, personer med kognitiva nedsättningar eller personer som riskerar att trassla in sig. Vira inte kabeln runt halsen eller kroppen. Undvik att placera enheten eller kabeln nära sängar, spjäsängar eller stolar där kabeln kan trassla in sig. Koppla alltid ur och förvara laddarkabeln på rätt sätt när den inte används.
- Varning!** Denna enhet innehåller material som kan orsaka allergiska hudreaktioner eller överkänslighet hos känsliga individer.
- Varning!** Anslut inte klockan till någon annan utrustning eller tillbehör som inte specificerats av tillverkaren. Om du gör det kan det leda till funktionsfel, skador eller säkerhetsrisker.

Varning! Förvara enheten och tillbehören utom räckhåll för barn, husdjur och skadedjur.

Varning! Försök inte byta ut batteriet själv. Felaktig hantering kan orsaka överhettning, läckage eller brand. Byte av litumbatterier eller bränsleceller utförd av otillräckligt utbildad personal kan resultera i en FARLIG SITUATION.

Försiktighet! FÖRESKRIFTER FÖR
ELEKTROMAGNETISK STÖRNING
Denna utrustning uppfyller standarderna
EN 60601-1-2:2015 (elektromagnetisk kompatibilitet).
Se tabell 1 för vägledning.

Viktigt! All oväntad användning, funktionsfel eller negativ händelse relaterad till användningen av denna enhet bör omedelbart rapporteras till tillverkaren eller din lokala distributör. Sådana händelser kan också rapporteras till den behöriga myndigheten i ditt land, i enlighet med lokala bestämmelser.

1. Omfattning

Detta kapitel innehåller en beskrivning och specifikationer för CW901, en talande klocka från Conroy Medical AB.

1.1 Introduktion

CW901 är en ny generation talande klockor med hög ljudkvalitet med hjälp av ny teknik.

CW901 är en talande klocka med en stor och tydlig display.

CW901 kan visa tid, och tid på dygnet, analogt ("Halv tre på eftermiddagen") eller digitalt ("Fjorton och tjugofem"). När du trycker på knappen meddelas först tiden, sedan följt av tiden på dygnet.

CW901 kan tala om tiden på svenska. Du växlar mellan digital och analog tid i Avancerade inställningar.

CW901-displayen övergår till standby efter cirka 60 sekunder.

CW901 består av en klocka, ett armband och en laddare. Den är komplett och redo att användas.

Armbandet kan enkelt tas bort för byte eller rengöring. Olika typer av standardarmband kan användas och de justerbara inställningarna möjliggör anpassning för användaren / av förskrivaren.

Obs! Användare uppmanas att vara försiktiga med oavsiktliga fall eller vattenskador när de använder CW901.

1.1.2 Kontraindikationer

Denna enhet är inte avsedd att användas av personer som:

- Har allvarliga hörselnedsättningar som hindrar dem från att uppfatta de talade tidsmeddelandena.
- Inte kan använda enkla taktila knappar eller förstå grundläggande röstmeddelanden, såvida de inte stöds av en vårdgivare.
- Har känd känslighet eller allergi mot material som kommer i direkt kontakt med huden (t.ex. armbandsmaterial som silikon, plast eller metall).

Det finns inga kända medicinska kontraindikationer för användning av denna enhet under normala förhållanden.

1.2 Prestanda och specifikationer

Tabellen nedan listar de fysiska specifikationerna.

Parameter

Värde/Beskrivning

REF CW901:

Ett komplett, talande klocksystem som inkluderar klocka, armband, laddare, nätadapter och bruksanvisning.

Avsett ändamål:

En talande klocka för visuellt nedsatta, utformad för att hjälpa personer med synnedsättning eller blindhet genom att tillhandahålla hörbar tidsrelaterad information.

Tillförd effekt:

Nätadapter, 100-240 V ~ - 50/60 Hz

Uteffekt:

Nätadapter, laddare 5,0 V 6,0 W

CW901 komplett:

Storlek med armband: B 35 x H 10 x D 240 mm

Vikt:

Klocka: 33 g

Nätadapter: 34 g

Kabel: 21 g

Temperatur:

Användning: -10 - 40°C (700 hPa till 1060 hPa)

Förvaring: -20 - 70°C (700 hPa till 1060 hPa)

Fuktighet:

Användning: 10 - 90% Rh (icke-kondenserande)

Förvaring: 10 - 90% Rh (icke-kondenserande)

Höjd över havet: Användning: max 3000 meter

I enlighet med:

- EN 60601-1: 2006, Allmänna krav på grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda.

- EN 60601-1-2: 2015, Säkerhetsstandarder för elektromagnetisk kompatibilitet.

Elsäkerhet:

Under laddning klass II.

Under användning:

Intern strömförsörjning.

CW901 används i hemmiljö som en medicinteknisk produkt.

Tillverkare enligt MDR:

Conroy Medical AB

Hästhagsvägen 14A

194 52 Upplands Väsby

conroymedical.com

Tabell 1:

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk emission		
CW901 är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden eller användaren av CW901 bör se till att den används i en sådan miljö.		
Emissionstest	Överens- stämmelse	Elektromagnetisk miljö - vägledning
RF-emission CISPR 11	Inte tillämplig.	
RF-emission CISPR 11	Inte tillämplig.	
Harmonic emission IEC 61000-3-2	Inte tillämplig.	
Spänningsvariationer / Flimmer IEC 61000-3-3	Inte tillämplig.	

Tabell 2:

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet			
CW901 är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av CW901 bör se till att den används i en sådan miljö.			
Immunitetstest	IEC 60601 testnivå	Kompatibilitetsnivå	Elektromagnetisk miljö - riktlinjer
Elektrostatisk urladdning (ESD)	$\pm 8\text{kV}$ kontakt	8kV	
IEC 61000-4-2	$\pm 15\text{kV}$ luft	15kV	
Snabba transienter och pulsskurar	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	Nätströmskvaliteten bör vara densamma som i en typisk hem-miljö.
IEC 61000-4-4	Inte tillämpligt	Inte tillämpligt	
Spännings-språng	$\pm 1\text{kV}$ ledare till ledare	1kV	Nätströmskvaliteten bör vara densamma som i en typisk hem-miljö.
IEC 61000-4-5	$\pm 2\text{kV}$ ledare till jord	2kV	

Tabell 2 (forts.):

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet			
CW901 är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av CW901 bör se till att den används i en sådan miljö.			
Immunitetstest	IEC 60601 testnivå	Kompatibi- litetsnivå	Elektromagnetisk miljö - riktlinjer
Spänningsfall, korta avbrott och spännings- variationer i strömförsörj- ningen IEC 61000-4-11	Inte tillämpligt	< 5% U_T (> 95% fall i U_T) i 0.5 cykel. 40% U_T (60% fall i U_T) i 5 cykler. 70% U_T (30% fall i U_T) i 25 cykler. < 5% U_T (> 95% fall i U_T) i 5 sek.	Nätströmskvaliteten bör vara densamma som i en typisk hem- miljö.
Nätfrekvens (50/60 Hz) magnetfält IEC 61000-4-8	30 A/m	3 A/m	Effektfrekvensens magnetfält bör ligga på nivåer som är karaktéristiska för En typisk plats i en typisk hemmiljö.
OBS U_T är växelströmmen i elnätets innan testnivån har anbringats.			

Klocka



framsida



baksida

Armband



Kabel för laddare



Nätadapter för laddarkabel



Modell KA06E-0501000EU-C
av Shenzhen Keyu
Power Supply Technology

1.3 CW901 Delar och reservdelar

1.3.1 REF CW901

CW901 består av de delar som anges nedan:



Beskrivning	Klocka	Armband	Kabel för laddare	Nät- adapter
REF.	90100000	90180000	90161000	90119000

Lista över alla nätadapterar och andra tillbehör som tillverkaren hävdar överensstämmelse med (kablar, tillbehör som används andra än de som anges kan påverka emission/immunitet):

Del	Referens	Specifikation
Nätadapter	90119000	Tillförd effekt: 100-240V/50-60 Hz, 1.4-0.7A Uteffekt: 12V 5.0A, 60W Max

1.3.2 Tillbehör (beställs separat)

För närvarande finns det inga tillbehör tillgängliga för användning med den här enheten. Om tillbehör blir tillgängliga i framtiden kommer uppdaterad information att tillhandahållas i en reviderad version av denna bruksanvisning.

1.3.3 CW901 Reservdelar (som användaren kan byta)



Beskrivning	Klocka	Armband	Kabel för laddare	Nät-adaptar
REF	990100000	990180000	990161000	990119000

1.4 Symboler / Märkning

On device and labels:



Symbol för "UNIKT ENHETSNUMMER".



Symbol för "MEDICINTEKNISK PRODUKT".



Symbol för "KATALOGNUMMER".



Symbol för "SERIENUMMER".



Symbol för "VARNING".



Symbol för "FÖLJ INSTRUKTIONER".



Symbol för "SE BRUKSANVISNING".



Symbol för "TILLVERKNINGSDATUM".



Symbol för "TILLVERKARE".



Denna märkning innebär att enheten överensstämmer med EU-direktivet 93/42/EEC för medicinsk utrustning.



Symbol för "AC-OMVANDLARE".



Symbol för "DC-OMVANDLARE".



Symbol för "INGRESS PROTECTION RATING".



Symbol för "TYP BF TILLÄMPAD DEL".



Symbol för "ENDAST FÖR INOMHUSBRUK".



Symbol för "KLASS II NÄTADAPTER":
Dubbel isolering under laddning.



Symbol för "Lägsta och högsta TEMPERATUR".



Symbol för "Lägsta och högsta LUFTFUKTIGHET".



Symbol för "Lägsta och högsta ATMOSFÄRISKA LUFTRYCK".



Symbol för "FÖRVARAS TORRT".



Symbol för "Hanteras varsamt / ÖMTÅLIGT".



Symbol för att indikera information om BATTERIET.



Symbol (WEEE 2002/96/EC). Släng inte produkten som kommunalt avfall. Samla in produkten separat. Använd insamlings- och retursystem som är tillgängliga för dig.

Produkten kommer ut på EU-marknaden efter den 13 augusti 2005.

Skärm indikatorer

Klocka

0123456789



Skärm tabell

Indikation på skärmen	Förklaring	Rekommenderad åtgärd
00:00	Tid	Timmar och minuter i 24-timmarsformat
Inställningar	Inställningsläge	Välj inställning
Språk	Menyn Språk	Välj språk
Tidsformat	Menyn Tidsformat	Välj digitalt eller analogt format
Aktivitet på skärmen	Menyn för skärmaktivitet	Välj På eller Av
Slut	Avslutningsläge	Välj för att avsluta inställningarna

2. Installation

Detta kapitel handlar om uppackning, temperaturkrav och installation av enheten.

2.1 Uppackning och inspektion

1. Inspektera kartongen visuellt för skador. Rapportera eventuella skador omedelbart.

2. Lyft ut din klocka ur kartongen och placera den på en plan yta. Enheten levereras i en kartong som innehåller:

1 klocka

1 armband

1 laddkabel

1 nätadapter

1 användarmanual

3. Ovanstående lista kan komma att ändras, se packlistan för en korrekt beskrivning av innehållet. Om några delar saknas eller om delarna är skadade, rapportera det omedelbart.

4. Behåll allt frakt- och förpackningsmaterial, eftersom det kan behövas för senare transport, åtminstone under garantitiden.

2.2 Miljökrav

För att enheten ska fungera på bästa sätt, observera följande:

- Använd enheten i miljöer med 0 - 35°C och relativ luftfuktighet 10% - 90%.
- Hantera enheten varsamt.

Varning! Denna enhet är inte vattentät. Bär inte klockan när du duschar, badar eller utsätter den för rinnande vatten. Fukt kan skada interna komponenter och försämra funktionaliteten.

2.3 Procedur för installation

Försiktighet! Använd endast den medföljande laddaren för att ladda klockan.

Förbered klockan för användning:

1. Anslut laddarkabeln till laddaren.
2. Anslut laddaren till elnätet. Laddaren kan anslutas till elnätet spänning mellan 100 och 240 V AC.
3. Anslut din klocka till laddaren. Se till att klockan är korrekt placerad så att kontaktstiften ansluts korrekt. Magneterna i klockans och laddarens kabel hjälper till att placera kabeln i rätt riktning.


Obs! Det kommer inte att vara möjligt att ansluta om den inte är placerad i rätt riktning. Endast en riktning är möjlig.

4. Det tar cirka 1,5 timme att ladda klockan helt. Ladda batteriet innan du använder det första gången. Batteriet är fulladdat när rösten indikerar "Laddad 100%".
5. Ta bort klockan från laddaren.
6. Klockan är redo att användas.

2.4 Avancerade inställningar

Obs! Laddaren måste vara ansluten för att komma åt Avancerade inställningar. Efter åtkomst kan laddkabeln tas bort.

Tryck på volymknapparna (+ och -) i 3 sekunder. Displayen visar "Inställningar" och ger hörbart svar på "Avancerade inställningar". Gå igenom inställningslistan genom att scrolla med knapparna + och -. Lista över inställningarna:

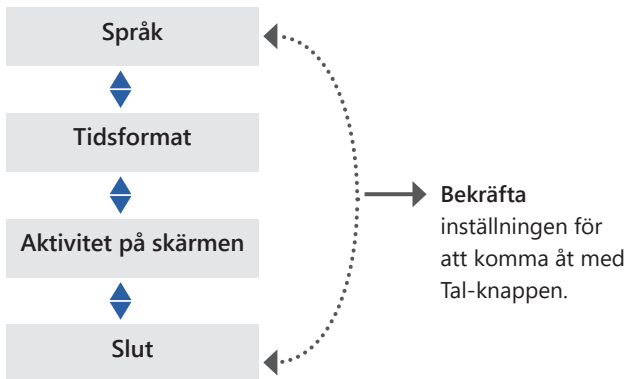

1. Språk

Bläddra igenom tillgängliga språk med + eller - knappen.
Välj med Tal-knappen.

2. Tidsformat

Välj analogt eller digitalt format med + eller - knappen.
Bekräfta med Talk-knappen.

3. Aktivitet på skärmen

Välj På eller Av med + eller - knappen.
Bekräfta med Tal-knappen.

4. Slut

Bekräfta inställningarna och avsluta de avancerade inställningarna genom att trycka på Tal-knappen.

Obs! De avancerade inställningarna avslutas om det inte sker någon aktivitet under 15 sekunder.

2.5 Tidsinställning

Obs! Laddaren ska inte vara ansluten.

Obs! Tidsinställningen utförs alltid i digitalt format.

Tryck på volymknapparna (+ och -) i 3 sekunder och ge ett hörbart svar "Ändra tid".

Välj Timme med + eller - knappen. Bekräfta med Tal-knappen. Ge ett hörbart svar "Ställ in timme" och för varje stegad timme när du trycker på knapparna. Timsiffrorna kommer att blinka på displayen.

Välj Minuter med + eller - knappen. Bekräfta med Tal-knappen. Ge ett hörbart svar "Ställ in minut" och för varje stegad minut när du trycker på knapparna. Minutsiffrorna kommer att blinka på displayen.

Lås tidsinställningen genom att trycka på Tal-knappen igen. Den inställda tiden läses upp och visas på displayen innan klockan återgår till standby-läge.

Obs! Om det inte sker någon aktivitet under 15 sekunder aktiveras tidsinställningarna med ett hörbart svar "Inställning avbruten". Den pågående inställningen sparas inte om den inte redan är bekräftad.

2.6 Justering av volym

Obs! Vid varje knapptryckning avbryts en potentiell pågående hörbarhet.

Volymen har fyra nivåer: Hög, Medium, Låg och Tyst.

Tryck på plusknappen (+) för att höja volymen.

Tryck på minusknappen (-) för att sänka volymen.

Ett hörbart ljud kommer att säga "Högre" eller "Lägre". När slutläget har nåtts hörs inget mer. Till exempel, när du är på den lägsta inställningen, kommer tre tryck på plusknappen att läsas

upp som "Högre", "Högre" och "Högre" och sedan **tyst** om du fortsätter att trycka. Tre snabba tryck i följd på + eller - knappen tar dig direkt till den högsta eller lägsta inställningen.

2.7 Laddning

När laddkabeln är ansluten och nätadaptern ansluten kommer rösten att läsa upp "Laddning pågår, x procent laddad".

När laddkabeln eller nätadaptern är urkopplad kommer rösten att läsa upp "Laddning avbruten, X procent laddad".

Laddningen kommer att indikeras i procent av batteriet som laddats i fem nivåer: 10, 25, 50, 80 och 100%.

Obs! Laddningsnivån kommer endast att indikeras vid nästa kommande tidsavläsning.

Genom att trycka på Tal-knappen under laddning kommer rösten att läsa upp tiden följt av laddningsnivån i procent.

Varning för lågt batteri

Hörbart under 25 %: Låg batterinivå.

Hörbart under 10 %: Mycket låg batterinivå.

3. Funktionell beskrivning

Detta kapitel beskriver hur CW901 fungerar, var anslutningarna och indikationerna är placerade på enheten och deras funktioner.

Under normala användnings- och underhållsförhållanden är den förväntade livslängden för denna enhet 5 år.

En full laddning ger vanligtvis upp till 2 veckors användning, även om den faktiska körtiden kan variera beroende på hur ofta enheten används.

3.1 Beskrivning av användning

När användaren trycker på Tal-knappen på klockan tänds displayen och tiden läses upp i önskat format. När användaren trycker på knapparna + och – justeras volymen.

Varning! Om klockan eller laddaren tappas, inspektera för synliga skador som sprickor, lösa delar eller ovanligt beteende. Fortsätt inte att använda enheten om du misstänker skada. Försök inte öppna eller reparera produkten.

3.2 Beskrivning av utrustning

CW901 består av en klocka, ett batteri och ett armband. Nedan följer en kort beskrivning av varje komponent.

Klockan består av ett fodral med digital display, högtalar- och laddaranslutning. Batteriet är inbyggt i fodralet. Klockan använder lite kraft mellan tidsangivelseprocedurerna. Armbandet består av ett silikonband. Batteriet består av li-jon-batterier.

3.3 Grundläggande funktion

Klockan har tre knappar på höger sida. Här är beskrivningen av varje knapp, uppifrån och ned.

- Plusknappen (+)** tryck och släpp för att öka volymen
- Tal-knappen** tryck och släpp för att indikera tiden
- Minusknappen (-)** tryck och släpp för att sänka volymen

3.4 Kontrollera batteriet

Batteriet kan laddas när som helst eller åtminstone när du uppmanas att varna för lågt batteri. Klockfunktionen kommer att sättas i standby om du försöker när laddningsnivån är noll.

Ladda batteriet: Anslut din klocka till laddaren. Se till att klockan är korrekt placerad så att kontaktstift ansluter korrekt. När batteriet är fulladdat stängs laddningsströmmen automatiskt av och ett hörbart svar läser upp att laddningen har avbrutits, x procent laddad.

Laddningen kan avbrytas när som helst utan att cellerna skadas, men en fullständig laddning tar ungefär 1,5 timmar och rekommenderas.

Försiktighet! Använd endast den medföljande laddaren för laddning.

Obs! För att garantera en lång livslängd för det uppladdningsbara batteriet, observera följande krav:

Ladda batteriet vid en temperatur mellan 5 och 35°C.

4. Bruksanvisning

I det här kapitlet beskrivs hur du använder enheten.

Försiktighet! Inspektera alla delar av enheten för defekter före användning. Kontrollera prestanda om du tappar din klocka.

4.1 Förberedelser före användning

1. Anslut laddkabeln till nätadaptern. Anslut klockan till laddkabeln och anslut nätadaptern till ett eluttag.
2. Kontrollera att batteriet är laddat genom att trycka på Tal-knappen.
3. Om enheten har stängts av, se 2.3 Installationsprocedur.

4.2 Hur man använder klockan

Obs! Klockan ska ställas in enligt denna manual.

1. Sätt klockan på handleden. Displayen ska vara vänd uppåt med knapparna till höger.
2. Kontrollera att knapparna är tillgängliga.
3. Starta tidsvisningen genom att trycka och släppa Tal-knappen. En röst indikerar den aktuella tiden. Digitalt tidsformat som standard.
4. Justera volymen genom att trycka på den övre plusknappen eller nedre minusknappen.

Obs! Tiden kommer inte att läsas upp förrän knappen släpps.

Obs! Volymjusteringen görs inte förrän knappen släpps.

Försiktighet! I händelse av enhetsfel (intermittent drift, dålig prestandakvalitet) kontakta din lokala Conroy Medical-representant för hjälp.

4.3 Om klockan inte startar

Tabellen nedan täcker de vanligaste troliga orsakerna till problem och föreslår några rekommenderade åtgärder.

Trolig orsak

Rekommenderad åtgärd

Batteriet är inte laddat

Ladda batteriet

Om klockan fortfarande inte har startat, se kapitel 6 för ytterligare information.

5. Rengöring

Det här kapitlet ger information om rengöringen (procedur, frekvens) av klockan. Enheten kräver minimalt underhåll för effektiv drift. Följ rengöringsproceduren nedan.

Varning! För din egen säkerhet ska du alltid koppla bort din klocka från laddaren.

Varning! Enheten kan bli kontaminerad om den kommer i kontakt med patientens kroppsvätskor eller utandade (utsläppta) gaser.

Rekommenderad rengöringsfrekvens:

För personligt/hemmabruk: Rengör enheten en gång i veckan eller vid behov om den är synligt smutsig.

För klinisk eller delad användning: Rengör och desinficera enheten mellan varje användare och omedelbart efter eventuell exponering för kroppsvätskor eller utsläppta gaser. Inspektera alltid enheten under rengöring och avbryt användningen om skada eller kontaminering misstänks.

Desinficera med ett kemiskt medel som anses vara "steriliserande" (isopropanol 70%). Alternativt kan en nyberedd lösning av utspädd natriumhypoklorit (hushållsblekmedel) användas för att desinficera ytor som inte kommer att skadas av lösningen. Utspädda lösningar av 1 del blekmedel till 10 delar vatten kan användas.

Oavsett vilket "steriliseringsmedel" eller desinfektionslösning som används, kom ihåg att ta bort eventuella rester för att säkerställa att enhetens ytor inte utsätts för korrosion eller missfärgning.

Försiktighet! Använd inte kemiska eller slipande rengöringsmedel som aceton, ammoniak eller liknande. Använd inte verktyg med vassa kanter för rengöring, vilket kan skada enhetens finish. Om du gör det kan din klocka bli oanvändbar och garantin ogiltigförklaras.

Försiktighet! Sänk inte under några omständigheter ner klockan i någon form av vätska. Detta kommer att skada klockan och ogiltigförklara garantin.

6. Felsökning

Underhåll som utförs av användaren/förskrivaren är begränsat till byte av armband, klocka, laddare och nätadapter. Följande information beskriver vanliga problem och ger förslag på lösningar.

Problem	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
Processen startar inte.	Inget "ljud" när knappen trycks in.	Byt klocka eller kontakta din lokala C.M-representant.
	Klockan är defekt.	Byt klocka eller kontakta din lokala C.M-representant.
	Batteriet är inte laddat / låg laddning.	Ladda batteriet i 1,5 timmar. Kontakta din lokala C.M-representant.
	Låg batteriladdning.	Kontrollera batterienheten. Kontakta din lokala C.M-representant.
	Annan orsak.	Kontakta din lokala C.M-representant.
Dålig prestanda.	Dåligt ljud.	Rengör, se kapitel 5.2.
	Klockan är defekt.	Byt klocka eller kontakta din lokala C.M-representant.
	Annan orsak.	Kontakta din lokala C.M-representant.

7. Garanti och service

Information om garantin och den service som tillhandahålls av Conroy Medical listas nedan:

7.1 Garanti

Conroy Medical garanterar att utrustningen ska vara fri från defekter i material och utförande när den levereras till den ursprungliga köparen.

Conroy Medicals enda skyldighet ska vara begränsad till reparation eller utbyte, efter Conroy Medicals val och bekostnad, av den defekta delen eller enheten under en period av två (2) år efter det första leveransdatumet till den ursprungliga köparen. Garantin sträcker sig endast till den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas eller överföras, och gäller inte för extrautrustning eller engångstillbehör.

Conroy Medical garanterar att utrustningen är lämplig för de ändamål och indikationer som beskrivs i märkningen när den används i enlighet med bruksanvisningen. Om inte utrustningen används i enlighet med sådana instruktioner, är denna garanti ogiltig och utan effekt.

Det finns ingen annan uttrycklig eller underförstådd garanti, inklusive någon garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Conroy Medicals enda skyldighet och den ursprungliga köparens exklusiva gottgörelse för brott mot garantin ska begränsas till reparation eller utbyte efter Conroy Medicals val.

Conroy Medical ska inte hållas ansvarigt för omedelbara, oförsedda skador eller följdskador. Modifieringar, ändringar, omkalibreringar eller missbruk och service av annan än en Conroy Medical-auktoriserad representant kommer att ogiltigförklara garantin.

7.2 Service

Service under garantiperioden

Under Conroy Medicals garanti får enheten inte öppnas av obehörig personal. Kontakta din lokala Conroy Medical-representant för service- och reparationsinformation för alla CW901-enheter.

Fraktkostnader för alla enheter som returneras till Conroy Medical eller Conroy Medicals auktoriserade representant ska betalas av den ursprungliga köparen.

Enheten måste förpackas i originalkartongen eller i en annan kartong som ger tillräckligt skydd under transporten. För att säkerställa en snabb retur måste en Conroy Medical-representant meddelas innan någon enhet skickas för reparation.

När du kontaktar Conroy Medical-representanten, var beredd på att ange enhetens artikelnummer och serienummer. Ett nummer för servicebegäran kommer att utfärdas och bör åtfölja all kommunikation. En kort skriftlig beskrivning av problemet ska bifogas enheten när den returneras för service. Conroy Medical ansvarar inte för obehöriga returer eller för enheter som skadats under transporten på grund av felaktig förpackning.

Service efter garantiperioden

Efter Conroy Medicals garantiperiod kommer CW901 att fortsätta att servas av Conroy Medical.

Om service av enheten utförs av den ursprungliga köparens tekniska avdelning, kommer Conroy Medical att på begäran tillhandahålla servicemanualen inklusive icke-konfidentiell information (komponentlistor, beskrivningar, kalibreringsinstruktioner), periodisk förebyggande underhållsguide och all annan icke-konfidentiell information som hjälper användarens lämpligt kvalificerade tekniska personal att reparera de delar av utrustningen som är utsedda av Conroy Medical.

Byte av utbytbara delar (underhåll utfört av användaren)

Underhållet är begränsat till rengöring eller byte av armband, klocka, laddkabel och nätadapter. Informationen i kapitel 6 (Felsökning) täcker vanliga problem och ger förslag på lösningar.

7.3 Avfallshantering av produkter

För kassering av CW901, eller delar därav, (inklusive tillbehör) i slutet av den beräknade livscykeln på 5 år, se till att du gör följande:

- Släng inte CW901 som osorterat kommunalt avfall.
- Samla in CW901 separat.
- Använd de insamlings- och retursystem som finns tillgängliga för dig.

För mer information om retur, återvinning eller återvinning av CW901, vänligen kontakta din lokala Conroy Medical-representant.

8. Lokalt försäljningskontor

[illegible]

Användarmanual

CW901 TimeTalk talande klocka

distribueras av



conroymedical.com