

Manual och skötselråd Kellerer teknikkäpp



Kellerer Teleskopkäpp

Art nr 50111 längd 70 cm – 130 cm

Art nr 51110 längd 80 cm – 151 cm

Art nr 50117 längd 80 cm – 160 cm

Montering

Käppen består av 2 delar. Greppa doppskon med vänster hand. Vrid överdelen moturs ett halvt varv. Dra ut till önskad längd. Håll i underdelen och vrid överdelen medurs tills den sitter fast.

Fäll ihop käppen

Håll underdelen. Vrid överdelen moturs. Tryck ihop. Lås genom att vrida överdelen medurs.

Skötsel

Känn alltid efter så att doppskon är ordentligt fastskruvad varje gång käppen fälls ut. Se till att hålla käppen ren. Rengöringen bör genomföras med käppen utdragen. Den ska regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och eventuellt milt rengöringsmedel (typ diskmedel).

Byte av doppsko

Håll käppens nedre del med vänster hand. Vrid doppskon moturs. Fäst den nya doppskon genom att gänga på den på käppen medurs.

Byte av nederdel

Håll käppens övre del med vänster hand och handtaget till vänster. Fatta käppens nederdel med höger hand och skruva den moturs tills den släpper. Skruva i den nya nederdelen och justera käppens längd (se montering).

Byte av expander och handtag med handledsband

Rekommenderas att byte görs av leverantören (Iris Hjälpmedel/Käppakuten).

Godkännanden

Käppen är CE-märkt som medicintekniskt hjälpmedel, 2017/745 MDR, Klass 1