

MyTime - 10

- Dygnsklocka med kontaktstyrning

Manual



MyTime är ett fickur som med en enda knapptryckning säger tid, dag och när på dygnet du är.

Fäste för halsrem



Tryck på den vita knappen för att få tiden uppläst

Ingång för
hörsnäcka



Ratt för att
ställa volym

Ingång för
kontaktstyrning



SET/LÅS

Ställ tiden

HOUR/TIMME

Ställ timme

MINUTE


Ställ minut

DAY/LANGUAGE

DAG/SPRÅK

Ställ dag och språk

Batterilucka

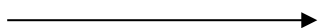

Magnethölje på baksidan (se text nedan)

Fäst MyTime på till
exempel kylskåpet eller
en whiteboard



OBS! Magneter kan påverka personer som har Pacemaker. Det magnetiska fältet är svagt runt MyTime vilket medför ingen eller liten risk för påverkan. Undvik dock helst att hänga uret direkt ovanför en Pacemaker.

Sätt i batterierna

Klockan levereras utan att batterierna är monterade. Ta bort batteriluckan och montera batterierna. MyTime 10 har **engelska som grundinställning**. Om du vill använda svenska behöver du ändra språket manuellt.

Volym

Justera volymen med ratten till höger (se bild). Uttag 3,5 mm för hörlur eller hörsnäck (tillbehör).

Inställning av tid och dag

1. Håll ner knappen SET/LÅS.
2. Ställ in timme med HOUR.
3. Ställ in minut med MINUTE.
4. Ställ in rätt dag med DAY.
5. Släpp SET/LÅS och tryck på talknappen när du är klar och du hör en ton när inställningen är låst. Det går också bra att vänta 15 sekunder så låser klockan sig själv.

Val av analog eller digital tidsannonsering

Med analog tidsangivelse säger klockan "Kvart över tre lördag natt"

Med digital tidsangivelse säger klockan "Klockan är tre och femton, lördag" *Observera att digital tidsangivelse inte talar om när på dygnet du befinner dig.*

1. Håll ner knappen SET/LÅS.
2. Ställ digital eller analog uppläsning genom att stega med HOUR.
3. När du stegat fram till "tolv natt" så får du analog tidsangivelse.
4. När du stegat fram till "noll" så får du digital tidsangivelse.
6. Släpp SET/LÅS och tryck på talknappen när du är klar och du hör en ton när inställningen är låst. Det går också bra att vänta 15 sekunder så låser klockan sig själv.

Val av språk

Tillgängliga språk är Svenska, Norska, Danska, Finska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska och Holländska.

OBS! Grundinställningen är engelska.

1. Håll ner knappen SET/LÅS.
2. Håll ner knappen LANGUAGE i ca 5 sekunder tills du hör att klockan läser upp tiden på inställt språk.
3. Stega med knappen LANGUAGE tills du får önskat språk.
4. Släpp SET/LÅS och tryck på talknappen när du är klar och du hör en ton när inställningen är låst. Det går också bra att vänta 15 sekunder så låser klockan sig själv.

Du kan kontaktstyra eller göra reset på MyTime

Ingång för kontaktdon finns på klockans vänstra sida (se skiss).

Resetmöjlighet finns på baksidan. Nollställer eller startar tyst klocka.

Magnetfäste

MyTime är utrustad med magnetisk baksida. Du kan enkelt fästa den mot en plan yta av metall, till exempel whiteboardtavla, kylskåpsdörr.

Intervall för dygnsangivelse:

Morgon:	06:00 – 09:00
Förmiddag:	09:00 – 12:00
Eftermiddag:	12:00 – 18:00
Kväll:	18:00 – 23:00
Natt:	23:00 – 06:00

Ökad taktil tidsavläsning

Montera en av de medföljande självhäftande gummiplattorna på talknappen.

Vid leverans medföljer:

MyTime, 2 AAA batterier, Två självhäftande gummiplattor, Halsrem och Manual.

Batteribyte

MyTime 10 har engelska som grundinställning. Vid batteribyte återställs språket automatiskt till engelska. Om du vill använda svenska behöver du ändra språket manuellt.

Underhåll

Klockan har 2 AAA batterier. Livslängden beror på hur ofta man aktiverar talfunktionen. MyTime torkas av med lätt fuktad trasa. Inga lösningsmedel ska användas.

Garanti, Service och Support

Garanti ett (1) år för fabrikationsfel om inte annat avtalats. Vänd dig i första hand till inköpsstället. Frågor kan skickas till info@irishjalpmedel.se.

Godkännanden

Klockan är CE-märkt som medicinskteknisk utrustning MDR, klass 1.

Instruktioner

På vår hemsida och webbshop finner du bruksanvisningar och instruktioner, både i text eller bild. Du finner även fler varianter av talande klockor, både på svenska och på andra nordiska språk.