
Manual och skötselråd nordisk teknikkäpp - vikbar



Finns i längder 90 – 160 cm. Art nr 50310-XXX, 130 cm blir då 50310-130

Konstruktion

För att göra käppen så lätt som möjligt så är den tillverkad av armerad kolfiber. Käppen består av 5 - 6 delar beroende på längd. Fäll ut käppen genom att ta bort handledsbandet som håller ihop käppen. Håll ut armen horisontellt, håll i handtaget och släpp sedan övriga delar av käppen. Dessa faller ut nedåt och gummibandet fasar effektivt ihop delarna till en stabil käpp.

Fäll ihop käppen

Håll i handtaget. Drag ut sektionen under handtaget och vik det mot handtaget och håll fast. Fortsätt med övriga sektioner till dess käppen är hopfälld. Använd handledbandets yttre del till att låsa käppen.

Skötsel

Se till att hålla käppen så ren som möjligt. Rengöringen bör genomföras med käppen utfälld. Rengör uppifrån och ned med doppskon riktad nedåt. Den ska regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och eventuellt mildt rengöringsmedel (till exempel diskmedel).

Byte av doppsko

Håll käppens nedre del med vänster hand. Vrid doppskon moturs. Fäst den nya doppskon genom att gånga på den på käppen medurs.

Denna käpp har europastandard för doppsko. Det betyder att de flesta av våra doppskor går att använda till denna käpp. Sortimentet av doppskor finner du på vår hemsida. Det finns olika doppskor utifrån brukarens käppteknik och andra behov.

Godkännanden

Käppen är godkänd som medicintekniskt hjälpmedel, 2017/745 MDR Klass 1.