

## Bruksanvisning

### Talande fickuret Tida rekonditionerad



Tida är ett lätthanterat och talande fickur som kan läsa upp tiden i klartext (analogt) eller digitalt. Tida kan anpassas med ett dagligt larm, då den ger ljudsignal samt läser upp aktuell tid. Tida läser upp aktuell tid, veckodag, datum och månad. Du kan lyssna hur många gånger du vill. Inbyggd batterivakt meddelar "Batteri" när batterinivån är låg samt sänker volymen automatiskt till nivå 3 för att spara ström. Byt då batteri så fort som möjligt.

Knapparna är placerade på framsidan och präglade med symboler (se kapitel 1 **Beskrivning av knappar**).

Tida är tillverkad av återvinningsbar ABS plast och levereras med 2 st 1,5 Volts batterier (typ LR1), halsrem och bruksanvisning.

**OBS!** Se miljöinformation sista sidan.

## 1. Beskrivning av knappar:

Alla knapparna är placerade på Tidas framsida.

Knappen **Avläsning** (symbol urtavla) används för att höra aktuell tid och ev. dag och datum.

Kort tryck på knappen och Tida läser endast upp aktuell tid

*”Klockan är ..”*

Knappen hålls intryckt längre och Tida läser även upp veckodag, datum och månad.




Knappen **Larm** (symbol med bjällra) används för att aktivera, stänga av samt vid inställning av larm. (se kapitel **Inställning av larm**)

Om larmfunktionen inte är aktiverad läser Tida upp aktuellt klockslag även på denna knapp (inte dag och datum).



Knappen **Ställ** finns längst ner på högerkanten och är rund utan någon prägling, denna används för inställning av klockan samt larm (se kapitel **Ställa klockan**).

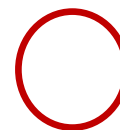

**Volymknapparna** (symbol pilar upp/ner)

Volymen kan ställas i nio olika steg (volym 3 är grundvärde).


Klockan säger vilken volym som är inställd vid tryck på **volymknapparna**.

Knapp med pil uppåt ökar volymen upp till volym 9

Knapp med pil nedåt minskar volymen ner till volym 1.

Vid ändring läser klockan upp den nya volyminställningen.

Volymknapparna används även vid inställningar.

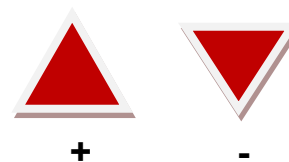


## 2. Beskrivning av inställningar

### Val av funktion:

För att välja analog eller digital uppläsning av tid eller aktivera/avaktivera larmfunktionen, måste man öppna locket på baksidan och ändra läge på respektive omkopplare. Vid leverans är larmfunktionen aktiv och med analogt tal.


Tida öppnas genom att man skruvar bort krysskruven på lådans baksida. Lyft försiktigt i underkanten av lådan och locket kan lyftas av. Observera att vara aktsam om de kablar som förbinder lådans lock med underdelen.

På kretskortet i övre högra hörnet, sitter en liten omkopplare med två små vita knappar.

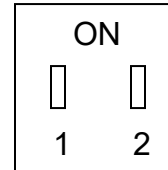

### Omkopplare nr 1 är larmfunktion.


Då omkopplaren är ställd i läge on (lilla vita knappen uppåt) betyder att larmfunktionen är aktiverad. Omkopplaren i läge off (lilla vita knappen nedåt) betyder att larmfunktion ej är aktiv. Knappen **Larm** fungerar nu som avläsningsknapp av klockslag.

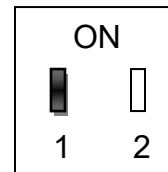

### Omkopplare nr 2 är uppläsning av tiden med digitalt eller analog angivelse.

Då omkopplaren är ställd i läge on (lilla vita knappen uppåt) betyder det att klockan talar digitalt *t ex. sjutton och fyrtiotre osv.*

Då omkopplaren är ställd i läge off (lilla vita knappen nedåt) betyder det att klockan läses upp analogt, *t ex. kvart i fyra, två minuter i halv sex osv.*

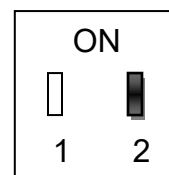

Klockan säger även dygnsangivelse enligt nedan samt veckodag.

Kl 23.00 – 5.59 natt

Kl 6.00 – 8.59 morgon

Kl 9.00 – 11.59 förmiddag

Kl 12.00 – 17.59 eftermiddag

Kl 18.00 – 22.59 kväll

Vid montering, börja med att försiktigt föra ner lockets låsklackar i ovankant på underlådan och sedan trycka ihop underkanten av lådan. Sedan skruvas skruven i.

**OBS!** Funktionen kan ändras när man vill genom att ändra de små vita knapparnas lägen. Vid leverans är TIDA inställd i läge off, båda omkopplarna läge nedåt. Detta innebär att TIDA talar klartext (analogt) och att larmfunktionen är avstängd.

### Höra tid och datum:

Tryck kort på knappen **Avläs**, Tida säger: Klockan är --:--

Håll knappen kvar intryckt under tidsavläsningen och du får även höra veckodag, datum och månad.




Tida stänger av sig själv efter avslutat tal.

### Ställa klockan:

Vid tryck på knappen **Ställ** kvitterar Tida med ett kort pip samt "Ställ timmar" och ställfunktionen inleds.

Varje gång knappen "**Ställ**" släpps kortvarigt hoppar rutinen till nästa steg, om knappen **Ställ** släpps helt överges ställfunktionen, detta kvitteras med 2 korta pip.

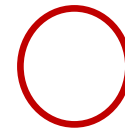

"Ställ timmar"

Håll kvar knappen **Ställ** inne vid önskat val och tryck på **Volymknapparna**, för att ställa in önskat värde, öka med **Volm upp** samt minska med **Volm ner**.



+



-

Stega med pilarna

## Ställrutin Tida:

"Pip" (kvittring av att ställrutin är påbörjad)

"Timmar" + (timmar 0 till 23)

"Minuter" + (minuter 0 till 59)

"Dag" + (dag Måndag - Söndag)

"Datum" + (datum 0 till 31)

"Månad" + (månad Januari till December)

"År" + (år 0-3)\*

"Pip - pip" (kvittring av att ställrutin är avslutad)

\*Vid inställning av år utgår man från skottår

T.ex 2024 som motsvarar år 0 i klockan,

2025 " " " 1 i "

2026" " " 2 i "

2027 " " " 3 i "


Skottår: 2024, 2028 osv.

## Exempel inställning av tid:

### Ställa timmar

Tryck på knappen **Ställ**, Tida säger: "Ställ timmar XX (där XX är den aktuella timinställningen)

Håll kvar knappen **Ställ** och öka en timme i taget med **Volym upp** eller minska med **Volym ner**, för varje tryck talar Tida om den nya aktuella timinställningen.

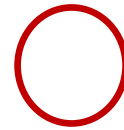

"Ställ timmar"



+




-

Stega med pilarna

Ställa minuter/ veckodag/datum/månad/år:

Släpp knappen **Ställ** kortvarigt och tryck in den igen. Tida säger "minuter" och den aktuella minutinställningen.

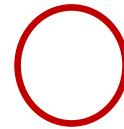

"Ställ minuter"

Stega fram till önskat antal minuter, släpp knappen **Ställ** kortvarigt och ställ på liknande sätt veckodag, datum, månad och år.



+

-

Stega med pilarna

Släpp sedan knappen **Ställ**, Tida kvitterar med 2 kort pip att ställrutinen är avslutad  
Då minuter ställs om nollställs sekunderna.



"Pip, pip"

Vid inställning av tid pratar Tida alltid digitalt.

### Inställning av larm:

För att kunna ställa in larm måste larmfunktionen var installerad, dvs. omkopplare 1 uppåt (vg se kapitel Val av funktion).

Tryck in knappen **Larm**



När Tida säger "Larm från" håll knappen **Larm** intryckt.

"Larm från"

Efter en kort stund säger Tida "Ställ Larm" timmar xx (där xx är den aktuella inställda larmtimtiden).



"Ställ larm"

Håll kvar knappen **Larm** intryckt och öka en timme i taget med **Volym upp** eller minska med **Volym ner**, för varje tryck talar Tida om den nya aktuella timinställningen för larmet.



+

-


Stega med pilarna

Släpp knappen **Larm** kortvarigt och tryck in den igen. Tida säger "minuter" och den aktuella minutinställningen.



"Minuter"

Stega fram till önskat antal minuter med hjälp av **Volym upp** eller **Volym ner**. Släpp sedan knappen **Larm**, Tida kvitterar med 2 kort pip att larmrutinen är avslutad.

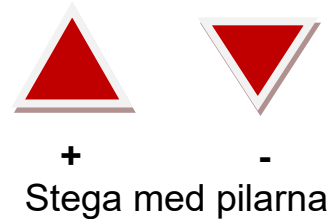

"Pip, pip"

Tryck ytterligare en gång på knappen **Larm** för att aktivera larmet, Tida säger "Larm till" samt inställt klockslag.

Vid inställning av larmtid pratar Tida alltid digitalt.



"Larm till"

### Vid larm:

När larmet utlöses hörs tre larmsignaler samt uppläsning av tiden. Larmet stängs av med Larm-knappen. Tida bekräftar med "Larm från".



"Larm från"


Om larmet ej stängs av påminner Tida igen efter 1 minut och därefter 4 minuter. Larmet stängs automatiskt av efter tredje gången.

### 3. Batteribyte:

Klockan Tida drivs av 2 st 1,5 V batterier (typ LR1) som följer med vid leverans. När batterierna börjar bli dåliga säger Tida "Batteri" samt sänker automatiskt volym till nivå 3 för att spara ström.

Batterierna byts genom att lossa krysskruven till batterifacket på baksidan av klockan med skruvmejsel. Ta ur de förbrukade batterierna. Nya batterier stoppas i batterifacket. Observera polariteten, det översta batteriet pluspol åt vänster, det undre batteriet pluspol åt höger, rätt polaritet står även märkt i lådans botten. Vid felaktig batteriisättning blir batterierna varma och förbrukas på en mycket kort stund.

Tida behåller rätt tid utan batterier i ca 5 minuter.

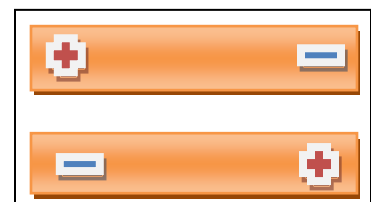

#### **4. Underhåll och service:**

Tida behöver inget underhåll förutom batteribyte. Vid behov av service kontakta Iris Hjälpmedel AB.

#### **MILJÖINFORMATION**

Vid kassaktion avlägsnas batteriet som lämnas till särskild batteriinsamling. Fickuret Tida återlämnas till Iris Hjälpmedel eller inköpsstället för återvinning eller lämnas till certifierad återvinning.

Fickuret Tida är svensktillverkat av återvinningsbar ABS-plast

Vi hoppas att du skall få mycken nytta av din talande klocka Tida!

